


Espacio necesario

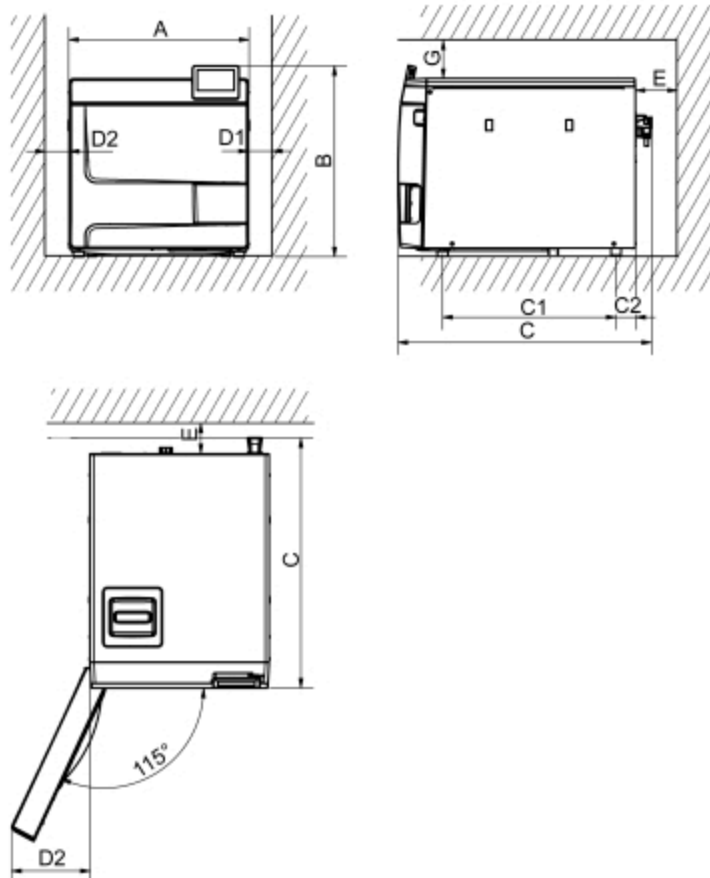

Dimensiones		Vacuclave 118	Vacuclave 123
Ancho	A	47 cm	
Altura	B	50 cm	
Profundidad, total	C	64 cm	
Distancia entre las patas del equipo	C ₁	45 cm	
Distancia desde las patas traseras hasta la pared trasera	C ₂	5 cm	
Distancia mínima en el lateral	D ₁	5 cm	
Distancia mínima hasta el lateral del tope de la puerta	D ₂	10 cm	
Distancia mínima hacia abajo	E	5 cm	
Distancia mínima hacia arriba (extraíble/con canal de salida de aire)	G	5 cm	

La parte superior del autoclave debe tener acceso libre para rellenar cómodamente el tanque de almacenamiento y garantizar una buena ventilación.

El autoclave funciona con un refrigerador en la parte trasera del equipo. El funcionamiento y la vida útil pueden verse afectados si se limita la disipación de calor mediante el refrigerador. El autoclave solo se puede instalar si se garantiza una circulación de aire suficiente.