



# de crear sonrisas bonitas.

La estética hecha sencilla por GC





Bienvenidos a la GC G-ællery



# La Clencia tras la creación de sonrisas bonitas.

con G-ænial de GC

En GC, nos centramos en cada individuo. Sabemos que no hay dos pacientes iguales, como tampoco lo son sus retos de restauración. También sabemos que no hay dos odontólogos con las mismas preferencias en lo que se refiere a técnicas de restauración o composites.

Para responder a estas necesidades, GC presenta una gama de composites con diferentes opciones de manipulación, desde más duros y condensables, hasta fluidos e inyectables. Los composites de GC presentan cualidades estéticas que ayudan a crear restauraciones invisibles de forma sencilla y eficaz.

Cada uno de estos composites ofrece excelentes propiedades físicas y de retención del pulido para garantizar la resistencia y una estética duradera. Y cada producto es el resultado de la filosofía de GC: innovación y calidad.

# Soluciones estéticas de GC para cada caso... cumplimos sus expectativas a la perfección.

#### G-ænial Anterior



#### G-ænial Posterior

Composite de consistencia media, que no se Composite de consistencia más firme, una sen- G-ænial Universal Flo, con fluidez controlada, adhiere a los instrumentos ni se descuelga, sación más condensable con la fluidez adeideal para restauraciones estéticas de mo- cuada para garantizar la adaptación completa como un composite tradicional. Es un compodelado manual. G-ænial Anterior confiere al suelo y a las paredes de la cavidad. G-ænial colores excepcional. El resultado estético es ajuste de colores óptimo para restauraciones posteriores perfectas.



#### G-ænial Universal Flo

se inyecta cómo un fluido, pero se mantiene site de gran resistencia, pulido y versatilidad una vitalidad natural y ofrece un ajuste de Posterior se talla con facilidad y ofrece un excepcionales adecuado pará cualquier tipo cavidad y evita que aparezcan burbujas de aire.

G-ænial Flo es un composite muy fluido que permite una manipulación sencilla. Es un material de gran humectabilidad, lo que permite una adaptación perfecta a las paredes de la







# G-ænial Anterior de GC

La gama G-ænial Anterior es muy versátil y se adecua a las necesidades específicas de cada caso. Tiene una facilidad de aplicación impresionante. En conjunto, es un producto que le permite realizar reconstrucciones extensas que resultan invisibles junto al resto de la dentadura.

Me encanta la facilidad y sencillez de la selección de colores.

opacos son perfectos para ocultar las líneas de fractura. Su mimetismo junto con su pulido hacen que sea el material de elección en

Lo mejor es su manipulación y su

amplio tiempo de trabajo. Los colores

Dr. M. Menke (Austria) Dr. Z. Mach (República Checa)

Dr. J. Tapia Guadix (España)

anteriores.

## G-ænial Anterior: La estética hecha sencilla

G-ænial Anterior es el material ideal si busca una restauración que se ajuste a las expectativas estéticas de todos sus pacientes. Es un composite modelable que ofrece un aspecto bonito, natural y con mucho brillo, y al mismo tiempo muy fácil de usar. Es el composite perfecto para uso diario. G-ænial Anterior también le proporciona más tiempo de trabajo para modelar, pincelar y esculpir hasta obtener una forma anatómica y un resultado estético ideales con mucha facilidad.

- Estética y radiopacidad: Combinación de belleza y trazabilidad
- Uso versátil: Desde la sencillez monocromática hasta la complejidad de múltiples colores
- Sistema de color acorde con la edad: Selección del color de esmalte según la edad del paciente
- Manipulación sin esfuerzo: Viscosidad suave y no pegajosa, incluso para manipularlo con pincel





Dr. J. Tapia Guadix (España)



## El secreto de crear invisibilidad.

G-ænial Anterior tiene una composición única capaz de proporcionar restauraciones que se adaptan de forma continua a los dientes y, en la mayoría de casos, monocromáticas. Las investigaciones más recientes han permitido disponer de múltiples tamaños y tipos de rellenos que mejoran la capacidad de alta dispersión de la luz imitando el reflejo natural de esta. El resultado es un ajuste del color natural excepcional.



Estado inicial: cavidad en un bloque de composite; color A3



Cavidad obturada con material de la competencia: composite de baja dispersión luminosa; color A2



Cavidad obturada con G-ænial: composite de alta dispersión luminosa; color A2

# Desde la belleza monocromática a múltiples combinaciones estéticas



Monocromático Dr G. Aboudharam (Francia



Policromático Pr. M. Peumans (Bélgica)

# G-ænial Posterior de GC

EL ARTE DE CREAR RESTAURACIONES POSTERIORES ESTÉTICAS Y DURADERAS.

Realmente me encanta este material porque es suave y de manipulación agradable. Su radiopacidad es mejor que la de otros composites posteriores.

La combinación de opacidad y condensabilidad permite crear resultados naturales.
La composición está bien equilibrada y no provoca sensibilidad ni siquiera en reconstrucciones grandes.

Me gusta utilizarlo por su buena adaptación cromática y sus excelentes propiedades tixotrópicas.
Encuentro que los unitps son muy sencillos de manejar.

Dr. A. Von Gienanth (Alemania)

Dr. M. Menke (Austria)

Dr. H. F. Ousni (Líbano)

## G-ænial Posterior: la belleza más firme

G-ænial Posterior se caracteriza por un relleno más condensable, lo que le proporciona una consistencia más firme y mayor control al modelar la forma anatómica de las restauraciones posteriores. El material condensable se mantiene húmedo y fluido durante la manipulación, para poder dar una forma firme incluso en las cavidades más profundas. G-ænial Posterior se presenta con tonos más cálidos, particularmente adaptados a las necesidades estéticas de las restauraciones posteriores.

- **Sistema de color adaptado:** 4 colores standar y 2 colores outside para imitar los cambios del esmalte relacionados con la edad.
- Radiopacidad adecuada del 252 %: Facilita el seguimiento
- Viscosidad condensable y no pegajosa: Mayor control para modelar y crear la forma anatómica
- Más contenido de relleno: Resistencia y duración excelentes






Dr. J. Tapia Guadix (España)



## El secreto de crear belleza duradera.

La mezcla exclusiva de G-ænial Posterior permite una resistencia máxima con un stress de contracción mínimo. Las restauraciones posteriores de composite suelen fracasar por una fractura o pérdida del sellado marginal. La elevada resistencia a la fractura y el stress de contracción de polimerización mínimo de G-ænial Posterior reducen el riesgo de fracaso a largo plazo.

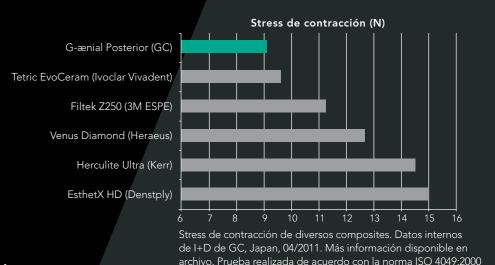

# Desde la resistencia monocromática hasta una multitud de combinaciones estéticas duraderas



Monocromático Dr. J. Tapia Guadix (España)



Policromático Dr. J. Smithson, (Reino Unido)

# G-ænial Universal Flo de GC

EL ARTE DE
CREAR
ESTÉTICA
INYECTABLE.

G-ænial Universal Flo es un material fluido que, en las restauraciones de Clase II, ha demostrado una capacidad de sellado comparable a los compsites con comportamiento de stress bajo y fuerza de adhesión de microtensión a la dentina

Un material realmente fluido para cualquier indicación: propiedades mecánicas excelentes, fácil de usar, color muy bonito y técnica de estratificación sencilla.

I y V, muy útil en ti<mark>em</mark>po y coste.

Prof. C. Goracci (Italia)

Dr. Z. Mach (República Checa)

Dr. N. Adjani-Fard (Alemania)

# G-ænial Universal Flo: fluidez controlada y resistencia máxima

Como profesional, es posible que le cueste encontrar un material que se adapte perfectamente en las cavidades profundas o estrechas y que, al mismo tiempo, sea resistente para las superficies oclusales. Gracias a la viscosidad inyectable, G- ænial Universal Flo es ideal para la mayoría de casos difíciles, en los que no quiere elegir entre colocación perfecta, estética o resistencia.


- Restauración universal con resistencia máxima: Composite inyectable para todas las cavidades
- Fluidez controlada: Adaptación perfecta combinada con estabilidad para crear fácilmente formas anatómicas
- Autopulido: Acabado rápido con retención de brillo ideal
- Estética excepcional: 15 colores con 3 niveles de opacidad en consonancia con los otros restauradores de composite de GC





# El secreto de las restauraciones inyectables.

G-ænial Universal Flo es un producto creado con nuevas técnicas de fabricación y un tratamiento de silano revolucionario que refuerza la adhesión entre las partículas de vidrio y la matriz de resina. Esta elevada concentración de relleno se logra para mejorar la fuerza, la resistencia a la abrasión y mejorar el pulido final y la estética. El resultado es un restaurador inyectable, tan fuerte como cualquier otro composite posterior, pero con una ventaja importante: es ideal para las indicaciones de viscosidad inyectable de clase I, II y restauraciones cervicales.

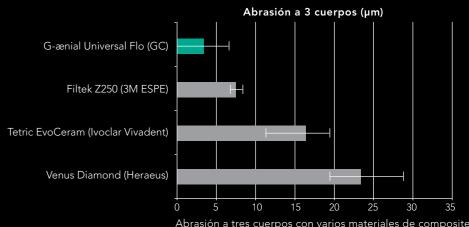

Abrasión a tres cuerpos con varios materiales de composite Datos internos de I+D de GC, Japan, 04/2011. Más información disponible en archivo.

# Desde las mas pequeñas Clase V hasta las más grandes Clase II



Clase V Dr. U. Krueger Janson (Alemania



Clase II Dr. J. Sabbagh (Bélgica)



# EL ARTE DE CREAR LAS BASES DE UNA ESTÉTICA PERFECTA.

# G-ænial Flo de GC

Me gusta su excelente radiopacidad combinada con la estética.

Lo prefiero especialmente para bases cavitarias de las restauraciones posteriores. Los colores inside forman una protección perfecta para cubrir las bases oscuras, por ejemplo, después de remover una amalgama.

G-ænial Flo permite modelar con precisión crestas marginales, especialmente en puntos de difícil acceso y con matrices de metal. Aunque la gama de colores es limitada, nunca me ha costado encontrar el color adecuado.

Dr. Z. Mach (República Checa)

Dr. J. Tapia Guadix (España)

Dr. M. Menke (Austria)

# G-ænial Flo: el socio fluido

G-ænial Flo es un composite para bases cavitarias radiopaco y fácil de usar, perfecto para cualquier tipo de restauraciones de G-ænial. Asimismo, G-ænial Flo es el material preferido para preparaciones de túneles, cavidades de mínima intervención y sellado de fisuras.

- Fluidez y humectabilidad: Adaptación y aplicación excelentes
- Radiopacidad: Seguimiento radiográfico sencillo
- El color adecuado para el lugar adecuado: 8 colores con 2 colores opacos para cubrir decoloraciones
- Diseño de jeringa inteligente: Aplicación suave y precisa con un diseño ergonómico





Dr. R. Venelinov (Bulgaria)



# El secreto para crear bases cavitarias perfectas

Una de las preocupaciones de los odontólogos al aplicar la primera capa de un composite es la humectabilidad del material y la adaptación a las paredes de la cavidad. La equilibrada composición de G-ænial Flo permite una colocación sencilla y fluida. El material goza de una humectabilidad excelente, lo que permite una adaptación perfecta a las paredes de la cavidad y evita que el aire quede atrapado debajo de las restauraciones con composite.



Restauración sin base cavitaria: riesgo de atrapar aire.



Restauración con base cavitaria: adaptación perfecta.

# Desde la creación de bases cavitarias perfectas hasta la restauración de preparaciones de túneles estrechos



Cavidad protegida Dr. R. Venelinov (Bulgaria)



Preparación de túnel Dr. J. Sabbagh (Bélgica)





Muy fácil de usar, mejor viscosidad (en mi opinión) que G-Bond, secado más fácil y más seguro para la aplicación en el esmalte. Producto bueno en general.
Perfecto para la técnica de grabado selectivo. La clave del éxito con los pacientes es que no aparece sensibilidad post-operatoria.

Me gusta que pueda usarse tanto con la técnica de grabado selectivo como con la de autograbado sin sensibilidad post-operatoria.

Dr. Z. Mach (República Checa)

Dr. J. Tapia Guadix (España)

Dr. H. Nasr (Líbano)



# G-ænial Bond: 1 material con 2 opciones para una adhesión perfecta

G-ænial Bond es un material de adhesión elevada y segura, tanto a esmalte como a dentina, independientemente de la técnica que elija. Con G-ænial Bond usted obtiene la simplicidad y la reducida sensibilidad post-operatoria de un adhesivo de autograbado junto con la fuerza de adhesión mayor en esmalte si decide utilizar el grabado selectivo de 10 segundos en esmalte.

- Puede utilizarse como adhesivo de autograbado o con grabado selectivo del esmalte: Usted elige en función del caso
- Excelente fuerza de adhesión duradera tanto al esmalte como a la dentina: Combinación de adhesión química y mecánica así como formulación sin HEMA
- Integridad marginal y fiabilidad clínica excelentes: Demostrado en pruebas independientes
- Sin sensibilidad post-operatoria: Independiente de la técnica o el composite utilizado






Dr. J. Tapia Guadix (España)

La superficie lechosa después de la aplicación de G-ænial Bond permite colocar el composite con mayor facilidad

# El secreto de seleccionar la técnica de adhesión óptima

Si la dentina está grabada, abrir los túbulos dentinarios puede ocasionar sensibilidad post-operatoria y las fibras de colágeno no protegidas se degradarán con el tiempo. G-ænial Bond no requiere grabado y su autograbado ofrece una elevada adhesión a la dentina, los márgenes de la dentina de las restauraciones durarán más que si utilizara un sistema de adhesión mediante grabado total.

En esmalte, puede elegir entre autograbado para una fuerza de adhesión óptima en restauraciones posteriores o cervicales. Si aplica tan solo 10 segundos de grabado, aumenta aún más la adhesión en el caso de superficies de esmalte más amplias, como en el caso de restauraciones anteriores.

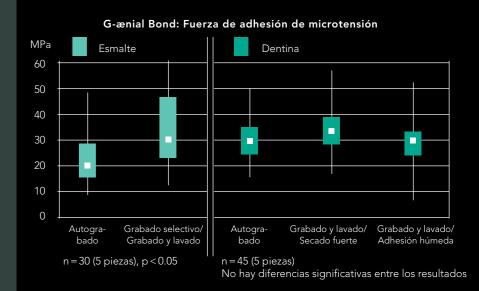


Fuerza de adhesión de microtensión al esmalte y dentina con o sin grabado Extracto adaptado del prof. van Meerbeek, Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),

### De la adhesión rápida de autograbado a una mayor adhesión con grabado selectivo



Vista preoperatoria

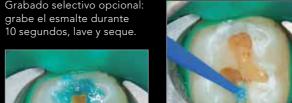






Seque durante 5 segundos



Fotopolimerice durante 10 Siga reconstruyendo la

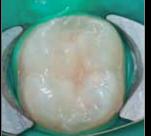

restauración de composite

## El secreto del arte de la selección cromática

G-ænial ofrece flexibilidad, permitiendo la elaboración de restauraciones de un único color estéticamente invisibles u obras maestras estéticas en una reconstrucción multicromática. Para conseguirlo, se han definido para G-ænial 3 grupos de colores claramente diferenciados:

- Colores standar: para restauraciones con un único color
- Colores outside: para sustituir el esmalte, colocados encima de los colores estándar en casos estéticamente exigentes
- Colores inside: aportan opacidad, colocados debajo de los colores estándar en casos estéticamente exigentes

# Un concepto de colores con visión de futuro con colores estándar y especiales.

#### Colores standar

















































#### Colores outside











#### Colores inside









Restauración con un único color utilizando color standar



Restauración con dos colores utilizando colores standar y outside



Restauración con múltiples colores utilizando colores standar, inside y outside



Si desea más información sobre las posibilidades de estratificación de G-ænial, descargue gratis la Guía de odontología restauradora en www.gceurope.com



# Descubra y disfrute con todos los productos de la gama G-ænial



#### **G-ænial Anterior**

Belleza suave
Disponible en jeringas de 2.7 ml.
(4.7 g) o unitips de 0,16 ml
Standar: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5
A4, B1, B2, B3, C3, CV y CVD
Inside: AO2, AO3 y AO4
Outside: JE, AE, SE, IE, TE y CVE

#### **G-ænial Posterior**

Estética firme Disponible en jeringas de 2.7 ml (5.5 g) o unitips de 0,16 ml Standar: P-A1, P-A2, P-A3 y P-A3.5 Outside: P-JE y P-IE

#### G-ænial Universal Flo

Inyectable universal
Disponible en jeringas de 2 ml (3.4 g)
Standar: A1, A2, A3, A3.5, A4, BW,
B1, B2, B3, C3 y CV
Inside: A02 y A03
Outside: AE y JE

#### G-ænial Flo

El socio fluido Disponible en jeringas de 2 ml (3.8 g) Standar: A1, A2, A3, A3.5, A4 y CV Inside: A02 y A03

#### G-ænial Bond

El elemento de conexión Disponible en bote de 5 ml

# La ciencia tras la creación de sonrisas bonitas con G-aenial de GC

	G-ænial Anterior	G-ænial Posterior	G-ænial Universal Flo	G-ænial Flo
Palabras clave	Estética agradable y fácil Manipulación perfecta	Manipulación perfecta Márgenes duraderos Radiopacidad	Universal Fluidez baja, resistencia elevada Gran brillo	Fluidez alta Adaptación perfecta Radiopacidad
Composición	Microhíbrido HDR		Híbrido Ultra Fino Fluido	
Indicación principal	Anterior	Posterior	Universal	Base
Estética				
Colores	22 colores: 13 standar, 3 inside, 6 outside	6 colores: 4 standar, 2 outside	15 colores: 11 standar, 2 inside, 2 outside	8 colores: 5 colores A, 2 inside, 1 cervical
Manipulación				
Viscosidad	Alta / modelable	Firme / modelable	Media / sin descolgamiento	Baja / fluida
Tiempo de trabajo (segundos)	240 s	120 s	70 s	70 s
Propiedades físicas				
Radiopacidad (% de Al)	142 %	252 %	181 %	230 %
Contracción (%)	2,42 %	2,28 %	3,95 %	4,38 %
Módulo de elasticidad (GPa)	6,4 GPa	8,2 GPa	7,9 GPa	7,4 GPa
Resistencia a la flexión (MPa)	107 MPa	118 MPa	167 MPa	135 MPa
Resistencia a las fracturas (MPa)	1,6 MPa	1,5 MPa	1,6 MPa	1,4 MPa
Resistencia a la abrasión (a tres cuerpos)	37 µm	44 µm	3 μm	16 µm
Profundidad de polimerización (mm)	1,5-3,5 mm	2-3 mm	1,5-2 mm	1,5-2 mm
Contenido de relleno (% peso)	76 %	81 %	69 %	69 %
Presentaciones				
Jeringa vol/peso	2,7 ml / 4,7 g	2,7 ml / 5,5 g	2 ml / 3,4 g	2 ml / 3,8 g
Unitip vol/peso	0,16 ml / 0,28 g	0,16 ml / 0,33 g	N/D	N/D
Caducidad	3 años	3 años	3 años	3 años

# Productos relacionados








#### Dia Polisher Paste

Pasta de pulir diamantada para mejorar los resultados estéticos de todas las restauraciones.

#### **Epitex y New Metal Strips**

Tiras metálicas y plásticas para el contorneado, acabado y pulido proximal de todo tipo de restauraciones.

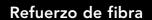

#### everStick PERIO

Refuerzo de fibra de vidrio para una ferulización agradable para el paciente.

#### everStick C&B

Refuerzo de fibra de vidrio para puentes de composite reforzados con fibra con mínima



**Primers** 

#### Composite Primer, Ceramic Primer

METALPRIMER I HINGS FOR BOOKING ASSISTORISES. LIQUID 5mL

y Metal Primer II Adhesivos para la unión de composite a composite, cerámicas y

#### **Gum Composite**

#### GC Gradia Gum Shades

Composite de encías fotopolimerizable diseñado para crear colores iguales a los de





#### GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. + 32.16.74.10.00
Fax. + 32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

#### GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Americas, 2, 1°, Of. 4
ES - 28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com

