

Protocol Cavex Alginate Mixer II



Modo de empleo:

1. Dosificar la cantidad de polvo de alginato y agua, y agregarlos en el vaso de mezclar.

dosificación recomendada para la mandíbula superior



dosificación recomendada para la mandíbula inferior



2. ¡Agítelo siempre previamente! Esto facilita la limpieza y prolonga la vida útil del aparato.

3. Ponga la tapa y coloque el vaso en el Cavex Alginate Mixer.

4. Cierre el Cavex Alginate Mixer y pulse 'start'.

5. Extraiga el tazón y aplique el alginato en la cubeta.

Mantenimiento/limpieza del Cavex Alginate Mixer:

1. Disuelva un poco de Cavex GreenClean para la eliminación del alginato en un recipiente con agua.
2. El aparato es fácil de limpiar con una toallita humedecida (¡no mojada!) con solución de Cavex GreenClean y la espátula de mezclar.
3. Mantenga el Cavex Alginate Mixer siempre limpio, para evitar que se formen depósitos en el aparato.

