

Información sobre el producto

MD 550 limpiador para escupideras



MD 550 - breve descripción

- Solución libre de aldehídos para la limpieza y el mantenimiento simultáneos de escupideras en equipos dentales, con efecto antimicrobiano.
- Extraordinario e intenso poder limpiador. Elimina fácilmente los residuos de cal, sangre, pastillas reveladoras de placa, material de impresión, etc.
- Eficaz frente a bacterias, bacterias de Tb y levaduras.
- Comprobado según las normas europeas.
- Excelente compatibilidad con los materiales. No contiene componentes abrasivos; no raya las escupideras, sin residuos abrasivos.
- No produce espuma: adecuado para todas las instalaciones con separador de amalgama.

Propiedades

MD 550 del sistema Dürr Higiene es un preparado especial listo para el uso, libre de aldehídos y con efecto antimicrobiano, para la limpieza y el mantenimiento simultáneos de escupideras en equipos dentales. A diferencia de los limpiadores convencionales, MD 550 es especialmente adecuado para todas las instalaciones con separador de amalgama. MD 550 elimina los residuos de cal, sangre, pastillas reveladoras de placa, material de impresión, etc. MD 550 se caracteriza por un extraordinario poder limpiador y una excelente compatibilidad con los materiales. MD 550 limpia en profundidad, tiene un olor agradable y no produce espuma. Este preparado no contiene componentes abrasivos, de manera que no se rayan las escupideras ni se forman residuos.

Composición del producto

MD 550 contiene alcoholes como principio activo. 100 g de MD 550 contienen 40 g de etanol, tensioactivos, ácidos orgánicos, adyuvantes y salicilato de bencilo en solución acuosa.

Eficacia microbiológica

MD 550 es eficaz contra bacterias¹⁾, bacterias de Tb¹⁾ y levaduras¹⁾. Comprobado según EN 13727, EN 13624 y EN 14348.

1) Ensayo con carga reducida (EN 13727, EN 13624 y EN 14348).

Aplicación

MD 550 se utiliza sin diluir. Pulverice la escupidera con un poco de MD 550 y distribúyalo con un cepillo ejerciendo una presión uniforme. Deje actuar MD 550 por un corto espacio de tiempo y después enjuague con agua. El tiempo de actuación es de 2 minutos. Utilice MD 550 si fuera necesario, por la noche, pero siempre antes de la desinfección de la instalación de aspiración.

Impacto ambiental

MD 550 es inocuo para el medio ambiente, ya que todos sus principios activos y otras sustancias orgánicas, diluidos de la forma adecuada en aguas residuales, son biodegradables. El embalaje, de polietileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella.

Información sobre el producto

MD 550 limpiador para escupideras

Datos físicos

Aspecto: líquido transparente incoloro, ligeramente viscoso

Densidad: $D = 0,94 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $2,5 \pm 0,5$

Viscosidad: aprox. 80 s (DIN 53211)

Punto de inflamación: 23 °C (DIN 51755)

Vida útil

3 años

Presentación

Botella de 750 ml

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambiente.

Notas generales

No utilice ningún producto de limpieza o desinfección abrasivo o que produzca espuma en las escupideras. Tenga cuidado al manipular materiales sensibles al alcohol (por ejemplo, vidrio acrílico). Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.

Advertencias de seguridad

MD 550 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

CE 0124

Distribuido por

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de