

## 1. DESCANSO DE BOCA

### DEFINICIÓN

- Abridor de boca de silicona ajustable

### INDICACIÓN

- Para abrir la boca y relajar la mordida durante el tratamiento odontológico

### COMPOSICIÓN

Silicona. No contiene látex.

### VENTAJAS Y DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

- Silicona: permite esterilización en autoclave
- Tamaños Universal y Pequeño: para diferentes edades y aberturas de boca
- Ajustable: permite 3 posiciones con el Universal y 2 con el Pequeño
- Con apoyo para colocar el hilo dental: Más seguridad evitando el riesgo de deglución

### PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

REF.	PRESENTACIÓN
404	2 unidades ( 1 U y 1 P)

### DATOS GENERALES

- Registro ANVISA: 10349450080
- Plazo de Validez: 5 años
- Lanzamiento: Enero de 2015

### TÉCNICA DE USO

1. Comprobar el tamaño más adecuado de uso para mantener la abertura de boca deseada
2. Introducir en la boca del niño y ajustar la abertura deseada.
3. Pedir al niño para que descansa la mordida sobre el descanso
4. Usar el hilo dental en el espacio apropiado para más seguridad en el tratamiento
5. Después del uso, lavar y desinfectar en autoclave