

**BIEWER**  
*medical*



**Sedación consciente  
con óxido nitroso**

**Nitrous Oxide Sedation**



# Ventajas de la sedación con óxido nitroso

## Seguridad

- ✓ El paciente permanece consciente
- ✓ El paciente se recupera rápidamente
- ✓ En caso de interrupción del suministro de oxígeno, se desconecta por seguridad
- ✓ El bloqueo del óxido nitroso evita la sobredosis

## Comodidad

- ✓ El paciente tolera adecuadamente el óxido nitroso (N<sub>2</sub>O)
- ✓ Apto para pacientes de todas las edades (a partir de los 4 años)
- ✓ El paciente se encuentra relajado y tranquilo
- ✓ Supone un menor estrés para el dentista y su personal
- ✓ El tratamiento resulta menos doloroso e incluso agradable
- ✓ Los equipos son más avanzados y presentan un manejo intuitivo

## Eficiencia

- ✓ Al estar relajados, los pacientes permiten que el proceso sea más eficiente
- ✓ Las constantes vitales se controlan de manera sencilla
- ✓ El manejo y control del equipo resulta más claro y fácil

## Precisión

- ✓ El manejo es más intuitivo gracias a sus componentes de alta calidad
- ✓ El control y el manejo resultan más asequibles
- ✓ Funciona con precisión y con dosis individuales

## Rentabilidad

- ✓ Se trata de un producto de primer calidad y el equipo cuenta con una gran durabilidad
- ✓ El tratamiento resulta más eficiente, ya que no se interrumpe
- ✓ Mayor rentabilidad



# Los 5 pasos del tratamiento con óxido nitroso

Tiempo necesario: aproximadamente 10 minutos



## 1. Escoger la máscara nasal

Las máscaras nasales para la inhalación de óxido nitroso se encuentran disponibles con varios aromas.



## 2. Inicio

Comenzar con un 100 % de oxígeno y, posteriormente, añadir el óxido nitroso hasta que se consiga el impacto deseado.




## 3. Anestesia local

Desde el principio, el óxido nitroso reduce el dolor y tiene lugar la anestesia local.



## 4. Tratamiento

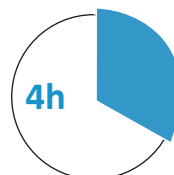

Realizar con el óxido nitroso hasta un máximo de 4 horas.

5 minutos



## 5. Ampliación

Una vez finalizado el tratamiento, el paciente recibe menos minutos de oxígeno al 100 %, lo que le permite recuperarse de manera más rápida en la sala de espera.

## Los 45 años de innovación están presentes

- ✓ Tecnología digital y analógica
- ✓ Intuitivo, práctico y seguro
- ✓ Bloqueo del N<sub>2</sub>O al 50 %/70 %
- ✓ Embalaje de seguridad premium
- ✓ Para soluciones móviles, soportes de pared e instalaciones fijas
- ✓ Diseño, calidad y sostenibilidad



# sedaflow®

## Equipo móvil ultraligero para su consulta

- ✓ Equipo ultraligero
- ✓ Incluye bombonas de 2 x 10 litros
- ✓ Estructura robusta de acero
- ✓ Asas y bandejas a ambos lados
- ✓ Color predeterminado: blanco RAL 9016
- ✓ A la venta en distintos colores RAL y diseños de consulta individuales
- ✓ Puertas dobles
- ✓ Cuerpo: 1100 mm x 400 mm x 300 mm
- ✓ Fabricado en Alemania



# sedaview®

## Su paciente elige. Usted triunfa.

- ✓ Máscara perfumada con exterior transparente
- ✓ Mayor libertad de acción en la boca
- ✓ Sitio optimizado para proporcionar la máxima hermeticidad
- ✓ Sistema de un solo uso efectivo e higiénico
- ✓ Dos tamaños universales con seis aromas y olores neutros



### PIP+™



### AXESS™-Low Profile



# sedavital® sedalife®

## Monitorización modular según sus necesidades

- ✓ Combinación individual para la monitorización
- ✓ Parámetros posibles: pulso, SPO2, CO2, NIBP y temperatura
- ✓ Pantalla táctil para un manejo intuitivo
- ✓ Transmisión de datos, perfiles de los pacientes, función de alarma
- ✓ La configuración se adapta a cada sedación



# **BIEWER**<sup>®</sup> *medical*



## BIEWER medical Medizinprodukte

Hans-Böckler-Straße 3  
D-56070 Koblenz

Telefon: +49 (0) 261 988290-60

Telefax: +49 (0) 261 988290-66

e-Mail: [info@biewer-medical.com](mailto:info@biewer-medical.com)



[facebook.com/biewermedical](https://facebook.com/biewermedical)



[youtube.com/bmsedierung](https://youtube.com/bmsedierung)

[www.biewer-medical.com](http://www.biewer-medical.com)

[www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)