

Manual de instrucciones

Máquina de vacío







Instrucciones rápidas


1.- Enchufar la maquina a: 220/50Hz ó 110/60Hz

Comprobar el estado del motor de vacío y el sistema de calefacción eléctrica.

2.- Girar la tapa superior 90° (de izquierda a derecha), poner una película entre el marco superior e inferior y apretar el mando para cerrar los marcos de manera tensa.

Girar la tapa superior hacia atrás y tirar hacia debajo (hay un soporte de posición en los ejes principales). Entonces poner el producto en el medio de la placa y pulsar el sistema de calefacción para calentar la película. Parar el sistema de calefacción (unos 2-3 minutos después). Cuando la superficie inferior de la película este bajo el marco inferior aproximadamente 1cm pulsar llave de elevación para hacer bajar el marco y poner en marcha el motor de vacío. Retirar el producto después del proceso.

3.- Uso de bola de acero y metodo de aplicación: Tomar la caja de aluminio con el modelo recostado, dar forma con la bola de acero en la parte a cubrir

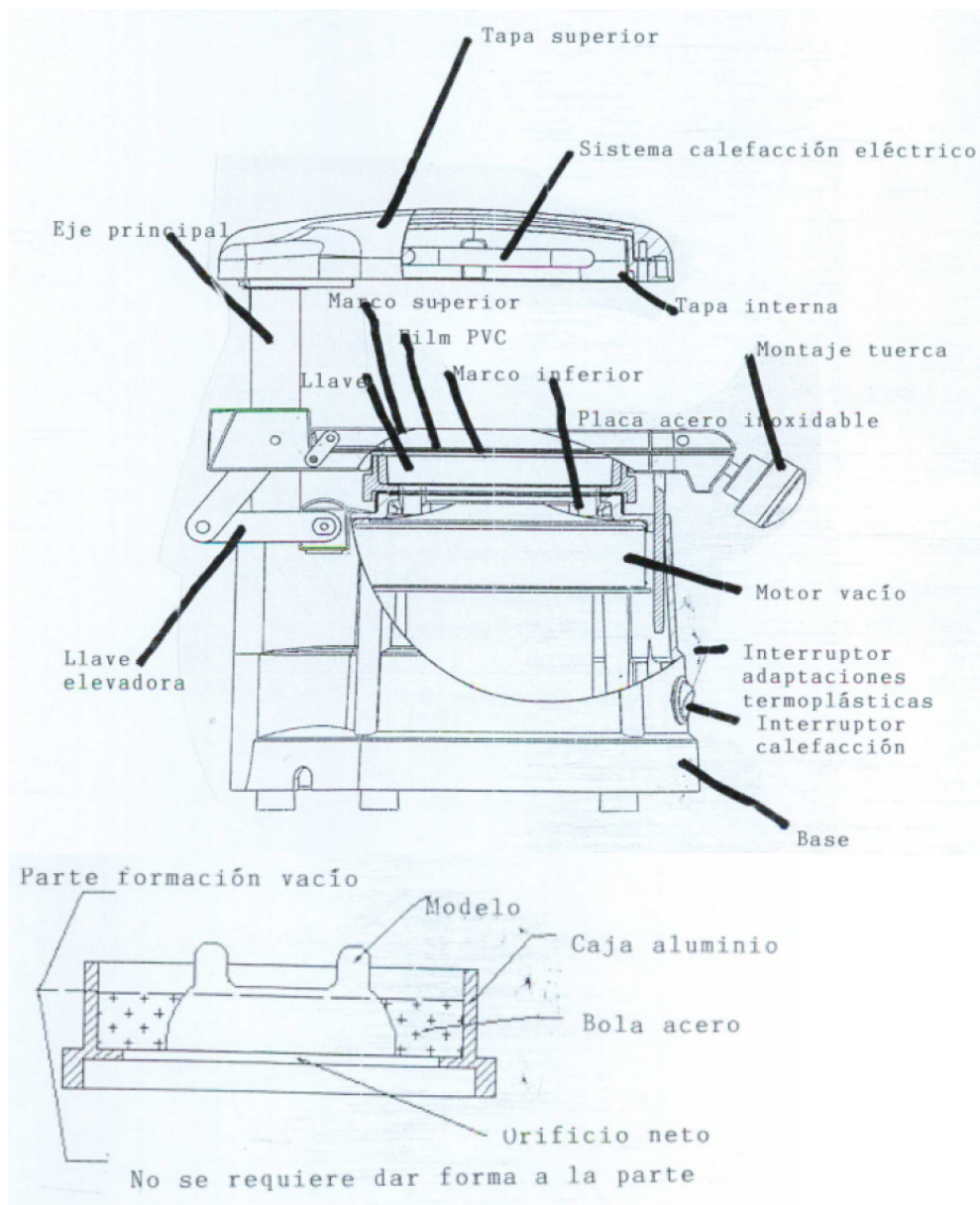



Benmayor S.A.
A-60512100
Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
benmayor@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165

www.benmayor.com