



**Más Blanco.
Sonríe.
Eres tú.**

colección

pola

SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL




Your Smile. Our Vision.


www.sdi.com.au

www.polawhite.com.au



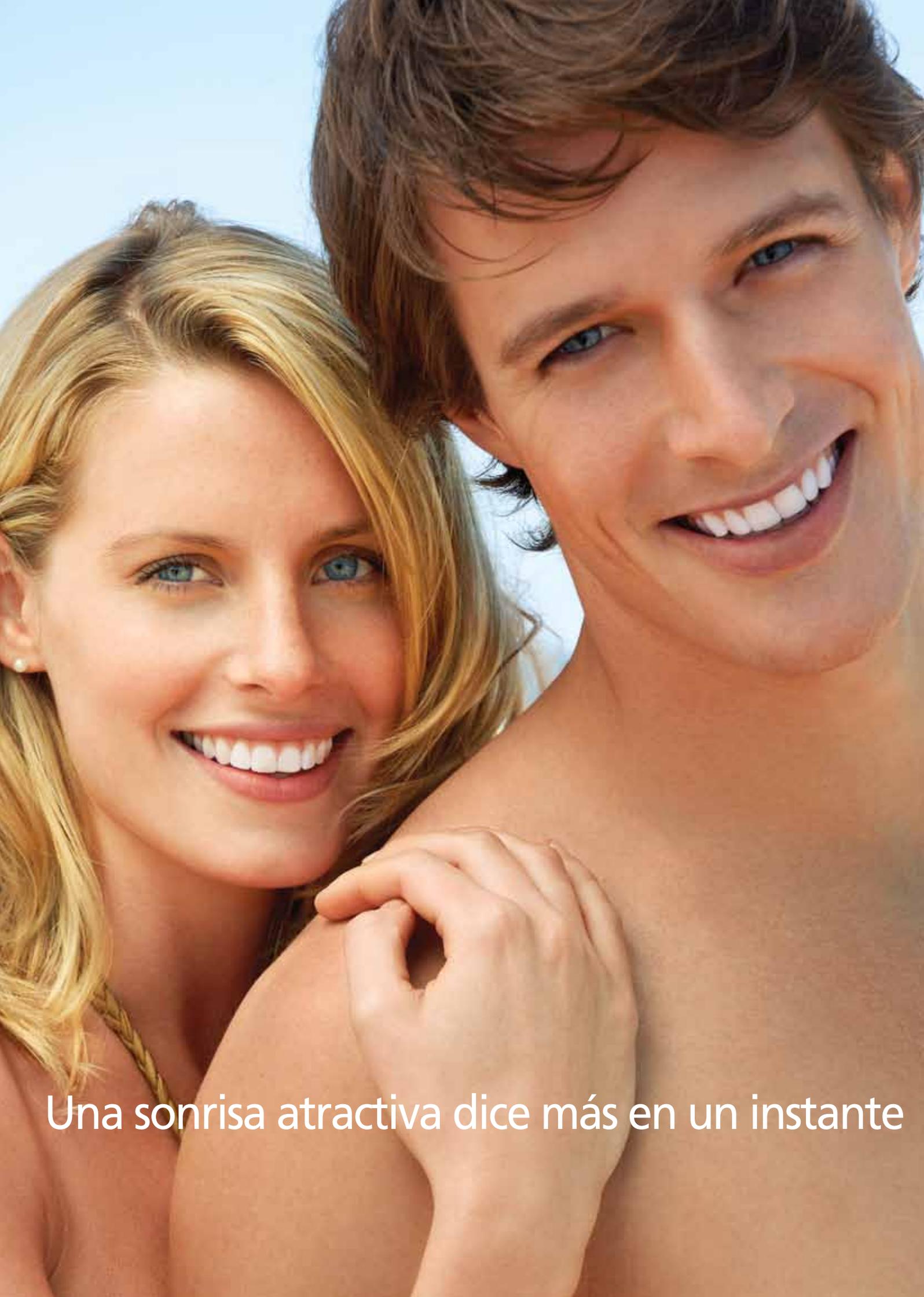

Una sonrisa atractiva dice más en un instante

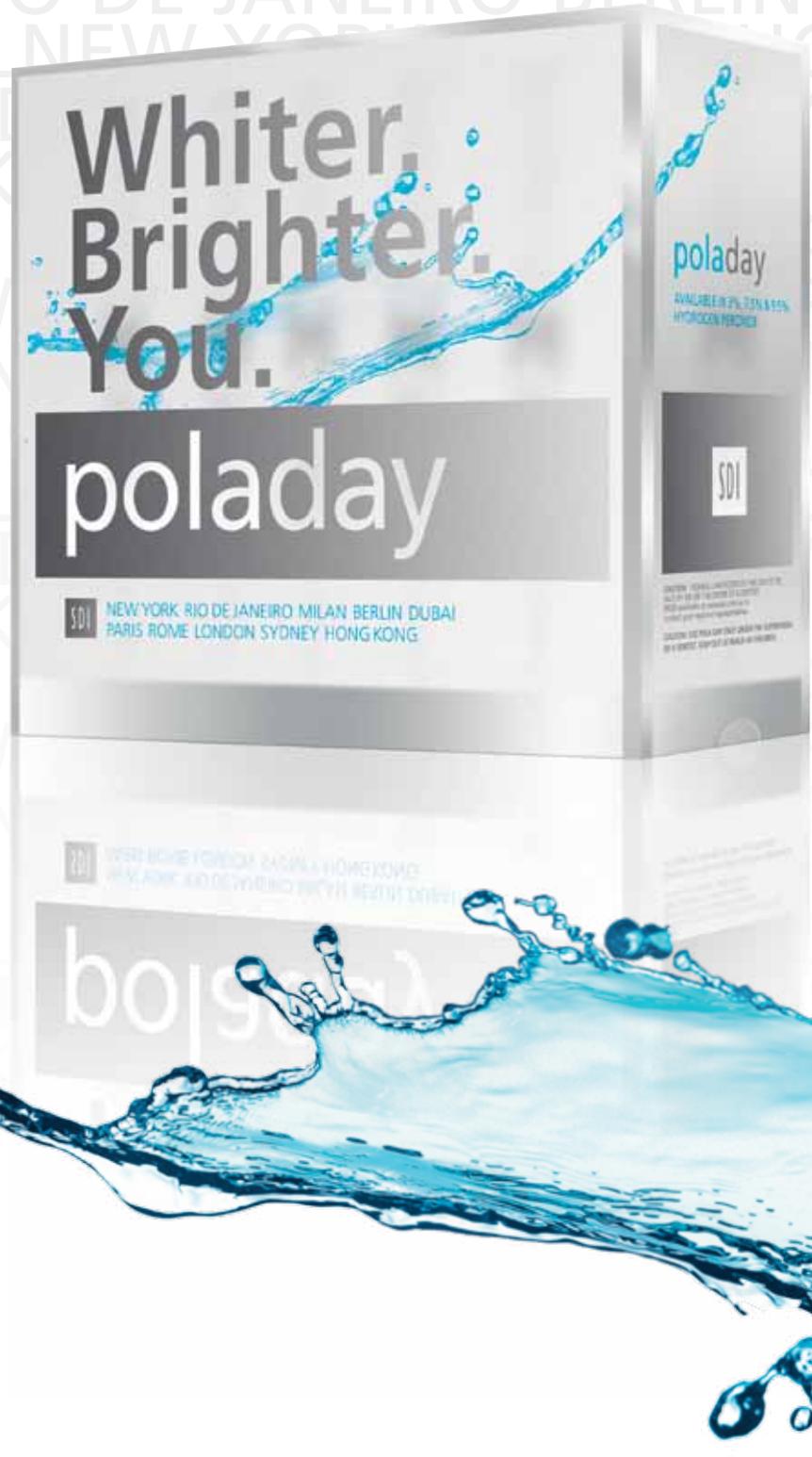

de lo que las palabras puedan expresar

POLAOFFICE+

PRODUCTO SANITARIO
AUTORIZADO



El más rápido del mundo

Tiempo de sillón reducido. La totalidad del tratamiento dura menos de 30 minutos. Menos tiempo en el sillón significa más comodidad y satisfacción para el paciente, mejor productividad y rentabilidad para su clínica. Su fórmula única al 37,5% de peróxido de hidrogeno es la garantía de una liberación rápida de los iones de peróxidos para acelerar el proceso de aclaración.

Producto sanitario autorizado

Con Pola Office Plus, confié plenamente en un producto de tratamiento para la optimización del color, legal para uso en la clínica.

Instrucciones de uso:

- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales y no vitales
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por
 - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina
 - Fluorosis
 - manchas relacionados con la alimentación
 - los efectos de la edad

Kits:

Kit Pola Office+ de 3 Pacientes - con retractores

3 X 2,8mL Jeringas Pola Office+
3 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
3 X Retractores de boca
Accesorios
Código de Pedido 7700465

Kit Pola Office+ de 3 Pacientes - sin retractores

3 X 2,8mL Jeringas Pola Office+
3 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700464

CE
0297



“89% de los evaluadores recomendarían Pola Office+ a otro dentista[†]”

el más rápido del mundo

No necesita lámpara de blanqueamiento

Pola Office + puede ser utilizado con o sin lámpara de foto activación. Sin embargo, una luz estándar o lámpara de arcada completa, acelera el proceso e impresiona sus pacientes.

Máxima comodidad

Pola Office+ con pH neutro garantiza una máxima comodidad durante y después del tratamiento. El tiempo mínimo del tratamiento producirá menos malestar y menor sensibilidad al paciente.

Desensibilizante integrado

No requiere la aplicación de un desensibilizante por separado. Pola Office+ contiene propiedades desensibilizantes únicas integradas que inhiben la sensibilidad post-operatoria.

El nitrato de potasio, ingrediente clave que reduce el dolor, penetra en los extremos del nervio bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos sensibles, lo cual permite proporcionar un efecto calmante.

Simple aplicación

No necesita mezclarse. El sistema de jeringa con doble cilindro, mezcla el contenido a medida que se aplica el gel directamente en el diente. Esto garantiza una mezcla consistente del gel frescamente activado. La punta fina del aplicador permite una fácil aplicación, especialmente en las partes estrechas.

Solo una capa fina

Todo lo que se requiere es una fina capa de gel. Utilice la punta de aplicación para distribuir el gel, asegurándose que todas las superficies del diente queden cubiertas. La fórmula pegajosa del gel se adhiere firmemente a las superficies del diente aumentando el efecto de blanqueamiento.

“83% de los evaluadores comprarían Pola Office+[†]”

Kit Pola Office+ de 1 Paciente - con retractor

1 X 2,8mL Jeringa Pola Office+
1 X 1g Jeringa de Barrera Gingival
1 X Retractor de boca
Accesorios
Código de Pedido 7700462

Kit Pola Office+ de 1 Paciente - sin retractor

1 X 2,8mL Jeringa Pola Office+
1 X 1g Jeringa de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700461



Pola Office contiene una fórmula de peróxido de hidrógeno al 35% para ofrecerle a usted y sus pacientes resultados rápidos y eficaces, evitando la excesiva pérdida de tiempo en la unidad dental.

Producto sanitario autorizado

Con Pola Office, confié plenamente en un producto de tratamiento para la optimización del color, legal para uso en la clínica.

Instrucciones de uso:

- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales y no vitales
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por
 - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina
 - Fluorosis
 - manchas relacionados con la alimentación
 - los efectos de la edad

Muy rápido procedimiento

El tiempo total del tratamiento con Pola Office toma alrededor de 30 minutos. Un menor tiempo en la unidad dental implica mayor comodidad y satisfacción para el paciente así como una mejor índice de productividad y rentabilidad.

Desensibilizante integrado

Pola Office contiene nitrato de potasio, un conocido agente desensibilizante que actúa en los extremos del nervio bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos sensibles, lo cual permite proporcionar un efecto calmante.

No necesita lámpara de blanqueamiento

El uso de la luz no mejora el resultado, sin embargo una fuente de calor acelera el aclaramiento dental para conseguir un resultado en 30 minutos.

Barrera gingival flexible

La barrera gingival flexible permite una rápida y limpia remoción.

Kit Pola Office de 3 Pacientes

6 X 0,3g Botes de Pola Office en Polvo
6 X 2mL Jeringas de Pola Office
3 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700218

Kit Pola Office de 1 Paciente

2 X 0,3g Botes de Pola Office en Polvo
2 X 2mL Jeringas de Pola Office
1 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7700256

2 Repuestos de Jeringa de Barrera Gingival

2 X 1g Jeringas de Barrera Gingival
Accesorios
Código de Pedido 7750006



Sistema de aclaramiento dental en clínica rápido y sencillo

Antes del tratamiento



Después del tratamiento



NOTA:

Los resultados pueden variar
para cada paciente.

Fotos por cortesía del Dr. Linda Greenwall,
BDS(Rand), MGDS RCS (Eng), MSc
(London), MRD RCS (Eng), FFGDP



POLADAY & POLANIGHT

GAMA COSMÉTICA
hasta 6% de peróxido
de hidrogeno

Este producto de blanqueamiento dental cumple con la nueva normativa Europea 76/768/EEC.



Productos cosméticos registrados

Pola Day 3% y 6%, y Pola Night 10% y 16%, cumplen con la nueva directiva Europea 76/768/EEC sobre productos cosméticos.

Calmante y acondicionador natural

La incorporación de aditivos especiales minimiza la formación de placa y permite la remineralización para reducir la sensibilidad.

Alto contenido de agua

El alto contenido de agua del gel reduce la deshidratación del esmalte y disminuye la sensibilidad del paciente.

Espesante de alto peso molecular

Este reduce la sensación pegajosa y los efectos de sequedad del gel, reduciendo así la sensibilidad.

Alta viscosidad

La alta viscosidad del gel garantiza que pueda colocarse de forma segura y fácil dentro de la cucharilla, y que permanezca en ella durante todo el procedimiento.

Sabor

El agradable sabor a menta del gel es fresco y de larga duración.

Liberación de Flúor

La adición de flúor remineraliza la superficie dental ayudando a reducir la sensibilidad postoperatoria.

Pola Day y Pola Night Kits de 10 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700353 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700359 (Peróxido de Hidrógeno al 6%)
7700371 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700377 (Peróxido de Carbamida al 16%)

Pola Day y Pola Night Mini Kits de 4 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700351 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700357 (Peróxido de Hidrógeno al 6%)
7700369 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700375 (Peróxido de Carbamida al 16%)

Pola Day y Pola Night Bulk Kit de 50 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700355 (Peróxido de Hidrógeno al 3%)
7700361 (Peróxido de Hidrógeno al 6%)
7700373 (Peróxido de Carbamida al 10%)
7700379 (Peróxido de Carbamida al 16%)

desde solo 15 minutos
una vez al día



Contiene un agente desensibilizante

Pola Day y Pola Night contienen un agente desensibilizante que actúa en los extremos del nervio y los desensibiliza al nivel del margen pulpo-dentinal, reduciendo así la sensibilidad y aumentando la comodidad del paciente.

pH Neutro

El pH neutro de Pola Day y Pola Night garantiza una total liberación del peróxido sin arriesgar la comodidad del paciente.

Guía de Tratamiento

poladay 3%	peróxido de hidrógeno 2 ó 3 X 30 min/día ○ 1 X 60 min/día
poladay 6%	peróxido de hidrógeno 1 ó 2 X 30 min/día ○ 1 X 45 min/día
polanight 10%	peróxido de carbamida de 2 horas a toda la noche
polanight 16%	peróxido de carbamida de 90 min. a toda la noche

Pola Night Paquete económico de 36 Jeringas de 3g

Código de Pedido
7700089 (Peróxido de Carbamida al 16%)

Material para Cucharillas – 20 Piezas

20 Piezas de Repuesto
Código de Pedido 7750005

Estuches para Cucharillas – Paquete de 5

5 Estuches para Cucharillas
Código de Pedido 7750008

Bolsillos Cosméticos Pola – Paquete de 10

10 Bolsillos
Código de Pedido 7700999

Pola Day y Pola Night caja dispensadora 50x 3gr

Código de Pedido
7700079 (Peróxido de Hidrógeno al 6%)
7700085 (Peróxido de Carbamida al 16%)

2 Jeringas de Resina Espaciadora Repuesto

2 X 1g Jeringas de Resina Espaciadora
Accesorios
Código de Pedido 7700012

POLADAY & POLANIGHT

GAMA PRODUCTOS SANITARIOS

Con más de 6% de peróxidos de hidrógenos

Desde 15 minutos al día, la gama Pola productos sanitarios de aclaramiento dental, es el sistema con férulas más rápido.



Producto sanitario autorizado

Con Pola Day 7.5% y 9.5%, Pola Night 22% y Pola Day CP, confíe plenamente en un producto de tratamiento para la optimización del color, legal para uso en la clínica.

Instrucciones de uso:

- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales y no vitales
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por
 - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina
 - Fluorosis
 - manchas relacionados con la alimentación
 - los efectos de la edad

Calmante y acondicionador natural

La incorporación de aditivos especiales minimiza la formación de placa y permite la remineralización para reducir la sensibilidad.

Alto contenido de agua

El alto contenido de agua del gel reduce la deshidratación del esmalte y disminuye la sensibilidad del paciente.

Espesante de alto peso molecular

Este reduce la sensación pegajosa y los efectos de sequedad del gel, reduciendo así la sensibilidad.

Alta viscosidad

La alta viscosidad del gel garantiza que pueda colocarse de forma segura y fácil dentro de la cucharilla, y que permanezca en ella durante todo el procedimiento.

Pola Day y Pola Night Kits de 10 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700363 (Peróxido de Hidrógeno al 7.5%)
7700366 (Peróxido de Hidrógeno al 9.5%)
7700387 (Peróxido de Carbamida al 22%)

Pola Day y Pola Night Mini Kits de 4 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700362 (Peróxido de Hidrógeno al 7.5%)
7700365 (Peróxido de Hidrógeno al 9.5%)
7700386 (Peróxido de Carbamida al 22%)

Pola Day y Pola Night Bulk Kit de 50 Jeringas de 1,3g

Código de Pedido
7700364 (Peróxido de Hidrógeno al 7.5%)
7700367 (Peróxido de Hidrógeno al 9.5%)
7700388 (Peróxido de Carbamida al 22%)

desde solo 15 minutos una vez al día



Sabor

El agradable sabor a menta del gel es fresco y de larga duración.

Liberación de Flúor

La adición de flúor remineraliza la superficie dental ayudando a reducir la sensibilidad postoperatoria.

Contiene un agente desensibilizante

Pola Day y Pola Night contienen un agente desensibilizante que actúa en los extremos del nervio y los desensibiliza al nivel del margen pulpo-dental, reduciendo así la sensibilidad y aumentando la comodidad del paciente.

pH Neutro

El pH neutro de Pola Day y Pola Night garantiza una total liberación del peróxido sin arriesgar la comodidad del paciente.

Guía de Tratamiento

poladay 7.5%	peróxido de hidrógeno 1 ó 2 X 30 min/día ○ 1 X 45 min/día
poladay 9..5%	peróxido de hidrógeno 2 X 15 min/día ○ 1 X 30 min/día
polanight 22%	peróxido de carbamida 1 X 45 min/día
poladay CP 35%	peróxido de carbamida 1 X 15 min/día

Pola Day CP

Kits de 4 Jeringas de 1,3g
Peróxido de Carbamida al 35%
Código de Pedido 7700329

Pola Day y Pola Night

caja dispensadora 50x 3gr
Peróxido de Carbamida al 35%
Código de Pedido 7700082

Material para Cucharillas – 20 Piezas

20 Piezas de Repuesto
Código de Pedido 7750005

Estuches para Cucharillas – Paquete de 5

5 Estuches para Cucharillas
Código de Pedido 7750008

2 Jeringas de Resina Espaciadora Repuesto

2 X 1g Jeringas de Resina Espaciadora
Accesorios
Código de Pedido 7700012

Bolsillos Cosméticos Pola – Paquete de 10

10 Bolsillos
Código de Pedido 7700999



POLADAY CP

PRODUCTO SANITARIO
AUTORIZADO

desde solo 15 minutos una vez al día

Producto sanitario autorizado

Con Pola Day CP, confié plenamente en un producto de tratamiento para la optimización del color, legal para uso en la clínica.

Instrucciones de uso:

- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales y no vitales
- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por
 - la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina
 - Fluorosis
 - manchas relacionados con la alimentación
 - los efectos de la edad

Sistema con férula de aplicación rápida

Desde tan solo 15 minutos, una o 2 veces al día, su paciente verá los resultados inmediatamente. Aplique Pola Day CP en la férula de su paciente, del mismo modo domiciliario. La aplicación puede ser de 15 minutos en la sala de espera antes de dejar la clínica. Los resultados pueden ser de 3 a 4 tonalidades según los pacientes. Estas cortas sesiones son una buena manera de convencer los pacientes de la eficiencia del aclaramiento dental, antes de seguir con un tratamiento domiciliario.

Esta aplicación, dará a su paciente la satisfacción de salir de su consulta, con una idea clara de las posibilidades que ofrece el aclaramiento dental. Los tratamientos domiciliarios Pola Day y Pola Night, se llevan a casa, y su éxito dependen del rigor del paciente en su modo de aplicación. Pola day CP es la forma más impactante de promocionar el aclaramiento dental.



Ventajas

Pola Day CP tiene las mismas ventajas que las mencionadas en Pola Day y Pola Night:

- Liberación de flúor
- Agentes desensibilizantes
- pH neutro
- Acondicionador y calmante natural
- Alto contenido de agua
- Espesante de alto peso molecular
- Alta viscosidad
- Agradable sabor

Pola Day CP
Kits de 4 Jeringas de 1,3g
Peróxido de Carbamida al 35%
Código de Pedido 7700329

Pola Day CP
caja dispensadora 50x 3gr
Peróxido de Carbamida al 35%
Código de Pedido 7700082





SOOTHE

Un gel desensibilizante a base de nitrato de potasio y con liberación de flúor.



Desensibilizante

Soothe contiene 6% de nitrato de potasio y 0.1% de fluoruro. Es un gel de liberación constante que alivia la sensibilidad dental causada por cambios térmicos y químicos. A diferencia de otros desensibilizantes, Soothe no interferirá en el proceso de blanqueamiento.

Usar antes o después de un blanqueamiento dental o de un aclaramiento dental

La sensibilidad puede surgir durante o después de un tratamiento dental o de un aclaramiento dental. Soothe puede aplicarse antes o después del tratamiento.

Soothe
Kits de 4 Jeringas de 1,2mL
Código de Pedido 8150002

Soothe
Kits de 50 Jeringas de 1,2mL
Código de Pedido 8150033

POLAPAIN

Tinte de autoaplicación en el sistema de blanqueamiento dental.

Productos cosméticos registrados

Pola Paint cumple con la nueva normativa Europea 76/768/EEC, sobre productos cosméticos.

Rápido y fácil para ti

No es necesario el uso de cucharillas. Los pacientes simplemente le compran un kit y luego hacen el trabajo por su propia cuenta. Pola Paint es una excelente herramienta de mercadeo para promover servicios de blanqueamiento dental.

Rápido y fácil para su paciente

Su paciente puede aplicarse Pola Paint en cualquier momento que lo desee, durante el día o la noche – nadie notará que se ha aplicado Pola Paint. El gel de secado rápido y baja viscosidad permite la formación de una película sobre la superficie dental en un tiempo mínimo de secado. Los pacientes pueden optar por blanquear un solo diente o su sonrisa completa.

Retoque perfecto

Pola Paint es un excelente procedimiento de retoque para los pacientes que ya han blanqueado sus dientes con anterioridad – ¡Pola Paint recarga el brillo de sus dientes!

Económico

Pola Paint es el primer indicador económico que alentará a sus pacientes a realizarse un blanqueamiento dental. No se necesita el uso de cucharillas. Tampoco tiene que invertir tiempo en la unidad dental.

Liberación de flúor

La adición de flúor remineraliza la superficie dental ayudando a reducir la sensibilidad postoperatoria.

No necesita el uso de cucharillas

Pola Paint no requiere el uso de cucharillas o equipo adicional. Su paciente puede continuar su rutina diaria sin que nadie sepa que está blanqueando sus dientes al mismo tiempo.

Agradable sabor

Un agradable sabor a menta de larga duración.

Pola Paint
1 X 5,5mL Tubo Pola Paint
Código de Pedido 7700037



MATERIAL PROMOCIONAL GRATIS

para una mayor información al paciente



Póster Pola - mujer
Pedido M100049



Póster Pola – mujer y hombre
Pedido M100052



Póster Pola Office+
Pedido M100055



Demostración profesional de
Pola Office en DVD
Pedido M770954



Demostración profesional de
Pola Office en DVD
Pedido M770985



Calcomanía Pola para
Ventanas
Pedido M100067



Panfleto Publicitario Pola
Código de Pedido M770224



Folletos Pola para Pacientes
Pedido M100058



Señales en los puntos de
ventas / habladores
Pedido M100061



Porta Folletos Pola para
Pacientes
Pedido M100042



Panfleto Antes y Después
de Pola con soporte
Pedido M100045



Forro de Pared Pola
Pedido M100063



Material promocional personalizado

Más material promocional personalizado se encuentra disponible mediante descargas.

Visite: www.sdi.com.au/es/marketing-materials/



visite www.polawhite.com

* Opalescence Boost no es una marca registrada de SDI Limited

‡ Datos Publicados y Resultados de Ensayo SDI

† Datos locales basados en evaluadores clínicos externos

SDI

Hecho en Australia por SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australia 1 800 337 003, Austria 00800 022 55 734, Brasil 0800 770 1735, Francia 00800 022 55 734, Alemania 0800 100 5759, Irlanda 01 886 9577, Italia 800 780625, Nueva Zelanda 0800 734 034, España 00800 022 55 734, Reino Unido 00800 022 55 734, USA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com



M770960 C

†D036M7709601A