



## MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS LEONE

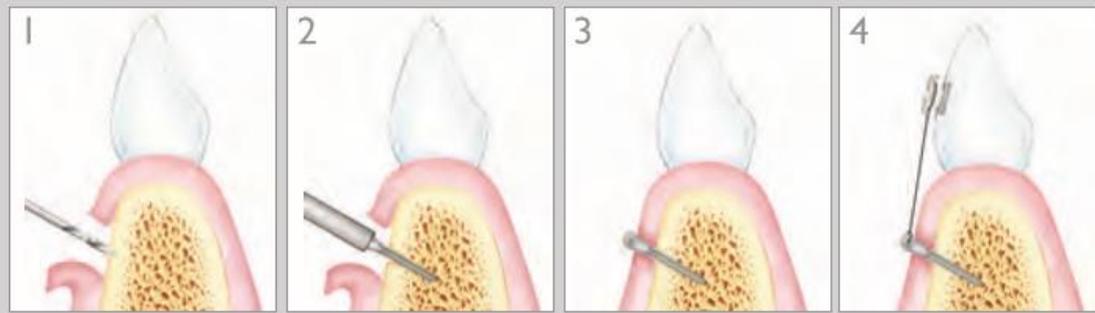

1. El sitio implantar se determina según la posición de la raíz del diente y el ángulo de inserción del Mini Implante. Para crear el sitio imaa la densidad ósea y a la posición.
2. Sirviéndose del atornillador se desarrolla una presión progresiva hasta la completa inserción del Mini Implante. Los Mini Implantes Leone están disponibles con cuello cónico transmucosos en dos medidas: el espesor y la tipología de los tejidos blandos adyacentes al sitio implantar determinarán la elección del cirujano.
3. Suturada la mucosa perimplantar, la curación se conseguirá en dos semanas. Es recomendable esperar este tiempo de curación antes de aplicar las fuerzas de tracción.
4. Las cadenas, los hilos elásticos o los resortes conectados al Mini Implante pueden ser utilizados para obtener movimiento ortodóntico sin pérdida de anclaje. Los Mini Implantes Leone, fabricados en acero inoxidable quirúrgico, no se osteo-integran, por esta razón son fácilmente removibles. No es recomendable dejar los mini implantes en boca más de 6 meses.

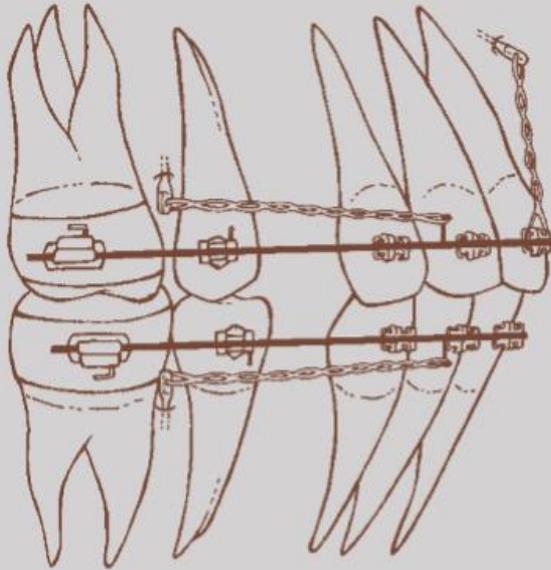