

Table top Units Appareils de table	NEWTRON				SUPRASSON
	NEWTRON BOOSTER NEWTRON P5 NEWTRON P5XS	P5 XS	P5 NEWTRON (LED) P5 NEWTRON XS (LED)	SUPRASSON P5 MAX PROPHY MAX	P5 BOOSTER
Tips Inserts					
1	14	14	14	5	10
1S	14	14	14	5	10
2	14	14	14	5	10
3	14	14	14	5	10
5AE	20	20	20	10	14
10P	14	14	14	5	10
10X	12	12	12	2	9
10Z	12	12	12	2	9
AS3D	7	7	7	3	5
AS6D	7	7	7	3	5
AS9D	6	6	6	1	4
ASL / ASR	7	7	7	3	5
C20	11	11	11	1	8
CAP1 / CAP2 / CAP3	10	10	10	6	7
ET18D	10	10	10	6	7
ET20 / ET20D	7	7	7	3	5
ET25 / ET25L / ET25S	7	7	7	3	5
ET40 / ET40D	7	7	7	3	5
ETBD	7	7	7	3	5
ETPR	20	20	20	10	14
EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	12	12	2	9
GI-1	18	18	18	4	13
H1	2	2	2	2	1
H2L / H2R	2	2	2	2	1
H3	2	2	2	2	1
H4L / H4R	2	2	2	2	1
IRR 20-21 / IRR 20-25	9	9	9	5	7
IRR 25-21 / IRR 25-25	9	9	9	5	7
K10 / K15 / K25 / K30	6	6	6	1	4
P14D	7	7	7	3	5
P15LD / P15RD	7	7	7	3	5
P2L / P2R	3	3	3	3	2
PH1	2	2	2	3	2
PH2L / PH2R	2	2	2	3	2
PM1 / PMS1	15	15	15	6	11
PM2 / PMS2	7	7	7	3	5
PM3 / PMS3	10	10	10	6	7
PM4	14	14	14	5	10
PMV1 / PMV2 / PMV3	15	15	15	6	11
PMV4 / PMV5 / PMV6	10	10	10	6	7
SO4	7	7	7	3	5
TK1-1L / TK1-1S	2	2	2	2	1
TK2-1L / TK2-1R	2	2	2	2	1

**Power Modes / Modes de Puissance**

Newtron	Low / Basse	Medium / Moyenne	High / Haute	Very high / Très haute
---------	-------------	------------------	--------------	------------------------

**Power Settings Scale / Echelle de Réglages**

*Newtron Booster / Newtron P5 / Newtron P5XS / P5 Newtron (LED) / P5 XS Newtron (LED) / P-Max XS* : from 1 to 20 depending on clinical range / de 1 à 20, couvre toutes les gammes  
*P-Max Newtron / ProphyMax Newtron* : from 1 to 10 in each clinical range / de 1 à 10 dans chaque gamme  
*P5 Booster* : from 1 to 14 depending on clinical range / de 1 à 14, couvre toutes les gammes

Pour plus d'informations / For more information [www.pure-newtron.com](http://www.pure-newtron.com)

Lire attentivement le manuel d'utilisation, pour de plus amples informations sur [satelec.com/documents](http://satelec.com/documents).  
 See individual product instructions manuals for further informations on [satelec.com/documents](http://satelec.com/documents).



[www.youtube.com/user/acteon\\_satelec](http://www.youtube.com/user/acteon_satelec)



PERIODONTICS / PARODONTIE




Curettes & débridement



H1 - F 00 366 H2L - F 00 367 H2R - F 00 368  
H3 - F 00 369 H4L - F 00 114 H4R - F 00 115

Periodontal maintenance (BDR)  
Maintenance parodontale (BDR)

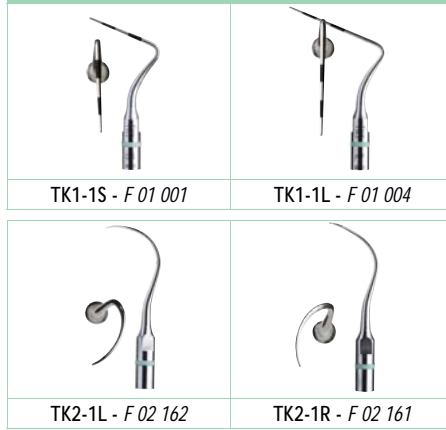

TK1-1S - F 01 001 TK1-1L - F 01 004  
TK2-1L - F 02 162 TK2-1R - F 02 161

Implant maintenance  
Maintenance implantaire



PH1 (x4) F 00 702 PH2L (x4) F 00 705 PH2R (x4) F 00 706

PerioPrecision



P2L - F 00 090 P2R - F 00 091

ENDODONTICS / ENDODONTIE




Endodontics - Irrigation  
Endodontie - Irrigation



K10-21 (x4) - F 43 710 K15-21 (x4) - F 43 715  
K10-25 (x4) - F 43 712 K15-25 (x4) - F 43 717  
K25-21 (x4) - F 43 725 K30-21 (x4) - F 43 730  
K25-25 (x4) - F 43 727 K30-25 (x4) - F 43 732

Passive Ultrasonic Irrigation  
Irrigation passive aux ultrasons

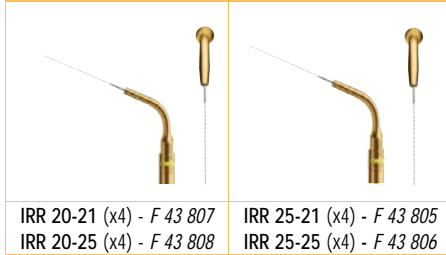

IRR 20-21 (x4) - F 43 807 IRR 25-21 (x4) - F 43 805  
IRR 20-25 (x4) - F 43 808 IRR 25-25 (x4) - F 43 806

Canal Access Prep



CAP1 - F 88 181 CAP2 - F 88 182 CAP3 - F 88 183

Endodontic Retreatment  
Retraitement Endodontique




ET18D - F 88 017 ETBD - F 88 020 ET20 - F 88 011  
ET20D - F 88 013  
ET25S - F 88 021 ET25 - F 88 018 ET25L - F 88 022  
ET40 - F 88 012 ET40D - F 88 014  
SO4 - F 88 009

SURGICAL ENDODONTICS / ENDODONTIE CHIRURGICALE



Apical surgery  
Chirurgie apicale

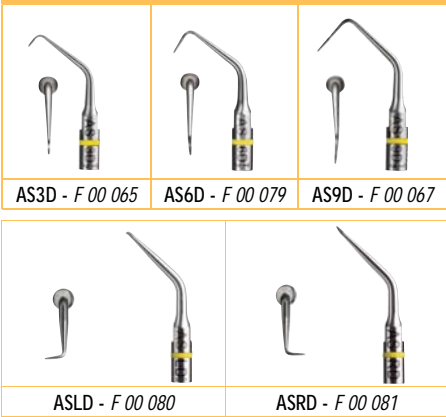

AS3D - F 00 065 AS6D - F 00 079 AS9D - F 00 067  
ASLD - F 00 080 ASRD - F 00 081

Apical surgery  
Chirurgie apicale



P14D F 00 106 P15LD F 00 107 P15RD F 00 108 S12-70D F 00 118

PROPHYLAXIS / PROPHYLAXIE



Scaling  
Détartrage



N°1 - F 00 246 N°1S - F 00 245 N°2 - F 00 247 N°3 - F 00 248  
10P - F 00 253 10X - F 00 359 10Z - F 00 254

CONSERVATIVE & RESTORATIVE DENTISTRY / ODONTOLOGIE CONSERVATRICE & RESTAURATRICE



Perfect Margin Rounded & Shoulder



PM2 - F 02 251 PM3 - F 02 252



PMS2 - F 02 255 PMS3 - F 02 256

Perfect Margin Rounded & Shoulder



PM1 F 02 250 PMS1 F 02 254 PM4 F 00 253

Perfect Margin Veneers




PMV4 F 02 024 PMV5 F 02 025 PMV6 F 02 026

Perfect Margin Veneers



PMV1 F 02 021 PMV2 F 02 022 PMV3 F 02 023

Excavation

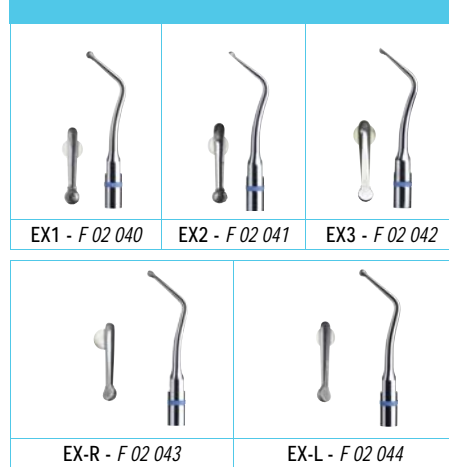

EX1 - F 02 040 EX2 - F 02 041 EX3 - F 02 042  
EX-R - F 02 043 EX-L - F 02 044

Prosthesis  
Prothèse



C20 F 00 113 GI-1 F 02 151 5AE F 00 249

Retreatment  
Retraitement



ETPR - F 88 019