

SR Vivodent® S PE

El diente singular para elevadas exigencias



Carta de formas de dientes


SR Vivodent® S PE

SR Orthotyp® S PE



PEQUEÑO

^{SR}Vivodent® S PE



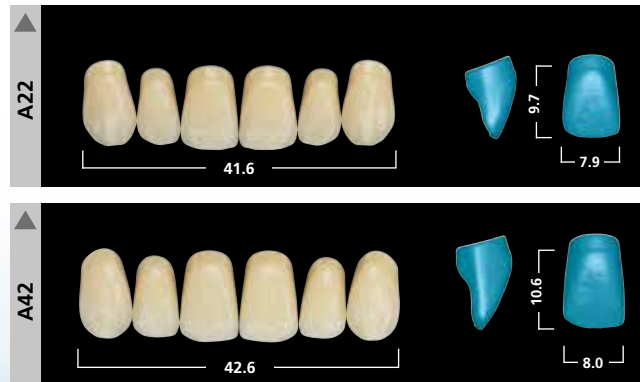


^{SR}Orthotyp® S PE



MEDIANO

^{SR}Vivodent® S PE

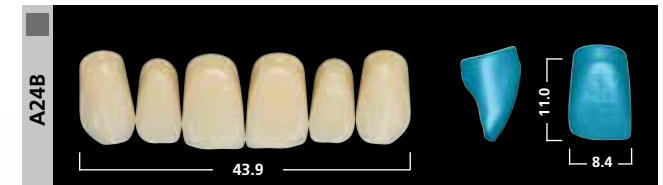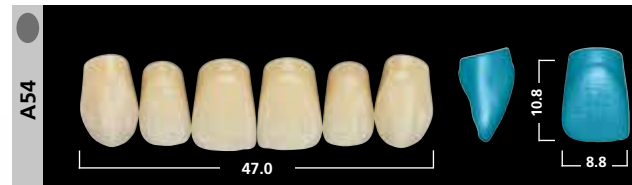
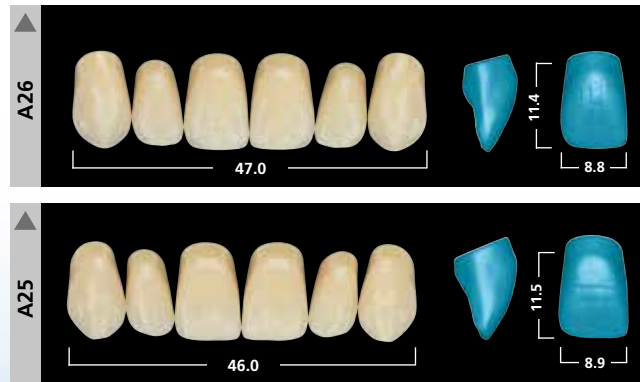


^{SR}Orthotyp® S PE



GRANDE

^{SR}Vivodent® S PE

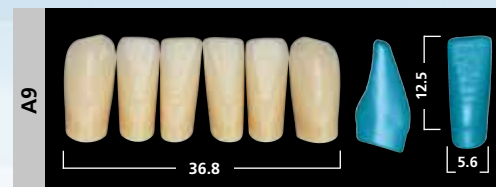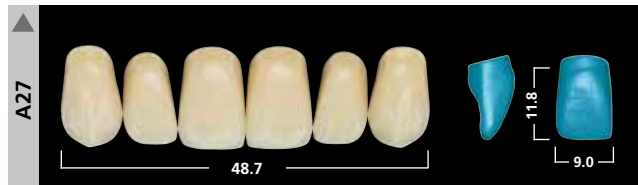

^{SR}Orthotyp® S PE



INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO

Colores

20 Colores PE: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D

Selección del color

El color de diente se determina con la ayuda de una guía de colores según el sistema de colores PE de Ivoclar Vivadent.

Las muestras de la guía de color SR Vivodent S PE cuentan con la misma estructura de estratificación y material que los dientes originales comercializados.

Consecuentemente las desviaciones de color estarán reducidas al máximo.

La selección de color con el paciente debe llevarse a cabo bajo condiciones de luz definidas (5.500 K temperatura de color) o durante el día (preferiblemente con la luz desde el norte).



Dientes anteriores

Selección de diente anterior

Si es posible, los dientes anteriores deberían ser seleccionados directamente con el paciente según las características anatómicas y mímicas. Los dientes anteriores SR Vivodent S PE se clasifican en cuadrados, triangulares u ovalados.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cada forma tiene su propio carácter distintivo.

Formas diente cuadrado

Con esta forma angular, el incisivo central es el dominante. La curvatura labial vertical es moderada.

Formas diente triangular

Este grupo se caracteriza por dientes que tienen una corona que se estrecha hacia la cresta cervical. La curvatura vertical es moderada.

Formas diente Ovalado

Los dientes de esta categoría tienen una curvatura pronunciada. La curvatura labial es particularmente marcada.

Clínica

El Facial Meter SR Vivodent S PE nos permite la selección rápida y objetiva del tamaño de los dientes anteriores apropiado.

Paso 1: Mida el ancho nasal con el facial meter y seleccione el tamaño de los dientes apropiado S / M / L.

Paso 2: Seleccione entre formas de dientes triangulares, ovaladas y cuadradas dentro de este rango de tamaño.

El Papillameter es el dispositivo ideal para la definición de la longitud del labio superior y la línea de cierre de los labios. Especialmente para la longitud de los dientes anteriores, la línea de cierre de los labios proporciona una de las piezas de información más importantes.

Laboratorio

Los siguientes puntos de referencia son determinados con la ayuda de un análisis del modelo:

a) Posición de los caninos

Identifique el primer gran par de rugae; el punto medio de la superficie labial de los caninos superiores se alinea a una distancia aprox. De 9 mm

b) Punto de contacto de los incisivos centrales

La superficie labial de los incisivos centrales se alinea a una distancia de aprox. 7 mm desde el punto medio de la papila incisiva.

La longitud del arco medida a través de estos tres puntos se puede utilizar como una referencia para seleccionar un conjunto de dientes anteriores con una anchura apropiada de la carta de formas.

Dientes posteriores

Esta carta de formas facilita la selección de los tamaños correspondientes para que coincida con los dientes de la selección anterior. Ivoclar Vivadent ofrece una variedad de dientes oclusales posteriores que dan al clínico la oportunidad de seleccionar la forma de diente que mejor se adapte a las necesidades funcionales y estéticas del paciente.


Concepto oclusal

SR Orthotyp S PE es la opción clásica para uso en prótesis completas, parciales e híbridas e implanto soportadas. Los dientes Orthotyp se establecen de acuerdo con una situación normal de mordida en un sistema de uno-a-dos. De esta manera, los contactos principales en la posición céntrica se localizan en las fosas centrales en la mandíbula, así como sobre las crestas marginales.

Oclusión clásica



Sistema de uno-a-dos

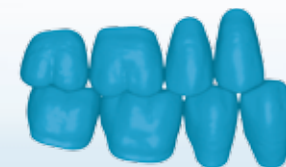

Grosor mínimo de capa

Hay que asegurarse de que la estabilidad de los dientes y el efecto color correcto se mantienen.

Por ello se recomienda respetar el grosor mínimo de capa y no reducirlo

– **Dientes anteriores: 2,5 mm**

– **Dientes posteriores: fosa central min. 2,0 mm, puntas de las cúspides min. 2,5 mm, área cervical min. 2,5 mm**

Para asegurar que la prótesis removible permanece funcional durante mucho tiempo, los siguientes prerequisites deberían darse:

- Las prótesis removibles deben ser planificadas y fabricadas en estrecha cooperación con el dentista.
- El dentista y el técnico dental deben asegurar una oclusión y articulación equilibradas.
- Todos los productos dentales deben ser usados según las instrucciones del fabricante. En particular, los dientes de la prótesis no deben ser debilitados por exceso de pulido.
- Con el fin de asegurar una adhesión fiable con los materiales base de la prótesis, los dientes se limpian con vapor, se crean rugosidades y son humedecidos con monómero. También se recomienda el uso de retenciones mecánicas cuando complete la prótesis con un polímero auto polimerizable.
- No se recomienda la aplicación de un barniz esmalte o spray de limpieza de prótesis.
- Los dientes no deben entrar en contacto con una llama o calor directo.
- Debe evitarse la producción de calor como resultado de demasiada presión durante el pulido.
- Se recomienda usar una mascarilla y el uso de equipos de aspiración para la protección contra el polvo de pulido.
- La limpieza se realiza con productos de limpieza comerciales. Debe evitarse el contacto con disolventes.
- Si se conoce alguna alergia a algún componente del producto, no deben usarse dientes artificiales.
- Por favor lea las correspondientes instrucciones de uso al utilizar materiales de recubrimiento C&B.

TABLA DE COMBINACION

		SR Vivodent® S PE		SR Orthotyp® S PE (22°)
		Anteriores superiores	Anteriores inferiores	Posteriores superiores/inferiores
PEQUEÑO	▲	A22	A3, A5	N3U/N3L
		A42	A3, A5	N3U/N3L
	●	A44	A3, A5	N3U/N3L
	■	A11	A3, A5	N3U/N3L
MEDIANO		A13	A3, A5	N3U/N3L
	▲	A25	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
		A26	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	●	A54	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
GRANDE		A12	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	■	A24B	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
		A66	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	▲	A27	A9	N6U/N6L
	●	A14	A9	N6U/N6L
	■	A15	A9	N6U/N6L
		A17	A9	N6U/N6L

Centro de formación Ivoclar Vivadent



Tener un alto estándar de conocimientos es una señal de su profesionalidad. Ivoclar Vivadent le ayuda a lograr este objetivo al transmitirle tanto el conocimiento sobre lo último en productos como los conocimientos técnicos en relación a la aplicación orientada a los trabajos de clínica y laboratorio. El ICDE de Ivoclar Vivadent ofrece continuamente cursos de formación básicos y avanzados a la medida de sus necesidades.

Visite nuestra página web.

CE 0123

EN ISO 22112:2006 (D)

Las descripciones y datos no constituyen garantía de sus propiedades.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein

es/2015-05-27

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U

Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid), Spain
Telf. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation