

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus
d'info sur
wh.com



Simple, rapide, efficace.

La lubrification en un temps record.

Sans attente.

Sans stress.



assistina^{TWIN}

La lubrification sans attente

Feu vert pour plus d'efficacité : avec l'Assistina Twin, les temps d'attente lors de la lubrification font désormais partie du passé. Il s'agit du premier appareil d'entretien équipé de deux cuves utilisables alternativement et permettant une préparation en continu. Une préparation sereine et plus efficace que jamais !



Sandra Schnäp
Assistante dentaire

«Stupéfiant ! Grâce au système à deux cuves, je prépare les instruments en un clin d'oeil. Silencieux, l'appareil affiche également un design attrayant.»

En toute fluidité



1
Connecter l'instrument dans la cuve 1.

2
Fermer la cuve 1 et démarrer le processus.

3
Connecter le second instrument et fermer la cuve 2 dès que le processus de la cuve 1 est terminé.

4
Retirer l'instrument de la cuve 1 et répéter les étapes 1 et 2.



La lubrification en un temps record

Vos instruments n'ont jamais été entretenus aussi rapidement qu'avec l'Assistina Twin. Grâce à la technologie innovante de la nébulisation, W&H bat tous les records en raccourcissant la durée d'entretien à 10 secondes. Pour un traitement rapide et un résultat inégalé.

Un système innovant

L'huile est nébulisée avant d'être soufflée à haute pression dans l'instrument. Cette opération élimine encore mieux les salissures présentes à l'intérieur de l'instrument. La fine nébulisation atteint les angles les plus inaccessibles des éléments de transmission. Tous les aérosols sont éliminés des cuves par une aspiration active et le filtre HEPA intégré.

Un atout dans tous les cabinets dentaires

L'Assistina Twin répond à toutes les exigences de votre cabinet dentaire. Il est capable de traiter jusqu'à 360 instruments par heure grâce à son procédé innovant et sa rapidité de traitement, mais aussi par son design ergonomique et son vaste choix d'adaptateurs.

Dr. Christian Müller
Dentiste libéral

»J'ai désormais la certitude que mes instruments peuvent être préparés entre deux traitements, sans aucune attente, ni pour mes patients ni pour moi. C'est un véritable plus pour mon cabinet.«



Une technologie révolutionnaire

Lubrification minutieuse et complète des éléments de transmission (orange) et nettoyage des canaux de spray (vert) grâce à la technologie innovante de la nébulisation.

Des adaptateurs pour toutes les applications

Les deux cuves peuvent être équipées d'adaptateurs selon les besoins.


Lubrification optimale et consommation minimale

Grâce à la surveillance intelligente du processus, l'Assistina Twin effectue un entretien minutieux avec une consommation réduite. L'Assistina Twin Care Set ne se remplace qu'après le traitement de 2 800 instruments. Vos instruments sont entretenus rapidement et en toute sécurité, mais également à moindres coûts.



*400 ml par bombe de spray

Assistina Twin Care Set
Capacité identique à 20 bombes de spray*

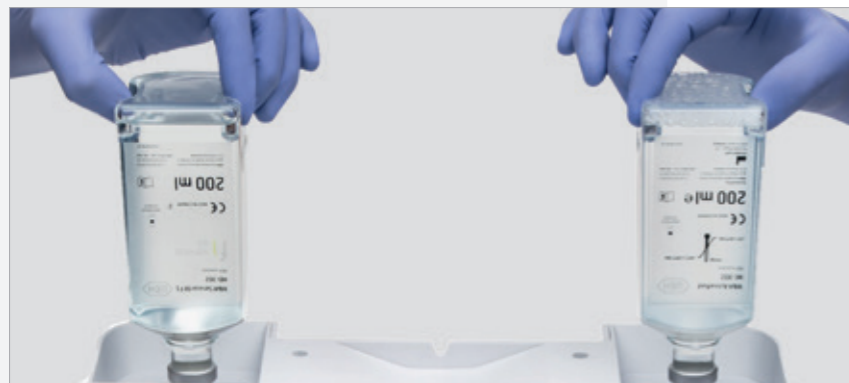

Twin Care Set

Comprend une cartouche de solution de nettoyage, une cartouche d'huile Service Oil F1 et un filtre HEPA. Tous les consommables se remplacent facilement et sans outil.



Standard d'hygiène de haut niveau



Caractéristiques techniques

CE

Type :	MB-302 Assistina Twin
Processus :	Nettoyage des canaux de spray, lubrification
Convient pour :	Pièces à main et contre-angles, turbines, détartrateurs et moteurs à air
Tension secteur :	100 – 240 V CA
Consommation maxi :	18 VA
Consommation d'air :	env. 40 NI/min.
Pression de fonctionnement :	5 à 10 bar (réglage effectué par un régulateur de pression automatique intégré)
Dimensions (l x p x h) :	297 x 435 x 190 mm
Poids :	3,5 kg
Capacité des cartouches :	Solution de nettoyage W&H Activefluid 200 ml Huile W&H Service Oil F1 200 ml

La lubrification en un temps record

Minutieuse, efficace, sûre

Lubrification efficace en seulement 10 secondes. Vos instruments n'ont jamais été entretenus aussi rapidement et minutieusement qu'avec le nouvel Assistina Twin. Grâce à la technologie innovante de nébulisation, il traite jusqu'à 360 instruments par heure. C'est la solution idéale dans tous les cabinets dentaires.



assistina  TWIN

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20458 AFR Rev. 001 / 10.05.2019
Sous réserve de modifications