



Elite Transparent - Prótesis provisional con Elite Transparent



1. Modelo



2. Encerado



3. Aplicación Elite Transparent



4. Aplicación de una película transparente para alisar la llave. Tras esta fase, durante la polimerización de la silicona, se puede poner el modelo a una presión de 2 bar



5. Llave en Elite Transparent



6. Llenado de la llave con composite (dentina)



7. Recolocación de la llave y fotopolimerización



8. Prótesis provisional en bruto



9. Recortado (reducción de la dentina a fin de crear espacio para el esmalte)



10. Llenado de la llave con composite (esmalte)



11. Recolocación de la llave y fotopolimerización



RESULTADO FINAL tras acabado y pulido