

## FICHA TÉCNICA

Información de producto

### E-SUC JET

DETERGENTE CONCENTRADO PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL.

#### Propiedades

Concentrado para la limpieza profunda de sistemas de aspiración dental. Sus componentes de limpieza y principios activos seleccionados, consiguen un cuidado intenso, y profunda descontaminación, a pesar de la elevada exposición a gérmenes y suciedad. Fórmula antiespumante.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP008CS

UFI: TR10-103M-M00A-2NU2

#### Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: amarillo

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 1,03



#### Presentación

1 y 5 litros

#### Aplicaciones

Limpieza profunda de sistemas de aspiración dental. Uso profesional.

#### Modo de empleo y dosis


Producto concentrado. Se emplea en una dosis del 5%. Añadir 50 mL de E-SUC JET y rellenar una cubeta con 950 ml de agua. Aspirar. Dejar actuar el producto durante un período mínimo de 5 minutos y máximo una hora. Cuando haya transcurrido el tiempo de acción, enjuagar el equipo con agua. Es recomendable la utilización del producto sobre el equipo después de cada tratamiento.

#### Composición

Combinación de compuestos de amonio cuaternario, antiespumante, detergentes alcalinos, agente complejante, <5% (p/p) tensioactivos no iónicos.

#### Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:

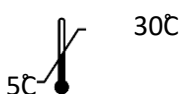

**Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.**

**Vida útil**

2 años

12 meses desde apertura de envase

**Acreditaciones****Impacto ambiental**

E-SUC JET es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

**Advertencia de seguridad**

E-SUC JET está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

| Referencia  | Producto      | Formato          | UDI-DI         |
|-------------|---------------|------------------|----------------|
| EXP0081000  | E-SUC JET 1 L | UNIDAD           | 08437025784608 |
| EXP0081000C | E-SUC JET 1 L | CAJA 12 UNIDADES | 08437025784615 |
| EXP0085000  | E-SUC JET 5 L | UNIDAD           | 08437025784622 |
| EXP0085000C | E-SUC JET 5 L | CAJA 4 UNIDADES  | 08437025784639 |

Versión/fecha: 2 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2  
28050 MADRID t. 689946412  
SRN: ES-MF-000033270