

FICHA TÉCNICA

Información de producto

E-SUC PLUS

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL.

Propiedades

Concentrado para la limpieza profunda de sistemas de aspiración dental. Sus componentes de limpieza y principios activos seleccionados, consiguen un cuidado intenso, y profunda descontaminación, a pesar de la elevada exposición a gérmenes y suciedad.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP002CE

UFI: 6410-G08U-F00V-E8RM

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: amarillo

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 1,03

Presentación

1 y 5 litros



Aplicaciones

Limpieza profunda de sistemas de aspiración dental. Uso profesional.

Modo de empleo y dosis

Producto concentrado. Se emplea en una dosis del 2%. Añadir 20 mL de E-SUC PLUS y rellenar una cubeta con 980 ml de agua. Aspirar. Dejar actuar el producto durante un período mínimo de 5 minutos y máximo una hora. Cuando haya transcurrido el tiempo de acción, enjuagar el equipo con agua. Es recomendable la utilización del producto sobre el equipo después de cada tratamiento.

Composición

Combinación de compuestos de amonio cuaternario, detergentes alcalinos y agentes complejantes.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

12 meses desde apertura de envase

Acreditaciones



Impacto ambiental

E-SUC PLUS es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

E-SUC PLUS está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Referencia	Producto	Formato	UDI-DI
EXP0021000	E-SUC PLUS 1 L	UNIDAD	08437025784066
EXP0021000C	E-SUC PLUS 1 L	CAJA 12 UNIDADES	08437025784073
EXP0025000	E-SUC PLUS 5 L	UNIDAD	08437025784080
EXP0025000C	E-SUC PLUS 5 L	CAJA 4 UNIDADES	08437025784097

Versión/fecha: 3 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
SRN: ES-MF-000033270