

FICHA TÉCNICA

Información de producto

ULTRA LAB

LIMPIADOR TRIENZIMÁTICO CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA DE FRESAS Y LIMAS.

Propiedades

Concentrado para la limpieza enzimática y descontaminación manual de instrumentos rotatorios, paso previo a la desinfección de alto nivel y/o a la esterilización. La solución contiene un conjunto de enzimas para un nivel superior de limpieza, permitiendo retirar cualquier resto de materia orgánica. Las enzimas presentes en el producto son proteasas que limpian restos de sangre, tejidos y mucosidades, lipasas que limpian restos de grasa y amilasas que eliminan compuestos de almidón muy presentes en los alimentos. Sus componentes de limpieza y principios activos seleccionados, consiguen una profunda descontaminación, además de ejercer potente acción detergente.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP006CN

UFI: JV00-Y06N-J00D-E80E

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: azul

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 1,018



Presentación

1 y 5 litros

Aplicaciones

Concentrado para la limpieza manual de fresas y limas. Uso profesional.

Modo de empleo y dosis

Producto concentrado. Diluir al 2% en una cuba de inmersión (20 ml de ULTRA LAB y 980 mL de agua). Si es necesario, según el grado de suciedad, la concentración puede aumentarse al 5%. Sumergir los instrumentos después de cada uso, de manera que todas las superficies queden cubiertas, mínimo 5 minutos. Enjuagar o aclarar con agua. Secar con papel y preparar para la desinfección de alto nivel y/o esterilización. Renovar la solución regularmente (al menos una vez al día).

Composición

Compuesto de amonio cuaternario, inhibidores de corrosión, agente complejante, complejo enzimático (compuesto por proteasas, amilasas, lipasas), <5% (p/p) tensoactivos no iónicos.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

12 meses desde apertura de envase

Acreditaciones



Impacto ambiental

ULTRA LAB es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

ULTRA LAB está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Referencia	Producto	Formato	UDI-DI
EXP0061000	ULTRA LAB 1 L	UNIDAD	08437025784226
EXP0061000C	ULTRA LAB 1 L	CAJA 12 UNIDADES	08437025784233
EXP0065000	ULTRA LAB 5 L	UNIDAD	08437025784240
EXP0065000C	ULTRA LAB 5 L	CAJA 4 UNIDADES	08437025784257

Versión/fecha: 3 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
SRN: ES-MF-000033270