

FICHA TÉCNICA

Información de producto

E-SUC CLEANER

LIMPIADOR ESPECIAL PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL.

Propiedades

Concentrado ácido para la limpieza y mantenimiento de sistemas de aspiración dental. Se recomienda su uso para prevenir incrustaciones en el equipo de aspiración. Producto concentrado, alto rendimiento. Alto poder de limpieza en la eliminación de depósitos de aguas duras.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP003CG

UFI: DY00-F0W1-U00V-3KKG

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: incoloro

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 1,124



Presentación

1 y 5 litros

Aplicaciones

Limpieza y mantenimiento de sistemas de aspiración dental. Uso profesional.

Modo de empleo y dosis

Emplear E-SUC CLEANER periódicamente, para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones dentales. Diluir en una cubeta en una dosis del 5%. Aspirar y dejar que la solución actúe durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo de actuación, aclarar la instalación con agua limpia. En caso de aguas duras, o mucho uso, llevar a cabo la limpieza y mantenimiento a diario, en la misma proporción y mismo tiempo de actuación. Para casos difíciles, aumentar la proporción al 10% y el tiempo de actuación a una hora. Se recomienda su uso habitual, en cualquier superficie resistente a los ácidos, donde deban eliminarse depósitos de aguas duras como tuberías, azulejos, escupideras o lavabos. No emplear en superficies sensibles a los ácidos como el aluminio, etc.

Composición

Combinación de ácidos orgánicos e inorgánicos, <5% tensioactivos no iónicos.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

12 meses desde apertura de envase

Acreditaciones



Impacto ambiental

E-SUC CLEANER es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

E-SUC CLEANER está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Referencia	Producto	Formato	UDI-DI
EXP0031000	E-SUC CLEANER 1 L	UNIDAD	08437025784103
EXP0031000C	E-SUC CLEANER 1 L	CAJA 12 UNIDADES	08437025784110
EXP0035000	E-SUC CLEANER 5 L	UNIDAD	08437025784127
EXP0035000C	E-SUC CLEANER 5 L	CAJA 4 UNIDADES	08437025784134

Versión/fecha: 3 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
SRN: ES-MF-000033270