

FICHA TÉCNICA

Información de producto

EXPERT BENZ

LIMPIADOR PARA IMPRESIONES DENTALES.

Propiedades

Producto listo para usar, indicado para la limpieza y descontaminación rápida de impresiones. Evitar materiales sensibles al alcohol.

Producto Sanitario Clase I

2017/745 (MDR)

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

UDI-DI BÁSICO: 8437025784EXP004CJ

UFI: P110-Y0KF-500C-RX5J

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: incoloro

Olor: característico

Densidad relativa a 20 °C: 0,894

Presentación

750 ml y 5 litros



Aplicaciones

Limpieza profunda para impresiones dentales. Uso profesional.

Modo de empleo y dosis

Producto listo para su uso. Usar inmediatamente después de la toma de impresiones, enjuague la impresión bajo chorro de agua durante 30 segundos, y pulverice las impresiones con Expert Benz de forma uniforme y por las dos caras. Dejar evaporar.

Composición

Combinación de alcoholes, compuesto de amonio cuaternario y agente dispersante.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

12 meses desde apertura de envase

Acreditaciones**Impacto ambiental**

EXPERT BENZ es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

EXPERT BENZ está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenderse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Referencia	Producto	Formato	UDI-DI
EXP0040750	EXPERT BENZ 750 ML	UNIDAD	08437025784141
EXP0040750C	EXPERT BENZ 750 ML	CAJA 12 UNIDADES	08437025784158
EXP0045000	EXPERT BENZ 5 L	UNIDAD	08437025784165
EXP0045000C	EXPERT BENZ 5 L	CAJA 4 UNIDADES	08437025784172

Versión/fecha: 3 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
SRN: ES-MF-000033270