

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	HYGENIC CLAMPS CON ALA ESTUCHE	
REFERENCIA	1704	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Coltène/Whaledent Inc. 235 Ascot Parkway Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA Tel. USA & Canada + 1 800 221 3046 + 1 330 916 8800 info@coltenewhaledent.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Los sets Hygenic Dental Dam clamps contienen los clamps más comunes para el aislamiento con dique de goma, con ala y sin ala. El estuche Hygenic clamps Fiesta contiene clamps codificados por colores en acabado mate. La codificación por colores evita los errores y el acabado en mate mejora la visibilidad. Características: Son Autoclavables.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.	
INSTRUCCIONES DE USO SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar los clamps de acuerdo con los parámetros a continuación: - Autoclave de gravedad: 15 minutos a 132 °C/270 °F. - Esterilizador de prevacío: 4 minutos a 132 °C/270 °F. Deje que los instrumentos se sequen. Antes de guardarlos, compruebe que están secos.	

FICHA TÉCNICA

ENVASE	ESTUCHE 9 clamps N.:1,2,4,7,8A,9,12A,13A,14A
FINALIDAD	Pinza utilizada por los dentistas como ayuda para asegurar el dique de goma en los dientes.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.