


impregnated!

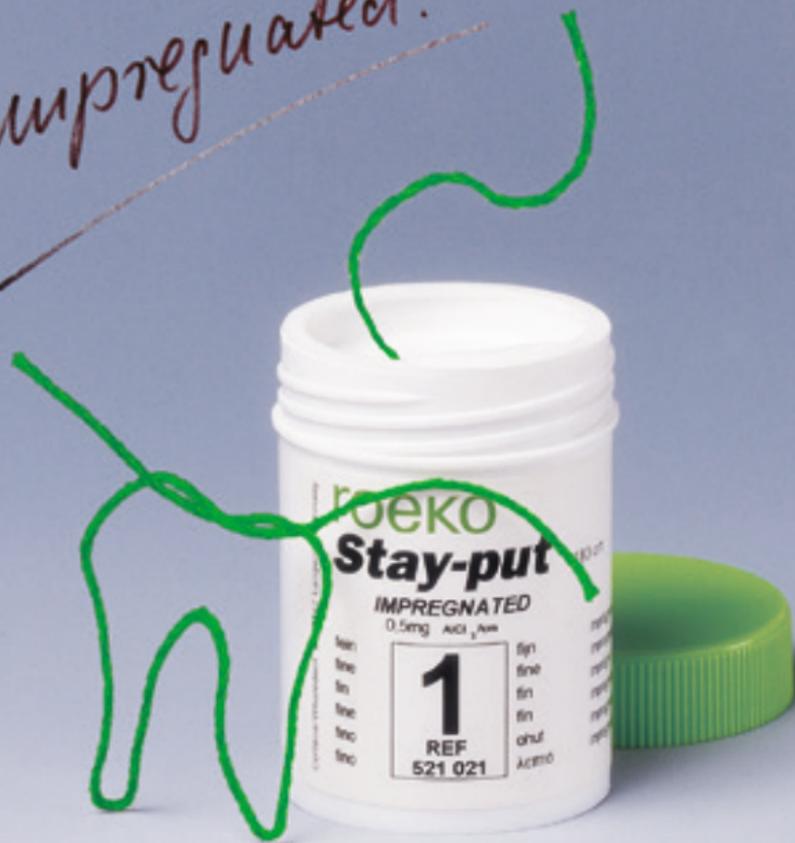

roeko Stay-put

Efectivo – eficaz –
retracción perfecta

Efectivo – eficaz – retracción perfecta

Retracción perfecta con Stay-put

Durante la preparación para una impresión siempre surgen los mismos problemas. Muchos hilos retractores no son lo suficientemente moldeables. Por eso resulta difícil introducirlos en el surco, o, una vez dentro, saltan o se descolocan.

Con Stay-put estos problemas pertenecen al pasado. El hilo se mantiene tal y como usted lo ha colocado.

Stay-put impregnado



Stay-put combina de modo óptimo la calidad de un hilo retractor trenzado con la plasticidad de un finísimo filamento. Este núcleo moldeable estabiliza el hilo y hace que permanezca en la forma deseada. Stay-put es fácil de introducir en el surco gingival y se mantiene en la posición deseada. No es necesario que los extremos del hilo se solapen. Stay-put impregnado está impregnado con cloruro de aluminio. Además, sus propiedades astringentes contienen las pequeñas hemorragias del borde de la encía. Al no contener epinefrina no tiene efectos sobre la circulación sanguínea del paciente.

Aplicación efectiva y eficiente:

Stay-put impregnado detiene las hemorragias de forma rápida y efectiva y no requiere una posterior introducción del hilo, por lo que permite ahorrar tiempo y trabajo.

fecta

Ventajas de Stay-put impregnado

- rápida detención de hemorragias
- no provoca alteraciones en la circulación sanguínea
- codificado con color para una fácil distinción de los tamaños
- ofrece un buen contraste con la encía
- mantiene la forma
- no se resbala
- fácil de introducir
- permanece dentro del surco gingival
- no es necesario que los extremos del hilo se solapen



La aplicación es así de sencilla:

Con unas tijeras afiladas, corte un trozo del hilo de una longitud equivalente a la de la circunferencia del diente. No es necesario que los extremos del hilo se solapen.

Introduzca primero la parte central del hilo en el surco.



Continúe después hacia los extremos para introducir completamente el hilo en el surco.



Stay-put impregnado está disponible en los tamaños extra-fino, fino, medio y grueso.

Stay-put no impregnado

Es la versión no impregnada probada de Stay-put. Le ofrece la flexibilidad de impregnar el hilo justo antes del tratamiento y con el astringente de su elección.



Accesorios

Los **obturadores para hilo retractor** de Roeko facilitan la colocación del hilo retractor. Las entalladuras laterales en los extremos activos evitan que el hilo se resbale.



¿Conoce ya el producto **Comprecap?**

Utilice Comprecap en combinación con Stay-put. Comprecap ejerce una presión adicional sobre el hilo retractor y la encía y corta las

hemorragias mediante compresión. Al retirar el Comprecap usted encontrará el área de trabajo ideal: el muñón del diente está seco, el surco gingival, abierto, y los límites de la preparación se reconocen con precisión.



Comprecap anatomic

Capuchones anatómicos de compresión que se adaptan óptimamente a la anatomía de los dientes gracias a las perforaciones semicirculares en dos lados opuestos.



Con Stay-put y Comprecap conseguirá el campo de trabajo ideal para las tomas de impresión con AFFINIS – impresionantemente libre de burbujas y rebabas, la impresión perfecta.

Información para pedidos

Stay-put impregnado

| | |
|------------|-------------|
| extra-fino | REF 521 020 |
| fino | REF 521 021 |
| medio | REF 521 022 |
| grueso | REF 521 023 |

Stay-put no impregnado

| | |
|------------|-------------|
| extra-fino | REF 521 000 |
| fino | REF 521 001 |
| medio | REF 521 002 |
| grueso | REF 521 003 |

Comprecap anatomic

| | Contenido | REF |
|----------------------|-----------|---------|
| Set (1/3/5) | 120 unid. | 531 299 |
| Tamaños individuales | | |
| 1 | 120 unid. | 531 201 |
| 3 | 120 unid. | 531 203 |
| 5 | 60 unid. | 531 205 |

Comprecap

| | Contenido | REF |
|----------------------|-----------|---------|
| Set (1/3/5) | 150 unid. | 530 000 |
| Tamaños individuales | | |
| 1 | 120 unid. | 530 008 |
| 1 | 600 unid. | 531 008 |
| 3 | 120 unid. | 530 010 |
| 3 | 600 unid. | 531 010 |
| 5 | 60 unid. | 530 014 |
| 5 | 400 unid. | 531 014 |

Obturador para hilo retractor

| | |
|---------|-------------|
| liso | REF 520 000 |
| dentado | REF 520 001 |

Solicitenos material informativo o visitenos en internet: www.coltenet.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls
Ohio 44223/USA
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent

GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE®**