

FICHA TÉCNICA

VELOCARE MAQUINA LUBRICACIÓN ROTATORIO 2-2 (MODELO LUB-120)		
REFERENCIAS	54893	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. Tonghui Road Nº456, Ningbo, China	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	No producto sanitario; conforme a Directivas LVD 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU.	
DESCRIPCIÓN	Equipo automático para limpieza y lubricación de piezas de mano dentales (alta y baja velocidad). Permite procesar hasta 3 piezas simultáneamente con modos S/L/E y purga de aire para eliminar excedentes de aceite.	
ESPECIFICACIÓN	Modelo: LUB-120 — Voltaje nominal: 100–240 V~, 50/60 Hz — Potencia: 60 VA — Presión de trabajo: 0,4–0,6 MPa (60–80 psi) — Capacidad del depósito de aceite: 300 ml — Dimensiones (An×Pr×Al): 310 × 270 × 350 mm — Modos: Corto (~35 s + 60 s aire), Largo (~45 s + 80 s aire), Extra-largo (~55 s + 90 s aire) — Conexiones compatibles: ISO 9168 (alta) e ISO 3964 (baja) — Fusible: T3A/250V	
COMPOSICIÓN	Unidad principal, cable de alimentación, tubo de aire, conector en “Y”, 4 juntas tóricas (O-ring), embudo, 1 botella de aceite de lubricación, bolsa de algodón absorbente (15 uds).	
PRESENTACIÓN	1 set por caja. Peso neto 7,2 kg; peso bruto 10,5 kg; medidas de caja 41 × 40 × 45 cm.	
VIDA ÚTIL	Periodo de uso esperado: 8 años (con mantenimiento y recambios periódicos de filtro/algodón).	
FINALIDAD PREVISTA	Limpieza y lubricación de piezas de mano dentales (alta/baja velocidad) en clínicas dentales.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en lugar ventilado, seco y alejado de fuentes de calor/ignición. No exponer a >40 °C ni a luz solar directa. Durante el transporte, mantener estable y, si no va a usarse durante periodos prolongados, vaciar el depósito de aceite.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.

SCHEDA TECNICA

VELOCARE MACCHINA DI LUBRIFICAZIONE ROTATORIA 2-2 (MODELLO LUB-120)		
RIFERIMENTI	54893	
PRODUTTORE / RESPONSABILE	Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. Tonghui Road N°456, Ningbo, China	
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Non dispositivo medico _ Conformità elettrica/EMC: LVD 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU.	
DESCRIZIONE	Apparecchiatura automatica per pulizia e lubrificazione di strumenti dentali ad alta e bassa velocità. Consente di trattare fino a 3 strumenti contemporaneamente, con modalità S/L/E e spurgo d’aria per rimuovere l’eccesso di olio.	
SPECIFICHE	Modello: LUB-120 — Tensione nominale: 100–240 V~, 50/60 Hz — Potenza: 60 VA — Pressione di esercizio: 0,4–0,6 MPa (60–80 psi) — Capacità serbatoio olio: 300 ml — Dimensioni (L×P×H): 310 × 270 × 350 mm — Modalità: Breve (~35 s + 60 s aria), Lunga (~45 s + 80 s aria), Extra-lunga (~55 s + 90 s aria) — Connessioni compatibili: ISO 9168 (alta) e ISO 3964 (bassa) — Fusibile: T3A/250V	
COMPOSIZIONE	Unità principale, cavo di alimentazione, tubo dell’aria, raccordo a “Y”, 4 O-ring, imbuto, 1 flacone di olio lubrificante, busta di cotone assorbente (15 pz).	
PRESENTAZIONE	1 set per scatola. Peso netto 7,2 kg; peso lordo 10,5 kg; dimensioni scatola 41 × 40 × 45 cm.	
VITA UTILE	Periodo di utilizzo previsto: 8 anni (con manutenzione e sostituzione periodica del filtro/cotone).	
FINALITÀ PREVISTA	Pulizia e lubrificazione di strumenti odontoiatrici (alta/bassa velocità) in cliniche e ospedali odontoiatrici.	
STOCCAGGIO E TRASPORTO	Conservare in luogo ventilato e asciutto, lontano da fonti di calore/ignizione. Non esporre a >40 °C né alla luce solare diretta. Per il trasporto o lunghi periodi di inattività, svuotare il serbatoio dell’olio e mantenere l’unità stabile.	

Scheda tecnica emessa dal Dipartimento Tecnico del Distributore in assenza di emissione da parte del Fabbricante. Il Distributore non è responsabile di eventuali inesattezze del contenuto della presente scheda né di danni imputabili legalmente al Fabbricante.