


FICHA TÉCNICA

FORCEPS PEDIÁTRICOS PROCLINIC		 <i>Ver imágenes específicas en Anexo</i>
REFERENCIAS	59672 - Fórceps Pediátricos N°1 59673 - Fórceps Pediátricos N°2 59674 - Fórceps Pediátricos N°3 59675 - Fórceps Pediátricos N°4 59676 - Fórceps Pediátricos N°5 59677 - Fórceps Pediátricos N°6 59678 - Fórceps Pediátricos N°7	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL S.P.A. Via Valenzana, 60 55054 Massarosa – Bozzano Lucca, Italia	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Instrumental quirúrgico reutilizable de acero inoxidable diseñado específicamente para la extracción dental en pacientes pediátricos. No estériles. Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. Acero quirúrgico inoxidable. Dureza mínima entre 40-44hrc	
ESPECIFICACIÓN	Cada fórceps presenta un diseño anatómico adaptado a las dimensiones de la boca infantil, permitiendo un agarre firme y preciso para la extracción de dientes primarios. <ul style="list-style-type: none">• 59672 - Fórceps Pediátricos N°1: Para incisivos superiores• 59673 - Fórceps Pediátricos N°2: Para premolares superiores• 59674 - Fórceps Pediátricos N°3: Para molares superiores• 59675 - Fórceps Pediátricos N°4: Para raíces superiores• 59676 - Fórceps Pediátricos N°5: Para incisivos inferiores• 59677 - Fórceps Pediátricos N°6: Para molares inferiores• 59678 - Fórceps Pediátricos N°7: Para raíces inferiores	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable de alta calidad grado quirúrgico	
PRESENTACIÓN	1 unidad	
VIDA ÚTIL	Sin caducidad específica. Si se almacenan y utilizan adecuadamente, las propiedades funcionales no se ven afectadas.	
FINALIDAD	Indicado para realizar la extracción de dientes temporales en pacientes pediátricos durante procedimientos odontológicos por personal cualificado	
INSTRUCCIONES DE USO	Realizar la limpieza y esterilización del instrumento antes de cada uso. Manipular de acuerdo con las prácticas estándar de odontología quirúrgica. No utilizar si se detectan signos de corrosión u óxido.	

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.
------------------------------------	--

ANEXO 1

59672 - Fórceps Pediátricos N°1



59673 - Fórceps Pediátricos N°2



59674 - Fórceps Pediátricos N°3



59675 - Fórceps Pediátricos N°4



59676 - Fórceps Pediátricos N°5



59677 - Fórceps Pediátricos N°6



59678 - Fórceps Pediátricos N°7

