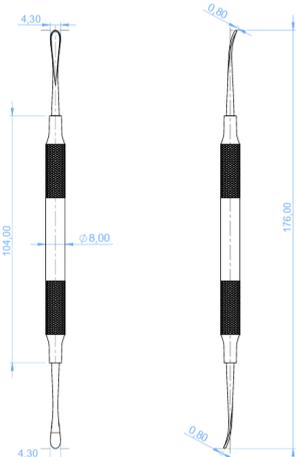


FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| PERIOSTOTOMO GOLDMAN FOX PROCLINIC | |  |
| REFERENCIAS | 59928 | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | ASA DENTAL S.p.A Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT) | |
| CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO | Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE). | |
| DESCRIPCIÓN | Periostotomo Goldman Fox reutilizable para uso quirúrgico dental. | |
| ESPECIFICACIÓN | <p>El periostotomo Goldman Fox Proclinic es un instrumento quirúrgico reutilizable manual diseñado para procedimientos de elevación y despegue del periostio durante intervenciones odontológicas.</p> <p>Está fabricado en acero inoxidable de grado quirúrgico, conforme a la norma UNI EN ISO 7153-1, lo que garantiza resistencia a la corrosión, alta durabilidad y compatibilidad con procesos de esterilización.</p> <p>Su diseño incluye una doble hoja activa, una con punta más afilada y otra más redondeada, lo cual permite una manipulación precisa del tejido en diferentes zonas de la cavidad oral. El mango ergonómico está concebido para proporcionar un agarre firme y controlado durante su uso.</p> <p>Características adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No estéril de origen, requiere esterilización previa a cada uso (177 °C). • Acabado satinado que reduce el reflejo de luz en el campo operatorio. • Reutilizable, siempre que se sigan las condiciones de mantenimiento y esterilización recomendadas. • Compatible con autoclave, soluciones enzimáticas y sistemas ultrasónicos de limpieza. • Cumple con las exigencias de funcionalidad y seguridad establecidas para instrumental quirúrgico clase I. <div style="text-align: center;">  </div> | |

| | |
|------------------------------------|---|
| COMPOSICIÓN | Acero inoxidable conforme a la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales / Acero inoxidable". |
| PRESENTACIÓN | 1 unidad |
| VIDA ÚTIL | No aplica una fecha de caducidad específica. La vida útil depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y métodos de reprocesamiento adecuados. Si el instrumento muestra signos de óxido, no debe ser utilizado. |
| FINALIDAD | <p>Instrumento quirúrgico reutilizable utilizado principalmente en cirugía periodontal y odontología. Su función principal es despegar el periostio (la membrana que recubre el hueso) de la superficie ósea sin dañar los tejidos blandos, lo cual es esencial para acceder al hueso subyacente durante procedimientos quirúrgicos.</p> <p>¿Para qué sirve específicamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despegamiento de colgajos mucoperiosticos en cirugía periodontal. • Facilita el acceso al hueso para procedimientos como: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cirugías de regeneración ósea. ○ Colocación de implantes. ○ Remodelado óseo. • Tiene una punta afilada y curva, diseñada para cortar y despegar suavemente el periostio. |
| INSTRUCCIONES DE USO | <p>Antes de cada uso, inspeccionar, limpiar y esterilizar.</p> <p>Utilizar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.</p> <p>En caso de detectar óxido, desechar el instrumento.</p> |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | <p>Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.</p> <p>Proteger de la humedad.</p> |