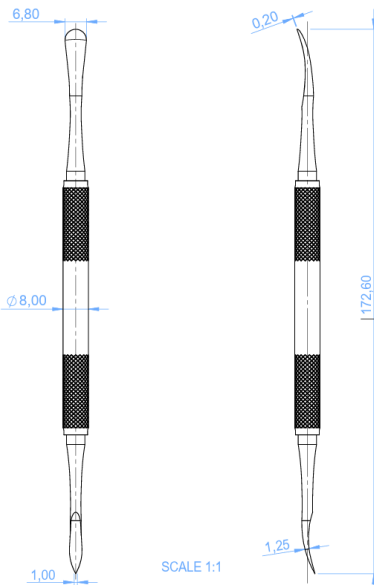


FICHA TÉCNICA

PERIOSTOTOMO MOLT PROCLINIC		
REFERENCIAS	59929	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL S.p.A Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Instrumento quirúrgico reutilizable de uso manual para intervenciones dentales. No estéril. Esterilizable en autoclave a 177 °C. Diseñado para separar el tejido gingival en procedimientos quirúrgicos, tanto en cara vestibular como palatina.	
ESPECIFICACIÓN	El periostotomo MOLT es un instrumento doble terminado con extremos de diferentes tamaños y formas (6,8 mm y 1 mm / 1,25 mm) que permiten acceder a distintas zonas anatómicas con precisión. Fabricado en acero inoxidable de grado quirúrgico, de acuerdo a la norma UNI EN ISO 7153-1, resistente a la corrosión y apto para procesos de esterilización por autoclave hasta 177 °C. Su mango ergonómico garantiza un agarre cómodo y seguro, incluso con guantes. Instrumento reutilizable, compatible con limpieza ultrasónica, soluciones enzimáticas y detergentes neutros. Presenta un acabado satinado que evita reflejos en el campo operatorio. 	

COMPOSICIÓN	Acero inoxidable, conforme a la norma UNI EN ISO 7153-1 “Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable”
PRESENTACIÓN	1 unidad
VIDA ÚTIL	No tiene fecha de caducidad específica. Su durabilidad depende del uso, cuidado y método de reprocesamiento. Si se observan signos de óxido, no debe usarse
FINALIDAD	Instrumento manual destinado a la separación del periostio y tejido gingival durante procedimientos quirúrgicos odontológicos, por profesionales cualificados.
INSTRUCCIONES DE USO	• Inspeccionar antes de cada uso para comprobar su integridad. • Limpiar y esterilizar previamente. • Utilizar detergentes y desinfectantes compatibles con instrumental médico. • Si presenta signos de deterioro o corrosión, desechar el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en un lugar limpio, seco y alejado de fuentes de calor. Evitar la exposición directa al sol y a ambientes húmedos