

Gingifast Rigid - Técnica directa



1. Impresión con análogos



2. Diques de cera



3. Aplicación del separador



4. Aplicación Gingifast Rigid



5. Creación de puntos de referencia y encofrado de la impresión



6. Vaciado del yeso



RESULTADO FINAL

Gingifast Elastic - Técnica indirecta



1. Modelo máster



2. Llave de Zetalabor



3. Remoción de la llave



4. Troqueles



5. Creación de orificios para inyectar silicona y aplicar el separador sobre la llave



6. Recolocación de la llave sobre el modelo máster



7. Inyección de Gingifast Elastic dentro de la llave



8. Inyección de Gingifast Elastic terminada (salida de material por los canales de evacuación)



9. Remoción de la llave (presencia de canales de evacuación en la encía) y posterior acabado de la encía, eliminando los canales de evacuación



RESULTADO FINAL