



La higiene es fundamental para el desempeño adecuado de las tareas del odontólogo. Para ayudarle a preservarla Cavex le proporciona productos eficaces e inocuos, tanto para el hombre como para el medio ambiente, y diseñados conforme a las necesidades de odontólogos, especialistas, asistentes, enfermeras y técnicos.

Your impression is our concern

Por fin ya dispone de Cavex GreenClean, la solución inteligente para eliminar rápida y fácilmente los restos de alginato

¿Quién mejor para fabricar un disolvente de alginato que los mismos fabricantes de alginato? Cavex GreenClean es prueba de ello, pues la manera más eficaz de eliminar los restos de alginato y yeso es disolverlos, y no raspando o frotando. Cubetas de impresión, espátulas y otros instrumentos quedan limpios e impecables rápida y fácilmente. Además, Cavex GreenClean es un producto inofensivo y fácil de usar que protege tanto su piel como sus instrumentos. Toda una solución inteligente.



El secreto de Cavex GreenClean reside en que destruye la estructura orgánica

- con pH neutro

A menudo, la mejor manera de eliminar los restos más resistentes de alginato y yeso es más sencilla de lo que se piensa. Con deshacer la estructura orgánica basta para que el resto entero se desprenda. Enjuague con agua o cepille ligeramente para que la cubeta de impresión quede impecable, brillante y lista de nuevo para usar.

- no daña la piel

Opera tan eficaz y fácilmente en espátulas como en el resto de instrumentos que entran en contacto con el alginato.

- biodegradable

Añada dos cucharadas de Cavex GreenClean a medio litro de agua. Elimine los restos sueltos de alginato y a continuación sumerja los instrumentos durante 15 a 30 minutos. Enjuague a continuación o cepille, y listo. Sin necesidad de rayar ni frotar. Es más, si aplica agua templada o baño de ultrasonidos, el proceso se agilizará aún más.

- 1 kg > 500 cubetas limpias

- aroma agradable

Un producto con pH neutro y biodegradable, bueno para los materiales, el hombre y el medio ambiente.

Cavex GreenClean sólo actúa sobre los restos de alginato o yeso, no sobre las cubetas o las espátulas mismas, que permanecen impecables e impolutas. Y, no menos importante, tampoco actúa sobre la misma piel. Cavex GreenClean cuenta con pH neutro y es biodegradable, por lo que los restos pueden desecharse por cualquier desagüe sin problemas. Lo único que queda tras su aplicación es un agradable y ligero aroma a limón.

El envase transparente con cuchara dosificadora contiene 1 kg de Cavex GreenClean, cantidad suficiente para limpiar más de 500 cubetas. El producto resulta, pues, tan eficaz como rentable.

Podrá disponer de Cavex GreenClean por medio de su distribuidor de productos dentales. Si desea recibir más información sobre la composición del producto y sus usos, sírvase dirigirse al Servicio de atención al cliente de Cavex [+31 (0) 23 530 77 00] o visite www.cavex.nl.

