



**HEBÖR ESPAÑOLA S.A.**  
yesos especiales

Carretera de Fuencemillan s/n  
19292 Espinosa de Henares  
Guadalajara  
España  
t +34 949 858 825 / 851  
f +34 949 858 836  
e [hebor@hebor.net](mailto:hebor@hebor.net)  
w [www.hebor.net](http://www.hebor.net)

## **HEBODUR DENTAL**

*Yeso Dental Tipo III* con expansión controlada indicado para la fabricación de prótesis removibles, resinas, ortodoncias, antagonistas y modelos fuertes y resistentes en los bordes.

**AMASADO:** Recomendamos la relación yeso/agua abajo indicada. Se vierte el yeso en el agua (nunca al revés), se deja reposar durante aproximadamente 1 minuto y se mueve la mezcla hasta conseguir una masa homogénea. Los recipientes deben estar limpios.

**ALMACENAJE:** En sitios secos y frescos sobre rastreles de madera, separando las distintas filas entre sí y de la pared con objeto de que el aire pueda circular libremente. Los yesos son susceptibles de deteriorarse cuando están expuestos al aire, particularmente si la humedad ambiental es alta.

### **DATOS TECNICOS:**

Relación Agua /Yeso..... 30gr. de agua por 100gr. de yeso.

Tiempo de vaciado..... mínimo 3 minutos.

Tiempo de fraguado..... Aproximadamente 15 minutos

Expansión fraguado..... 0,1 %

Dureza brinell..... >3.200 Kg./cm<sup>2</sup>

Res. a la compresión..... 60 Mpa.

Color..... Amarillo

Caducidad..... 6 meses desde la fecha de envasado.

### **DISTRIBUCION GRANULOMETRICA:**

Superior a 200 micras..... Trazas

Superior a 86 micras..... 0,2 %

Superior a 63 micras..... 2 %

---

PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

---