



CALIBRA 3D

TÉCNICA ESQUELÉTICA/FIJA / REVESTIMIENTOS

NUEVO



REVESTIMIENTO ESPECIAL PARA COLADOS DE ESTRUCTURAS DENTALES IMPRESAS EN RESINA 3D

- UN ÚNICO PRODUCTO PARA EL COLADO DE PRÓTESIS FIJA O ESQUELÉTICA
- POSIBILIDAD DE COLADO POR CALENTAMIENTO DIRECTO
- AJUSTE EXCELENTE Y SUPERFICIES DE COLADO LISAS

ISO 15912:2016



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

CALIBRA 3D

REVESTIMIENTO FOSFÁTICO ESPECIAL PARA COLADOS DE ESTRUCTURAS DENTALES IMPRESAS EN RESINA 3D.

VENTAJAS

- Dos formatos adaptados para el colado de prótesis fija o esqueléticos, 160 g y 400 g.
- Posibilidad de colado por calentamiento directo
- Ajuste excelente y superficies de colado lisas (grano fino)
- Esqueléticos: no es necesaria la producción del modelo refractario

MODO DE EMPLEO

CALIBRA 3D® debe ser utilizado siempre con su líquido especial de mezcla EXPANSOR puro o diluido.

- Para obtener unos buenos resultados es imprescindible la utilización de medidas precisas.

ATENCIÓN: NO UTILIZAR TAZAS NI RECIPIENTES QUE HAYAN TENIDO CONTACTO CON YESOS.

PROPIEDADES FÍSICAS

Fluidez:	140-160 mm
Fraguado inicial:	6-8 min.
Resistencia a la compresión:	4-6 MPa
Dilatación lineal térmica:	0,97% (900°C)

FORMATO DE VENTA

6638-800	Polvo	50 x 160 g	8 kg
6638-100	Polvo	25 x 400 g	10 kg

6638-M10	Kit Intro	3 x 160 g + 1 x 120 ml	
----------	------------------	------------------------	--

6610-100	Líquido	EXPANSOR	1000 ml
6610-500	Líquido	EXPANSOR	5000 ml

PRODUCTOS RELACIONADOS

ceratomic-R CAST



Resina de impresión 3D para técnica calcinable o de colado.



TENSIO-WAX

Reductor de la tensión superficial para patrones de cera.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com