



TECHNO SIN Tixo

AUTOPOLIMERIZABLES / RESINAS

NUEVO



SI TE HAS QUEDADO
SIN ORTHORESIN*,
¡ÉSTA ES TU SOLUCIÓN!.

*Marca registrada de Degudent-Dentsply



RESINA DE ORTODONCIA DE MODELADO RÁPIDO

- TÉCNICA DE SAL Y PIMIENTA
- FÁCIL MODELADO GRACIAS A SU PROPIEDAD TIXOTRÓPICA (LA RESINA NO SE CAE)
- TRANSPARENTE, LIBRE DE POROS Y NO AMARILLEA



TIPO 1 • ISO 20795-2:2013



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

TECHNO SIN Tixo

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZABLE, PARA LA CONFECCIÓN DE APARATOS DE ORTODONCIA REMOVIBLES. INDICADA PARA LA TÉCNICA DE SAL Y PIMIENTA CON UN COMPORTAMIENTO ESPECIALMENTE TIXOTRÓPICO.

PROPIEDADES

Fácil manipulación, estabilidad cromática, altos valores mecánicos, proceso rápido.

VENTAJAS

- Polimerización rápida
- Transparente
- Libre de poros
- No amarillea

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Verter sobre el modelo 10-20 gotas de líquido y rotarlo de forma que se disperse por toda la superficie, formando una fina película. Si se desea, también se puede aplicar con un pincel.

Espolvorear el polvo uniformemente sobre el modelo húmedo. Sacudir el exceso de polvo. Continuar poniendo capas por el mismo procedimiento hasta conseguir el espesor deseado. Finalizar con una capa de monómero para alisar la superficie.

Seguidamente completar la polimerización en agua a 40-45 ° C y con una presión de 2 bar durante 8-10 minutos.

Para obtener placas libres de poros, introducir el trabajo en la polimerizadora antes de los 6 minutos. Se entiende este tiempo contando desde el primer momento en que entran en contacto polvo y líquido.

En el supuesto de usar modelos impresos en Resina 3D en lugar de modelos de yeso, es preciso aplicar un separador especial para ello, como el **STRATOGEL 3D** (REF. 3280-100).

ACABADO Y PULIDO

TECHNO SIN Tixo se puede acabar y pulir con el método acostumbrado. Recomendamos el uso de las pastas **POLI-R** para el pulido y **POLI-B** para el abrillantado. Las reparaciones se pueden realizar con el mismo material.

FORMATO DE VENTA

9065-M20	Kit Intro	80 g
80 g + 60 ml + dosificador		

9065-020	Polvo	2 x 500 g	1 kg
9065-030	Polvo	8 x 500 g	4 kg

9066-020	Líquido	Botella	500 ml
9066-030	Líquido	Lata	2000 ml

PRODUCTOS RELACIONADOS

ORTOGUIX

Yeso piedra especial para modelos de estudio en ortodoncia.



TECHNOSIL

Separadores para resinas acrílicas.

TECHNOSIL SUPER

Barniz separador con aceites emulsionados, separación eficaz sin espesor.



NEW

STRATOGEL 3D

Gel separador para modelos 3D.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com