

Instrucciones de uso



estado de la instrucción técnica 5/2001

1. General:

- 1.1. Artículo:** Creation-Set cera diagnóstica 760-0000
recambios 6x 8 g 760-1000/2000/3000/4000
IQ4 Cera Diagnóstica, dentina 45g 761-5000
- 1.2. Forma de suministro:** 12 x 8 g latas de ceras diagnósticas de diferentes colores
6 x 8 g latas de ceras diagnósticas de diferentes colores (recambio)
45 g lata de IQ4 Cera Diagnóstica, dentina
- 1.3. Dirección del fabricante:** YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Teléfono.: 0049/7733-9410-0; FAX: 0049/7733-9410-22

1.4. Condiciones para la colocación o depósito:

Depósito con una temperatura de ambiente de entre +10°C y +30°C. Los productos deben ser protegidos de la radiación solar directa. En un ambiente de temperaturas de menos de +8°C (especialmente de menos de 0°C) peligro de roturas. Preservar las cajas de golpes y caídas

2. Uso determinado:

Las diferentes ceras deben ser utilizadas para modelar restauraciones de dientes en un modelo en el labor dental. Después de haber creado una restauración en cera fiel a la forma natural, esta sirve como modelo de ilustración y apoyo óptico para el dentista, el técnico dental y el paciente hasta que el trabajo del técnico dental esté preparado. El técnico iniciante en el laboratorio tiene la posibilidad de aprender la técnica del encerado en capas mediante los diferentes colores.

En el caso de una aplicación no determinada la empresa YETI Dentalprodukte GmbH no asume garantía o responsabilidad.

3. Riesgos y peligros durante el uso:

Tomar precauciones necesarias para asegurar que personas incompetentes (por ejemplo niños) no tengan contacto con el producto.

Evitar gotas de cera calientes en la piel. Evitar la aspiración de los vapores de cera al quemarla (ropa protectora si fuera necesaria)

Se aplique el material apenas por corto tiempo en la boca del paciente, no para uso duradero.

El dentista y el técnico dental deben tomar precauciones para que el paciente no caiga en peligro de atragantamiento, ahogo o quemadura.

Si posible crear un objeto modelado de un tamaño suficiente, que no se puede atragantar

4. Instrucciones de uso:

4.1. Antes del procedimiento:

Abrir el atrancamiento en el lado delantero de la caja.

4.2. Servicio:

Elije los colores para una restauración fiel a la naturaleza según los conocimientos o criterios de la técnica dental y aplicarlos en capas con un instrumento o una espátula eléctrica. Los excesos pueden ser raspadas. Aislar el modelo usado con Yeti Lube 550-0001 antes de empezar el trabajo.

4.3 Después del servicio

Limpiar el objeto modelado. Desinfectarlo antes y después de introducirlo en la boca del paciente. Informarles a otros usuarios sobre esta medida

5. Eliminación:

Para su eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes. En caso de duda consulte a las autoridades competentes

- 6. Garantía:** Los materiales de consumo en todos los casos deben ser usados rápidamente en un tiempo de pocos meses después de abrir el envase original.