


Lea completamente las instrucciones de seguridad antes de operar la unidad. Mantenga este manual del usuario en un lugar seguro para futura referencia.

1. Composiciones


[Fig.1] Unidad de control

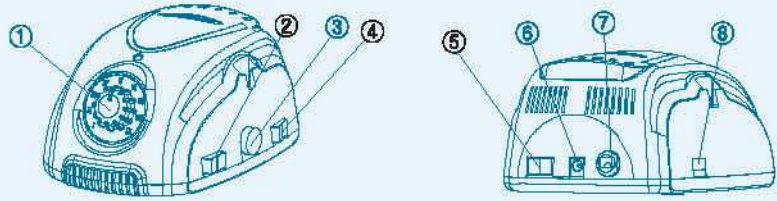

(1) Unidad de control [Fig.1]

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ① Botón de control de velocidad | ⑤ Selector de Mano/Pie |
| ② Interruptor | ⑥ Conector del pedal de pie |
| ③ Conector del motor | ⑦ Cable de alimentación |
| ④ Selector de Adelante/Atrás | ⑧ Selector de entrada de voltaje |


[Fig.2] SDE-H37L1 Pieza de mano

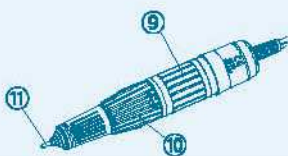

(2) Pieza de mano [Fig.2]

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ⑨ Micro motor | ⑪ Broca de prueba |
| ⑩ Manilla del mandril | |

[Fig.3]

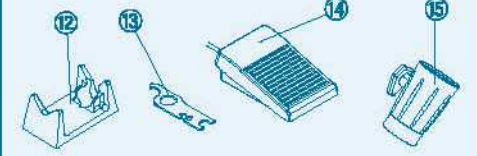

2. Accesorios [Fig.3]

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ⑫ Base de la pieza de mano | ⑭ Pedal de pie (Opción) |
| ⑬ Llave del mandril | ⑮ Soporte de la pieza de |

3. Características

- Rotación Adelante / Atrás.
- Sistema de programación de velocidad a través de pedal.
- Pedal de pie para operaciones de encender-apagar disponible como opción.

4. Precaución

* Se deben leer las siguientes instrucciones de seguridad para evitar posibles riesgos que podrían resultar en daños personales o daños a la unidad.


- Instale la Unidad de control en la habitación con una temperatura adecuada (0~40°C). Usarla en un lugar con demasiado polvo, caliente o húmedo daña la Unidad de control.
- Nunca deje que la Unidad de control se caiga al suelo al sacarla de la caja. Tenga cuidado al usarla.
- Asegúrese de no dejar que la pieza de mano caiga al suelo. Se puede dañar el Cojinete de bola o reducir la durabilidad de la pieza de mano.
- Nunca enchufe o desenchufe el Cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Nunca use un cable de electricidad dañado para evitar descargas eléctricas.
- No meta demasiados cables de alimentación en una toma. Puede causar incendios.
- Asegúrese de no desmontar o alterar las unidades.
- Nunca deje que caiga agua o líquidos sobre o dentro de la unidad de control y micro motor, ya que eso podría causar cortocircuitos, calentamiento anómalo u otros problemas al oxidarse las piezas de metal.
- Considere primero la seguridad del paciente o cliente y opere con cuidado la unidad.
- Solo para uso en tratamiento dental por personal autorizado.
- No use o deje la unidad en un entorno de alta temperatura como la luz directa del sol, en un coche aparcado al sol, cerca del fuego o la cocina.
- Siempre compruebe que no hay piezas sueltas en la unidad, que no vibre, haga ruido y que opere a la temperatura correcta. Compruebe la unidad a distancia antes de usarla en el paciente. Si se detecta alguna anomalía, deje de usarla inmediatamente y llame al distribuidor.
- Coloque siempre la Pieza de mano en su base mientras está en uso.
- Por favor compruebe el Selector de voltaje de entrada ⑧, antes de enchufarlo. La clasificación eléctrica de la Unidad de control es 110V/220V. Si no se usa la clasificación de voltaje autorizada, el producto puede tener problemas.

5. Procedimiento de operación

(1) Montar y quitar la Broca

① Para usar la Pieza de mano H37L1 [Fig.4]

- Para quitar una broca ⑪, gire la Manilla del Mandril en sentido de las agujas del reloj en dirección a la flecha hasta que haga clic al parar y saque la broca.
- Para montar una broca, asegúrese de que el Mandril está en posición abierta, inserte completamente una broca hasta el Mandril y gire la manilla del Mandril en sentido de las agujas del reloj en dirección contraria hasta que haga clic al parar.

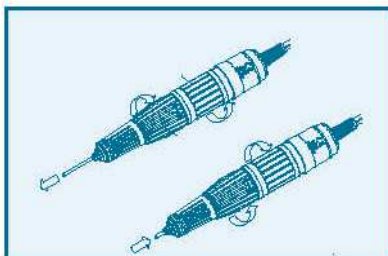

⚠ AVISO

- Siempre limpie completamente el Mandril de pinza y la broca antes del montaje.
- Siempre apague la unidad completamente antes de intentar cambiar el micro motor o la broca.
- Asegúrese de insertar completamente el vástago de la broca, hasta que toca la parte posterior del Mandril de pinza. Después apriete el Mandril de pinza. Es muy peligroso usar la broca cuando no está completamente insertada ya que puede salirse por su propia vibración, sosténgala antes de poner la pieza de Mano en funcionamiento.
- Después de reemplazar una broca hay que asegurarse de que el Mandril de pinza está sujeto.
- No gire la anilla de liberación del mandril del micro motor mientras el motor está en funcionamiento.
- Nunca use brocas dobladas, asimétricas o dañadas. Use siempre brocas estándar. Cuando la Pieza de mano no está en funcionamiento, se recomienda insertar una broca de prueba en el Mandril de pinza de la Pieza de mano.

(2) Operación del motor

- Enchufe el cable del Motor al enchufe marcado como " MOTOR" (③ Conector del motor) en la parte derecha de la unidad de control.
- Coloque el Selector Mano/Pie ⑤ en "H"(MANO) en la parte posterior de la Unidad de control.
- Encienda el Interruptor ② para encender el motor. Apáguelo para apagar el motor.
- Coloque el Selector Adelante/Atrás ⑥ en "FWD"(Led apagado) para operar el motor en dirección Adelante o en "REV"(Led encendido) para operarlo en dirección Atrás.
- Se puede cambiar la velocidad del motor entre 0 y 45.000 rpm por medio del Botón de control de velocidad ①.

⚠ AVISO

- Mientras la Pieza de mano está en funcionamiento, NO trate de ajustar la Manilla del Mandril para evitar daños en la Unidad de control Chuck.
- Antes de operar el Selector Adelante/Atrás para programar una dirección giratoria, es verdaderamente necesario asegurarse de que se ha parado el Micro motor.
- No deje la Pieza de mano parada durante mucho tiempo ya que puede causar problemas o funcionar mal.

(3) Para usar el Pedal de pie

- Conecte el enchufe del pedal ⑭ al enchufe marcado como PIE (Conector del pedal de pie ⑥) en la parte posterior de la Unidad de control.
- Coloque Selector Mano/Pie ⑤ en "F"(PIE).
- Encienda el Botón de control de velocidad ①.
- Pise el Pedal de pie ⑭ para operar el motor.

6. Sistema de protección de seguridad

Para proteger al motor y la unidad de control de temperaturas extremas causadas por sobrecarga como el fallo de un cojinete de bola, una carga mayor en la broca, etc., se activa un sensor de temperatura cuando la temperatura supera el valor predeterminado para apagar el suministro de alimentación.

Cuando este sistema de protección de seguridad funcione, apague la unidad. Reinicie la unidad después de 30 segundos.

7. Resolución de problemas


Problemas	Causa	Solución
El motor no se enciende.	Ⓐ El enchufe del motor no está bien conectado al enchufe de la unidad de control.	Enchufe correctamente el cable del motor.
	Ⓑ Fallo en el cable del motor.	Reemplace el cable del motor.
	Ⓒ Problemas en el motor.	Compruebe el motor y repárelo si hay problemas.
El motor se para de repente mientras está funcionando. (El sistema de protección de seguridad funcionó.)	Sobrecargado, o el Mandril está abierto durante la operación.	Consulte 6. Sistema de protección de seguridad. Compruebe el Mandril y ciérrelo si está abierto.
El motor deja de funcionar cuando se usa el Pedal de pie.	Ⓐ El Selector H/F está en "H".	Colóquelo en "F"
	Ⓑ El Pedal de pie deja de funcionar.	Compruebe y reemplace el Pedal de pie.
	Ⓒ Fallo en el cable del Pedal de pie.	Compruebe y reemplace el Pedal de pie.
	Ⓓ El enchufe del Pedal de pie no está bien conectado al enchufe de la unidad de control.	Compruebe el enchufe y conexión del Pedal de pie.
	Ⓔ El Interruptor está apagado.	Compruebe que el Interruptor esté encendido.

Si se encontró algún fallo, por favor póngase en contacto con el distribuidor donde compró la unidad.


■ Especificaciones

M-3 Champion	Voltaje de entrada	Ciclo	Salida	Peso(g)	Dimensión (mm)		
					W	D	H
	AC 110/220V	50/60Hz	DC 30V, 0.5A	1.234	118	156	78
Pieza de mano H37L1	Voltaje de entrada	Torsión	Max. RPM	Peso(g)	Dimensión(mm)		
					Φ	L	
	DC 30V, 0.5A	300gf-cm	35.000	214	28	153	

[Fig.5] M-3 Champion

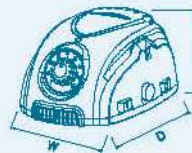

[Fig.6] H37L1

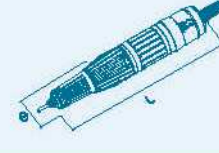

SMT

SAEYANG MICROTECH

100-39, GALSAN-DONG, DALSEO-GU, DAEGU, KOREA
TEL:+82-53-582-9000-2, FAX: +82-53-581-9003
SEOUL TEL: +82-2-775-9023-5, FAX: +82-2-775-9026
http://www.saeayang.com



METAL SUD IMPORT-EXPORT VIA VECCHIA
NAPOLI, 91E 80145 NAPOLI, ITALY

