

VITA YZ® HT: estética con forma precisa

Alta translucidez. Precisión de ajuste. Dióxido de circonio



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 12.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

VITA YZ HT es un dióxido de circonio altamente translúcido que, en virtud de su enorme resistencia (1.200 MPa, aprox.) y su buena conductividad de la luz, está especialmente indicado para restauraciones monolíticas. Resulta, por lo tanto, una alternativa de material económica y estética a

la metalocerámica sin metales nobles y parcialmente recubierta. Para una reproducción exacta del color, VITA YZ HT cuenta con un sistema de componentes coordinados, como los líquidos VITA YZ HT SHADE LIQUID y los maquillajes VITA AKZENT Plus.

VITA YZ[®] HT: estética con forma precisa

Indicaciones

Principalmente para puentes monolíticos altamente resistentes:

- Puentes monolíticos de dientes anteriores y posteriores
- Restauración en condiciones de espacio limitadas

Ventajas

- Resultados precisos gracias a la elevada estabilidad de los ángulos y a resultados de sinterización de excelente ajuste
- Excelente potencial estético gracias a la elevada transparencia
- Piezas en bruto de color dental para una confección eficiente de restauraciones monolíticas
- Tratamiento conservador de la sustancia dental, ya que pueden realizarse grosores de pared reducidos
- Componentes coordinados (p. ej. Liquids/maquillajes) para una reproducción del color exacta

Geometrías

Las piezas en bruto de VITA YZ HT están disponibles


- en geometrías de bloque: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25
- en geometrías de disco: Ø 98,4 en las alturas 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

Colores

Las piezas en bruto de VITA YZ HT están disponibles

- como YZ HT^{White}: sin colorear (blanco), para la coloración individual
- como YZ HT^{Color}: precoloreadas en 1M2, 2M2 y 3M2 (solo en geometría de disco)
- como YZ HT^{Color}: precoloreadas en A1, A2 y A3 (solo en geometría de disco)

Componentes del sistema

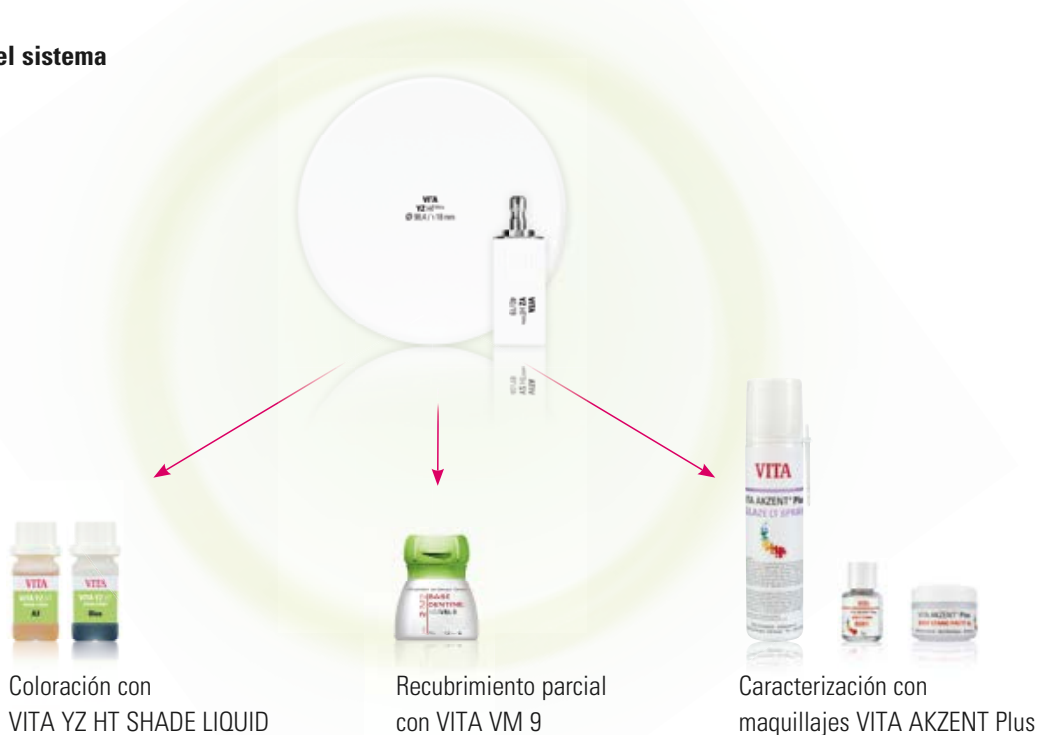

Piezas en bruto de **VITA YZ[®] HT**

Geometrías de disco sin colorear

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 10 mm	1 unidad	ECDY14981000
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 12 mm	1 unidad	ECDY14981200
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 14 mm	1 unidad	ECDY14981400
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 16 mm	1 unidad	ECDY14981600
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 18 mm	1 unidad	ECDY14981800
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 20 mm	1 unidad	ECDY14982000
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	Ø 98,4 / Al 25 mm	1 unidad	ECDY14982500

Geometrías de disco precoloreadas VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981007
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981207
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981407
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981607
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981807
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982007
1M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982507
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981012
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981212
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981412
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981612
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981812
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982012
2M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982512
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981020
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981220
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981420
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981620
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981820
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982020
3M2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982520

Geometrías de disco precoloreadas VITA classical A1–D4®

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981036
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981236
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981436
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981636
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981836
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982036
A1	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982536
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981037
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981237
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981437
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981637
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981837
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982037
A2	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982537
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 10 mm	1 unidad	ECDY24981038
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 12 mm	1 unidad	ECDY24981238
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 14 mm	1 unidad	ECDY24981438
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 16 mm	1 unidad	ECDY24981638
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 18 mm	1 unidad	ECDY24981838
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 20 mm	1 unidad	ECDY24982038
A3	VITA YZ HT ^{Color}	Ø 98,4/Al 25 mm	1 unidad	ECDY24982538

Geometrías de bloque sin colorear

Color	Denominación	Geometría	Contenido	Ref.
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 unidades	EC4Y14007804
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 unidades	EC4Y14008042
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	55/19: 55 x 19 x 19 mm	2 unidades	EC4Y14009842
sin colorear	VITA YZ HT ^{White}	65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 unidad	EC4Y14008401

VITA YZ[®] HT SHADE LIQUID Starter Set classical A1-D4[®] – ref. EZ0CC

Cantidad	Denominación	Tamaño
1 de cada	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	50 ml
1 de cada	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
1 de cada	Pink, Grey, Blue	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Grosor 2 y 4

VITA YZ[®] HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] – ref. EZ0C3D

Cantidad	Denominación	Tamaño
1 de cada	1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2	50 ml
1 de cada	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
1 de cada	Pink, Grey, Blue	20 ml
1	Indicator	10 ml
1	Stabilizer	50 ml
1	Brush Set	Grosor 2 y 4

Nota: Los diferentes artículos del surtido también están disponibles como envase de reposición de forma individual. Para más información y las referencias de los artículos individuales, consulte www.vita-zahnfabrik.com/cadcam.

Compatibilidad de sistemas

VITA YZ[®] HT: SOLUCIONES DE SISTEMA

VITA ofrece VITA YZ HT con un sistema de soporte específico para el sistema CAD/CAM:

- inLab (Sirona Dental GmbH)

VITA YZ[®] HT: SOLUCIONES UNIVERSALES

VITA ofrece VITA YZ HT en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para los sistemas CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie ULTRASONIC (SAUER GmbH/DMG Mori Seiki AG)
- Serie RXD (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Nota: en principio, los VITA YZ HT DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm (incluida la ranura circunferencial).

VITA