

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN PROFUNDIDAD



VELOCE

La solución económica para un cuidado óptimo de tus instrumentos.



Ref. 54893

Velocare

Realiza automáticamente el mantenimiento (lubricación y limpieza) de los instrumentos esenciales para la práctica diaria.

Disponible en dos modelos para adaptarse a distintas necesidades:

- Modelo 1: Diseñado para el mantenimiento de dos turbinas y dos contra-ángulos.
- Modelo 2: Ideal para tres turbinas y un contra-ángulo.


La cantidad de lubricación y el tiempo de servicio adecuado para cada pieza de mano pueden programarse en Velocare, realizando automáticamente el mantenimiento de hasta cuatro instrumentos en un periodo corto de tiempo.

El sistema de insuflación de aire limpio complementa la lubricación y la limpieza del interior de los instrumentos y proporciona un mantenimiento estable sin las variaciones que pueden producirse durante la lubricación manual.

Utilizando los conectores adecuados, Velocare puede usarse con múltiples marcas de rotatorio.

Funcionamiento realmente sencillo.

VELOCE
Andante

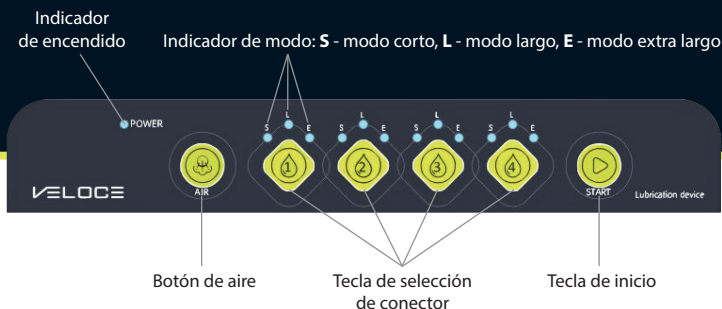

Calidad de mantenimiento óptima para cuatro instrumentos:

1. Conecta el cable de alimentación y enciende la unidad. El indicador de encendido *power* se iluminará. Abre la tapa e instala los instrumentos en los conectores.

2. Selecciona el modo de lubricación. En las teclas de selección de los conectores utilizados, selecciona el modo de lubricación deseado. Modo corto, largo o extralargo: S,L,E.

3. Presiona la tecla de inicio. La máquina iniciará automáticamente los procedimientos de limpieza y lubricación en los conectores seleccionados. Las luces de modo de los indicadores seguirán parpadeando durante el mantenimiento.

4. Al finalizar el mantenimiento, los indicadores de modo dejarán de parpadear y Velocare emitirá un aviso audible.

5. Activación del sistema de soplado de aire: al finalizar el tratamiento, presiona el botón de aire y el sistema inyectará aire a presión en los instrumentos para eliminar el posible exceso de aceite.

Económico en la inversión. Económico en el mantenimiento.



Ref. 54893

Las ventajas saltan a la vista

Velocare garantiza que tu instrumental rotatorio conserve su calidad y valor, ya que solo los instrumentos bien cuidados y con el mantenimiento adecuado pueden ahorrarte costes y seguir perfectos.

El modo automático de dosificación de puestos individuales de Velocare permite la dosificación exacta del spray de cuidado, evitando un consumo excesivo y costes innecesarios.

Además, el sistema Velocare incorpora una innovadora función de soplado, que aplica aire de presión a los engranajes y canales de spray para eliminar restos de aceite y que los instrumentos queden lo más limpios posible.



Ref. 54899

Disfruta de todas sus funciones

- Dispositivo universal (conectable a todas las marcas y adaptadores usuales para aumentar la comodidad en tu día a día.
 - Manejo sencillo para evitar que se produzcan errores en el mantenimiento.
 - Ciclo de mantenimiento de un minuto y medio para cuatro instrumentos.
 - Mantenimiento programable con sistema automático de dosificación de puesto individual con aceite.
 - Botón de soplado de aire para eliminación de exceso de aceite.
 - Sistema sin fugas de aceite residual después de los mantenimientos.
 - Equipamiento básico con cuatro posiciones de mantenimiento.
 - Diseño moderno y ergonómico.
-



Datos técnicos

Velocare

Dimensiones: Anchura 31 cm
 Profundidad 27 cm
 Altura 35 cm

Peso: 7,2 kg
 Tensión de red: 100-240 V
 Frecuencia de red: 50-60 Hz
 Potencia de salida: 60 VA
 Presión de trabajo: 4-6 bar
 Capacidad depósito aceite: 300 ml

1. Entrada del depósito de aceite
2. Panel operativo
3. Cubierta de la puerta
4. Indicador de nivel de aceite
5. Carcasa del dispositivo
6. Botón de ajuste de la presión de funcionamiento
7. Manómetro
8. Filtro de aceite
9. Agujero de sonido
10. Interruptor de alimentación
11. Toma de corriente
12. Caja de fusibles



Ref. 97474

Aceite de lubricación para Velocare

Ideal para el mantenimiento, limpieza y lubricación del instrumental rotatorio, ya que es 100% sintético.

Presentado en envase de 500 ml y con una densidad fina y un agradable aroma a menta.

Calidad incomparable Mayor durabilidad Alta eficacia

Desarrollamos nuestros productos basándonos en 4 fundamentos:

Alta calidad y versatilidad

Nuestro origen alemán nos ha llevado a priorizar la calidad y confort a la hora de diseñar nuestros productos.

Larga vida útil

Los equipos **Veloce** proporciona alta resistencia al desgaste y al deterioro gracias a estar fabricados en materiales de primera calidad.

Precisión

El equipamiento **Veloce** ofrece precisión de alta tecnología tanto en los instrumentos rotatorios como en los profilácticos.

Óptimo mantenimiento

Sus componentes fácilmente desmontables permiten un óptimo mantenimiento de cada pieza.



www.proclinic.es | T. 900 39 39 39 | pedidos@proclinic.es