

Instrucciones de uso para extracción de tornillería con conexión deformada

EXTRACTOR - IP1771

Diseñado para extraer tornillos y pilares de cicatrización con la conexión coronada o deformada. Universal para hexagonales de 1.20, 1.25, 1.27, 1.30, UniGrip y Torx, entre otros tipos de conexión.

EXTRACTOR - IP1772

Diseñado para extraer tornillos con la conexión totalmente deteriorada. Se utiliza cuando el extractor IP1771 no sujeta o arrastra la zona afectada.

Ref. IP1771



Ref. IP1772



PASO 1

Introducir manualmente el extractor recto y alineado en la conexión del tornillo y roscar en sentido anti-horario para posicionar.

PASO 2

Primero probar realizar la extracción manualmente, con el rotor de accionamiento manual. Si no se consigue desenroscar, acoplar la carraca en el extractor y roscar en sentido anti-horario, ejerciendo presión con la llave carraca sobre el extractor.

PASO 3

Cuando el extractor haya anclado en la cona afectada del tornillo, éste se irá desenroscando de forma progresiva.

Instrucciones para la desinfección y esterilización kit extractores implantes

DESINFECCIÓN

Preparación de la solución desinfectante en un vaso de precipitados, siguiendo las indicaciones del fabricante del producto. No se recomienda el uso de desinfectantes enzimáticos.

Proceder a la inmersión del producto en la solución desinfectante, teniendo en consideración no mezclar el instrumental con el contenedor de este, por ser de diferentes materiales.

Someter a baño en cuba de ultrasonidos, a una temperatura de 40° durante 20 minutos.

Proceder al secado de los componentes, se recomienda el soplado con aire comprimido de la base contenedora del instrumental para eliminar los restos de la solución desinfectante existente en los alojamientos del instrumental.

Una vez el material está seco, proceder a la introducción del instrumental en su contenedor.

ESTERILIZACIÓN

Una vez el material ha sido desinfectado, introducir el producto en un envase o bolsa adecuado para su esterilización y que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo. Se recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Los parámetros recomendados según EN-ISO 17665-1 son:

- Temperatura: 134°
- Ciclo de esterilizado: 11'



Last update: 10/2019



Titanimplant, S.L.
C/General Manso 28-38, Local 4
08980 Sant Feliu de Llobregat (Spain)

