

Información de producto

MD 555 cleaner organic

Limpiador especial de sistemas de aspiración



MD 555 cleaner organic - breve descripción

- Detergente especial sin espuma a base de ácido cítrico para instalaciones de aspiración dentales, incluso para sus conducciones de desagüe en casos de agua corriente problemática (por ejemplo, aguas muy duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente.
- Está además especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental especiales, como p. ej. equipos de chorro de polvo, y sus polvos de profilaxis o productos en perlas.
- Extraordinario e intenso poder limpiador. Elimina y evita eficazmente los depósitos por composición desfavorable del agua en instalaciones de aspiración y en superficies resistentes a los ácidos.
- Extraordinaria compatibilidad con los materiales – adecuado para todos los sistemas con separador de amalgama.
- No contiene perfume ni colorantes.
- Complemento ideal para Orotol® plus pH 7, Orotol® plus u Orotol® ultra y MD 550 para la desinfección completa y profunda, limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.

Propiedades

MD 555 cleaner organic es un limpiador especial y sin espuma a base de ácido cítrico para instalaciones de aspiración dentales, incluidas sus conducciones de desagüe. MD 555 cleaner organic no contiene perfume ni colorantes. Se recomienda el empleo de MD 555 cleaner organic en caso de agua corriente problemática (por ejemplo, aguas muy duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente. MD 555 cleaner organic está además especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental específicos, como p. ej. equipos de chorro de polvo. La aplicación periódica de MD 555 cleaner organic previene la formación de incrustaciones en el equipo de aspiración. Se evitan las obstrucciones del equipo de aspiración causadas por el uso de productos profilácticos difícilmente solubles, como polvos de profilaxis o productos en forma de perlas, sobre todo basados en carbonatos cálcicos, y se disuelven las incrustaciones existentes. Gracias a sus componentes de limpieza especiales, MD 555 cleaner organic es especialmente adecuado para las instalaciones con separadores de amalgama. Además, MD 555 cleaner organic puede utilizarse universalmente en cualquier lugar donde deban eliminarse depósitos de aguas duras en superficies.

Composición del producto

MD 555 cleaner organic contiene ácidos orgánicos (40 - 50 %), agentes tensioactivos no formadores de espuma (< 1 %), excipientes.

Aplicación

En caso de agua dura o presencia de restos de polvos profilácticos, aplicar MD 555 cleaner organic periódicamente como solución al 5 % al menos dos veces por semana, p. ej. por la mañana antes del primer tratamiento o durante la pausa del almuerzo. A 100 ml o 5 tapones de MD 555 cleaner organic se añade agua hasta 2 litros y se aspira 1 litro, p. ej. utilizando OroCup. Verter el resto de la solución en la escupidera. El tiempo de actuación es de al menos 30 min. y se puede prolongar en caso necesario, p. ej. en caso de carga elevada hasta 120 min. Como alternativa se puede utilizar MD 555 cleaner organic a diario en forma de solución al 5 %. En este caso, el tiempo de actuación es de al menos 5 min. y se puede prolongar en caso necesario, p. ej. en caso de carga elevada hasta 15 min. Aplicar MD 555 cleaner organic en casos problemáticos, p. ej. para el saneamiento de sistemas de aspiración intensamente contaminados con biofilms, alternándolo en este caso con desinfectantes eficaces de la familia Orotol®, al menos dos veces por semana con una concentración del 10 % (a 200 ml o 10 tapones de MD 555 cleaner organic añadir agua hasta obtener 2 l

Información de producto

MD 555 cleaner organic

Limpiador especial de sistemas de aspiración

de solución y aspirar 1 l). Verter el resto de la solución en la escupidera. El tiempo de actuación en este caso es de 1 - 2 h.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Vida útil

No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa.

Presentación

Botella de 2,5 l

Botella de 1 l

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Accesorios

OroCup

Notas generales

No mezcle MD 555 cleaner organic con otros productos. Antes y después de las diferentes aplicaciones de MD 555 cleaner organic, el sistema de aspiración se debe aclarar a fondo con al menos 1 litro de agua. MD 555 cleaner organic no es adecuado para el uso en superficies sensibles a los ácidos como el aluminio y otras superficies sensibles a los ácidos. No deje actuar la solución MD 555 cleaner organic durante toda la noche. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad limpiadora del producto. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

MD 555 cleaner organic está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Concentrado: valor de pH: < 1,0

Solución de trabajo (5 %): valor de pH: 1,5 - 2,5

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.



Distribuida por

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Alemania
www.duerrendental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Alemania
www.orochemie.de
info@orochemie.com