

ISO LAB

Finalidad:

LIMPIADOR ESPECIAL PARA AUTOCLAVES MÉDICOS. Producto listo para su uso en la limpieza y mantenimiento interior de autoclaves, así como las bandejas de acero inoxidable. Elimina manchas y residuos persistentes. Secado rápido. Prolonga la vida del autoclave.

Instrucciones de uso:

Producto listo para su uso, con pulverizador. Aplicar sobre el acero, dejar actuar unos segundos y limpiar con esponja o bayeta. No necesita aclarado.

Advertencias:

Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente, consultar al servicio médico de información toxicológica, tel.: 915620420. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Propan-2-ol.

Restringido a USO PROFESIONAL.



IFU ISO LAB



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
SRN: ES-MF-000033270