

ABRILLANTADOR PARA MODELOS EN YESO

En primer lugar, es indispensable que el modelo este bien seco, si es necesario, ayudarse con un secador de infrarrojos.

En una taza se vierte el contenido de la confección de abrillantador LEONE (R4520-00), donde se sumergirá el modelo durante 20/30 minutos, una vez transcurridos, se quita el modelo y se enjuaga con agua corriente. Dejar secar el modelo al aire durante al menos 12 horas o secarlo con secador infrarrojos. Se aconseja no exponer demasiado tiempo al calor, para no correr el riesgo de que amarillente.

Una vez esta bien seco, abrillantar el modelo con una esponja o paño de algodón.

Usando este producto, obtendrá superficies plásticas y de aspecto brillante que las protegerá en el tiempo.