


Problemas de ortodondia en adultos

Muchos adultos han tenido brackets, sólo para que sus dientes se apiñen de nuevo. La mayoría de los adultos no quieren usar los brackets. Hábitos como la respiración bucal y tragar incorrecto (conocido como los malos hábitos miofuncionales) son las causas principales de los dientes torcidos.

La investigación muestra que después de los 15 años de edad, cuando todos los dientes permanentes están presentes y las mandíbulas han dejado de crecer, el hueso alrededor de los dientes es más duro. Trabajo dental en pacientes mas grandes en edad, dientes pueden ser más susceptibles a los daños con aparatos de ortodondia.

En tratamiento de ortodondia tradicional en adulto, todos estos factores pueden contribuir a resultados menos estables y probablemente criados a largo plazo o retenedores permanentes, siendo necesarios si los malos hábitos orales pobres no se han corregido.

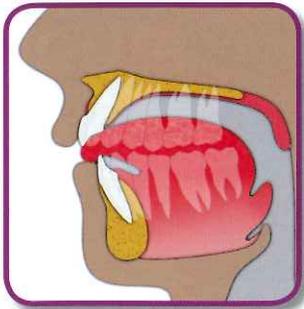

Ortodondia con brackets es la única opción de tratamiento?

Desde 1989 *Myofunctional Research Co. (MRC)* han desarrollado aparatos que proporcionan una opción más eficaz para el niño en crecimiento con problemas de ortodondia. Los aparatos están diseñados no sólo para enderezar los dientes, sino también para el tratamiento de las causas subyacentes de los dientes torcidos corrigiendo malos hábitos orales como respirar por la boca, sacar la lengua y la deglución incorrecta.

A diferencia de ortodondia tradicional, el objetivo principal del enfoque de el tratamiento *MRC* es lograr dientes rectos por vida - a menudo sin necesidad de brackets o retenedores. Tratando las causas de los dientes torcidos también mejora la salud en general y permite a los pacientes a alcanzar su máximo potencial genético.

Myobrace® para Adultos

Myobrace® para Adultos es un sistema de aparatos de tres etapas diseñado para tratar mandíbulas mal alineadas y los dientes torcidos en adultos.

Los aparatos *Myobrace® para Adultos* incorpora muchos de los diseños de aparatos principios probados de *MRC*, incluyendo las características que permiten corregir los pobres hábitos orales, mientras que la aplicación de fuerzas ligeras alinean los dientes en su posición correcta.

Consideraciones de tratamiento

El tiempo de tratamiento puede variar en función de la adaptabilidad biológica de cada paciente. Para obtener un resultado satisfactorio del aparato *Myobrace®* debe ser usado diariamente durante 1-2 horas y durante la noche mientras duerme.

El control regular de su dentista o ortodondista es esencial para el éxito del tratamiento y evitar complicaciones del tratamiento no deseados.

Myobrace® para Adultos puede ser una solución sencilla y eficaz para el tratamiento de maloclusiones en los adultos, a menudo sin necesidad de brackets.

Dientes normales contra apiñados

La función de la lengua, las mejillas y los labios determina la posición de los dientes. Crecimiento facial correcta depende de la función correcta y patrones de respiración.



APIÑADOS
ARCADA SUPERIOR

NORMAL
ARCADA SUPERIOR

NOTA: TAMAÑO DEL DIENTE NO HA CAMBIADO

Myobrace® para Adultos características de diseño



Poliuretano de dureza media - para un mejor desarrollo del arco.

Canales de dientes - Alinear los dientes frontales.

Lingüeta - entrena la posición de la lengua correctamente.

Bumper Labial - entrena el labio inferior.

Myobrace® para Adultos funciona mejor con expansores de arco tales como el **Farrell Bent Wire System™ (BWS™)** para los casos más graves.



BWS™: The *Farrell Bent Wire System™ (BWS™)* es un aparato hilo luminoso hilos que produce el desarrollo del arco cuando se utiliza en combinación con aparatos de *MRC*. En la imagen con el *Myobrace®* aparato A2®.

¿Cómo funciona?

MRC ha sido pionera en el uso de aparatos para corregir hábitos miofuncionales en niños en crecimiento y ha demostrado el éxito en la corrección de ortodoncia sin brackets. Este tratamiento también puede conducir a un mejor desarrollo facial. La clave de este tratamiento es la corrección de la posición y la función de la lengua, obtención de correcta respiración de la nariz y el reentrenamiento de los músculos orales para funcionar correctamente.

A pesar de que estas correcciones son más difíciles en pacientes adultos, los principios de tratamiento son las mismas para obtener resultados óptimos.


Objetivos del tratamiento:

- Los labios juntos en todo momento, excepto cuando habla o come.
- Respire por la nariz, para ayudar al desarrollo de los maxilares superior e inferior, y para lograr la mordida correcta.
- No hay actividad labial al tragar, lo que permite que los dientes frontales se desarrollan correctamente.
- Mejora la alineación dental.
- Mejora el desarrollo facial.


Para que el Myobrace® trabaje, debe corregir sus malos hábitos miofuncionales.



El punto correcto
Posición correcta de reposo

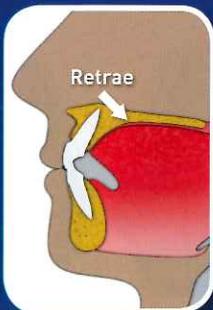

Retrae
Patrón de tragar correcta

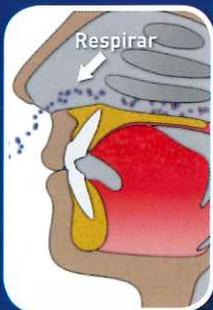

Respirar
Conciencia de respirar

Otros sistemas Myobrace®:



Hay sistemas Myobrace® adecuados para una amplia gama de edades y necesidades de los pacientes.

- Myobrace® para Juniors edades 3 - 5
- Myobrace® para Kids edades 5 - 10
- Myobrace® para Teens edades 10 - 15

Hable con su médico hoy mismo acerca de Myobrace®, o visite myobrace.com.

myobrace®

Para obtener más información, visite www.myobrace.com
MYOBACE® POR MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.

Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: (31) 416 651 696 Fax: (31) 416 652 745
Email: info@myoresearch.nl www.myoresearch.com

myobrace®

PARA ADULTOS

Dientes rectos, sin brackets.

Aprenda más acerca de sus opciones de tratamiento.



www.myobrace.com