

SISTEMA DE PROFILAXIS DE ALTA TECNOLOGÍA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS NO INVASIVOS

LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER



PORQUE HAY QUE OBSERVAR EL SISTEMA COMPLETO

Los odontólogos deben conocer el sistema de profilaxis completo, para ofrecer el tratamiento más adecuado a sus pacientes. Dürr Dental ha desarrollado algo impresionante: Un sistema para la prevención de la salud bucal general, así como para la prevención y terapia de periodontitis o periimplantitis. Un sistema que no ofrece ningún otro fabricante en el mercado: Lunos®.

Para desarrollar este sistema de profilaxis, Dürr Dental estudió tratamientos, procesos, información, opiniones y cualquier detalle que formara parte de los tratamientos profilácticos. Así, gracias a nuestra capacidad de ingeniería e investigación, pudimos desarrollar nuestros novedosos polvos profilácticos y pastas de pulido para proteger los dientes y eliminar las manchas.

Lunos® ha nacido pensando en las necesidades del paciente, así como también en las necesidades de la clínica. Un sistema personalizable y completo.

LUNOS[®]

MAKING SMILES BRIGHTER



PORQUE LA PREVENCIÓN ES LA BASE DE LA SALUD BUCAL.


Cada vez más, todos nosotros cuidamos y mimamos nuestra boca para que esté sana. La profilaxis es la base de este cuidado y prevención. En seis pasos, Dürr Dental consigue cubrir todos los aspectos de la profilaxis dental con productos especialmente pensados para ello como nuestra punta Perio MyLunos® para realizar tratamientos peridontales con polvo. O las tecnologías de visualización de imágenes, como nuestra VistaCam que registra, edita y almacena imágenes orales.






PORQUE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO FORMAN PARTE DE LA SALUD BUCAL

La odontología preventiva tiene sus límites. Son muy frecuentes los problemas periodontales, de manera que, en muchos casos, es necesario realizar un tratamiento periodontal. Para ello, hemos desarrollado productos Lunos® que te ayudarán de manera muy sencilla en los tratamientos supra y sub gingivales.

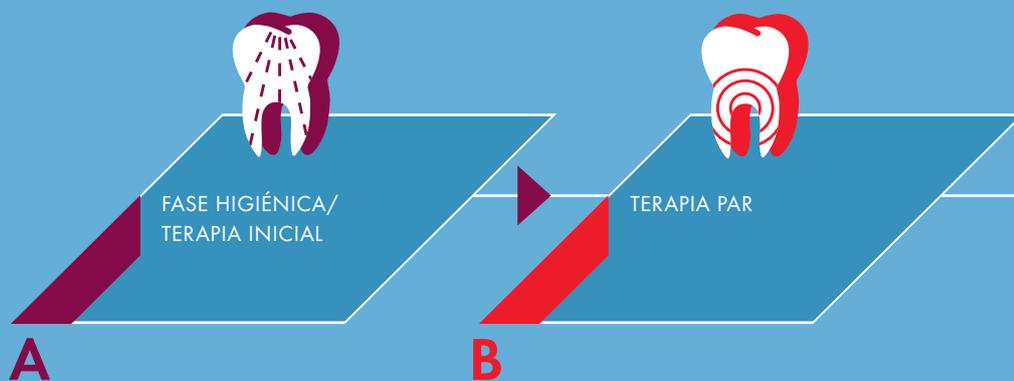

Dürr Dental ayuda a los pacientes, odontólogos y personal auxiliar con tratamientos cuidadosos, suaves y mínimamente invasivos. Con los tratamientos peridontales de mantenimiento se protege al paciente contra un avance de periodontitis.

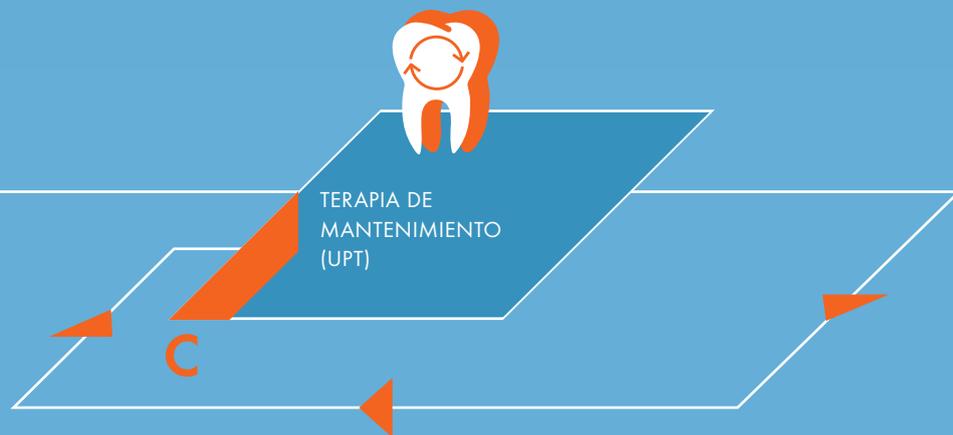

VISTA GENERAL DE TODOS® LOS PR

PREVENCIÓN




P. 18 VistaCam iX HD Smart

P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio

P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluido de pulido
P. 14 MyLunos®
P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis

TRATAMIENTOS

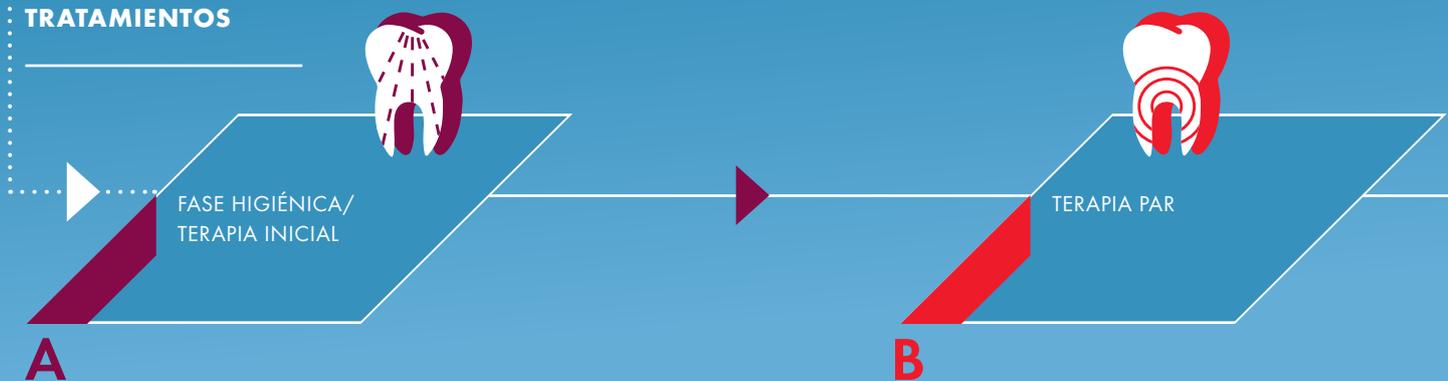

P. 18 VistaCam iX HD Smart
P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio
P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluid Polish
P. 14 MyLunos®
P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis

P. 17 Lunos® Pasta pulidora
P. 17 Lunos® Anillo profiláctico
P. 18 Lunos® Gel de fluoruro
P. 19 Lunos® Paño profiláctico

P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio
P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluido de pulido
P. 14 MyLunos®
P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis
P. 19 Lunos® Paño profiláctico

ODUCTOS LUNOS



- P. 14 MyLunos®
- P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
- P. 17 Cánula de profilaxis
- P. 17 Lunos® Pasta pulidora
- P. 17 Lunos® Anillo profiláctico

- P. 19 Lunos® Sellado de fisuras
- P. 18 Lunos® Gel de fluoruro

- P. 19 Lunos® Paño profiláctico
- P. 18 VistaCam iX HD Smart



- P. 18 VistaCam iX HD Smart
- P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
- P. 18 Lunos® Colutorio
- P. 12 Vector® Sistema
- P. 12 Vector® Fluid polish
- P. 14 MyLunos®
- P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
- P. 17 Cánula de profilaxis

- P. 17 Lunos® Pasta pulidora
- P. 17 Lunos® Anillo profiláctico
- P. 18 Lunos® Gel de fluoruro
- P. 19 Lunos® Paño profiláctico

SI LOS MEJORES TRABAJAN JUNTOS.

MyLunos® y Vector® son el equipo perfecto para la prevención y contra cualquier tipo de enfermedad periodontal. El sistema Lunos® ofrece todo lo necesario para el tratamiento aeropulidor con polvo, pulido, protección, fortalecimiento y sellado. Vector® es especialista en limpiezas suaves pero efectivas con ultrasonidos.



No importa si supra o subgingival, el equipo de MyLunos®, Vector® Paro y Vector® Scaler ofrece todo lo necesario para eliminar placas duras y biofilm.



EL PRINCIPIO VECTOR® – UNA COMBINACIÓN DE DISEÑO Y FUNCIÓN.

Después de 20 años sigue siendo el referente en la tecnología de ultrasonidos mínimamente invasiva e indolora: la técnica de vibración lineal de Dürer Dental. Esta ingeniosa pieza de tecnología está integrada en el Vector® Paro. Ampliada por una gran selección de instrumentos y de accesorios útiles, el Vector® será un gran aliado en los tratamientos de ultrasonidos no invasivos. Un gran sistema de alta tecnología.

AMPLIACIÓN INNOVACIONES



Vector® Fluid polish apoya, junto con el sistema Vector®, mediante un tratamiento indoloro la limpieza de la superficie de los dientes, de dientes postizos y de raíces.

LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

SISTEMA INNOVADOR



Varios accesorios completan el sistema Vector®. Todos los componentes se encuentran en el folleto Vector® de Dürer Dental.



TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

Pieza manual Paro con la técnica de vibración lineal para tratamientos subgingivales cuidadosos. La moderna tecnología de scaler con 6 LEDs permite la mejor vista general en la aplicación supra y subgingival.



INDEPENDENCIA

Un depósito de agua grande y desmontable permite trabajar sin una conexión fija de agua.



DISEÑO

Ambas piezas de mano convienen por su facilidad de manejo.



SENCILLEZ E HIGIENE PERFECTA

El sistema garantiza un manejo intuitivo. Las superficies no presentan ranuras, cumpliendo los máximos requisitos de higiene. El dispositivo recuerda automáticamente la limpieza regular y permite enjuagar las tuberías con mayor facilidad. Es posible preparar las piezas manuales y los instrumentos de manera manual o automática.



PRÁCTICO, VERSÁTIL Y CON PERSONALIDAD.

La pieza manual de chorro de agua-polvo* MyLunos® ayuda a eliminar manchas, depósitos y biopelículas gracias a su ligereza, robustez y ergonomía. En función de la punta y del polvo, se puede usar para la aplicación subgingival o supragingival. La cámara de polvo extraíble se puede cambiar rápidamente para que siempre se pueda usar el polvo exacto que se necesita. Se sigue una lógica de sistema de forma consecuente, desde la preparación y la aplicación, hasta el tratamiento y la preparación posterior. MyLunos® ofrece una gran flexibilidad y eficiencia, ya que se ha desarrollado como un sistema global.

TRATAMIENTO SUPRA Y SUBGINGIVAL

La pieza manual de chorro de agua-polvo MyLunos® permite la máxima libertad de tratamiento. Mediante un cambio rápido de las puntas se garantizan tratamientos sin complicaciones: tanto para la eliminación supragingival de manchas o la limpieza subgingival de superficies radiculares o de implantes.



PERFECTA ERGONOMÍA

Una ergonomía perfecta se basa en varios factores: peso, centro de gravedad, material, forma, tacto, dimensiones. MyLunos® cumple todas ellas. La superficie es antideslizante, la forma se adapta perfectamente a la mano. Con ello, MyLunos® ofrece una alta ergonomía con todas las puntas.



* Disponible para acoplamiento de turbina de KaVo, Sirona, W&H, BienAir y NSK.

CAMBIO DEL RECIPIENTE DE POLVO

Especialmente fácil de cambiar con el cierre de bayoneta, incluso durante el tratamiento. Puede olvidarse de las interrupciones de trabajo o la reducción de potencia debido a un escaso nivel de llenado. También es posible trabajar con diferentes polvos, en función de la necesidad.



PREPARACIÓN DE LOS RECIPIENTES

Gracias al cierre de válvula seguro pueden llenarse previamente los recipientes. Para ello, los soportes inteligentes permiten un llenado y almacenamiento flexibles. Los recipientes están disponibles en cinco colores diferentes. Cada color indica claramente una de las cinco variantes del polvo profiláctico Lunos®.



LA PIEZA DE MANO Y LOS COMPONENTES INDIVIDUALES PUEDEN DESINFECTARSE Y ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE

Los componentes de la pieza de mano son de plástico termorresistente. Y, por lo tanto, pueden desinfectarse cómodamente por calor o en autoclave.



SUAVES Y EFECTIVOS – POLVOS Y PASTAS LUNOS®.

Desde hace 20 años, la odontología preventiva y la protección del tejido regenerativo son la principal línea de investigación a la hora de desarrollar los productos de Dürr Dental. En los Polvos profilácticos y las pastas pulidoras Lunos®, nuestra máxima prioridad es la protección de la estructura dental sensible y, al mismo tiempo, obtener una limpieza efectiva. Presentan una abrasión extremadamente baja en el esmalte dental y la dentina y, por tanto, pueden utilizarse como parte de los tratamientos habituales de mantenimiento. Esto no solo protege la superficie dental, sino ahorra valioso tiempo de tratamiento para el personal dental y permite así un mayor confort en los pacientes.



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS® POLVO PROFILÁCTICO GENTLE CLEAN

03 04 A B C // P. 08-09

Para la limpieza supragingival y la eliminación de manchas extrínsecas.

Innovadora molécula abrasiva de Trehalosa:

- Tamaño de partícula aprox. 65 µm
- No irrita las membranas mucosas

Perfecta solubilidad en agua:

- No deja residuos de polvo en la boca del paciente
- Protege todo el sistema de aspiración

Botella ergonómica con cierre de palanca manejable con una sola mano

Está disponible en los sabores neutro, naranja, menta y frutos silvestres.

Unidad de venta: 4x 180 g

LUNOS® POLVO PROFILÁCTICO PERIO COMBI

03 04 A B C // P. 08-09

Para la eliminación de película subgingival y la limpieza supragingival. Ideal para tratamientos de mantenimiento.

Innovadora molécula abrasiva de Trehalosa:

- Tamaño de partícula aprox. 30 µm
- No irrita las membranas mucosas

Ideal para tratamientos de mantenimiento

Perfecta solubilidad en agua:

- No deja residuos de polvo en la boca del paciente
- Protege todo el sistema de aspiración

Botella ergonómica con cierre de palanca manejable con una sola mano

Sabor: neutro

Unidad de venta: 4x 100 g

El cabezal de la punta de la cánula gira completamente. Esto permite una aspiración especialmente efectiva del polvo proyectado.



CÁNULA DE PROFILAXIS

03 04 A B C // P. 08-09

Una cánula protectora giratoria y autoclavable, desarrollada especialmente para captar una gran cantidad de aerosoles y aspirar en posición ergonómica y especialmente eficaz durante tratamientos profilácticos con aparatos de proyección de polvo.

- Duplica la entrada de aerosol en comparación con las cánulas tradicionales
- Previene la irritación de las membranas mucosas causada por el aerosol
- Tratamiento ergonómico
- Entradas de aire externo Protect para evitar el reflujo



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS® PASTA PULIDORA TWO IN ONE

04 A C // P. 08-09

Innovadora solución dos en uno: elimina manchas y pule, todo en uno. Ahorra tiempo, protege el esmalte dental limpiando en profundidad.

Abrasividad decreciente de la pasta por partículas de pulido autorreductoras



- Se puede utilizar en cualquier tipo de tratamiento como parte de las medidas de limpieza profesionales supragingivales
- Limpieza y pulido efectivos gracias a un sistema innovador de pulido y de abrasión.
- Protege la sustancia, RDA 28*
- El sabor a menta también contiene fluoruro de sodio
- La hidroxiapatita favorece la remineralización

Sabores: neutral, naranja y menta

Unidad de venta: 1x 100 g



LUNOS® ANILLO PROFILÁCTICO

04 A C // P. 08-09

Para la aplicación sencilla y ergonómica de pasta pulidora. Tamaño flexible del anillo.

- El recipiente innovador de pasta de pulido se adapta a cualquier modo de trabajo
- Anillo ergonómicamente formado para el máximo confort de uso
- El recipiente de la pasta de pulido sin bordes se puede limpiar con mucha facilidad después del tratamiento

Unidad de venta: 8 unidad



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS® PASTA PULIDORA SUPER SOFT

04 A C // P. 08-09

Pasta pulidora de protección permanente, también para superficies especialmente sensibles.

- Puede usarse de manera universal, también en implantes, aparatos KFO y en prótesis
- Genera superficies lisas y relucientes y el sarro no se adhiere con tanta facilidad
- La hidróxilapatita limpia y pule de una manera extremadamente suave y favorece la remineralización
- RDA < 5*

Sabores: neutral y naranja

Unidad de venta: 1x 50 g

* Siga las instrucciones para su uso

SALUD DENTAL Y MÁXIMA COMO



VISTACAM IX HD SMART

01 06 A C // P. 08-09

El sistema de cámaras le ofrece una ayuda fiable a la hora de realizar el diagnóstico, así como en la visualización de la placa. Muestre a sus pacientes durante la limpieza dental profesional indicando dónde debe limpiar más minuciosamente. Gracias al proceso fluorescente, solo se necesita la cabeza intercambiable Proof para visualizar el sarro y la placa. Las tomas antes y después explican al paciente la necesidad y el valor añadido de la limpieza profesional de dientes. El sistema de cámaras con cabezas múltiples es un enriquecimiento real para cualquier clínica, tanto durante el asesoramiento al paciente como para facilitar el diagnóstico.



LUNOS® COJÍN PROFILÁCTICO

02 A B C // P. 08-09

Para apoyar la cabeza cómodamente y con seguridad. Sirve de respaldo para el cuello y la nuca.

- Se fija fácil y rápidamente al reposacabezas de la unidad de tratamiento con una cinta de velcro
- La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al calor del cuerpo y se adapta a cada paciente
- Funda suave, impermeable y que no irrita la piel
- Se puede lavar y desinfectar

Unidad de venta: 1 unidad

LIBRE DE:

- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ ALCOHOLES



LUNOS® COLUTORIO

02 A B C // P. 08-09

Colutorio listo para su uso que protege dientes y encías. Sus aceites esenciales proporcionan un aliento fresco.

- Contiene fluoruro de sodio
- Sin azúcar, con xilitol
- Sin alcohol

Unidad de ventas: 1 unidad de 2,5 litros
Bomba dosificadora disponible para la botella de 2,5 litros extra

LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA



LUNOS® GEL DE FLUORURO

05 A C // P. 08-09

Para la profilaxis de caries y remineralización con fluoruro de sodio. Reduce la sensibilidad incrementada de los dientes y de los cuellos dentales.

- Para remineralizar el esmalte dental
- De fácil y rápida aplicación
- Contiene 12 300 ppm de fluoruro

Unidad de venta: 1x 250 ml

DIDAD



LUNOS® SELLADO DE FISURAS

05 // P. 08-09

Para un sellado estético y de alta calidad de fisuras y defectos del esmalte a base de composite.

- Tolerante a la humedad e hidrófilo
- Aplicaciones en superficies dentales húmedas o ligeramente secas, humectación efectiva del esmalte dental
- Excelentes propiedades de fluido
- Fotopolimerizante

Disponible en:

Opaque (con fluoruro)

Unidad de venta: 2x 1,5 g inyecciones



LUNOS® TOALLITA PROFILÁCTICA

06 A B C // P. 08-09

Toallita húmeda refrescante, ideal para la limpieza facial después del tratamiento profiláctico.

- Uso individual para cada paciente
- Se puede aplicar en frío y en caliente
- Cuida la piel, con aloe vera

Unidad de venta: 50 paños, embolsadas individualmente



LUNOS® CART

Permite el uso móvil por toda la sala de tratamiento y puede colocarse de manera flexible y según se necesite.

- Cajón con cierre suave y compartimentos para almacenar material de tratamiento
- Canal para cables cubierto para un almacenamiento óptimo del cable con enchufe múltiple flexible incorporado
- Ruedas silenciosas con freno de bloqueo
- Ideal para el sistema Vector® Unidad ultrasónica



LUNOS® FOLLETOS DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE

A C // P. 08-09

Le apoyamos durante la educación de los pacientes acerca de la limpieza odontológica profesional con folletos gratuitos con informaciones para pacientes.

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
C/Serra de la Salut, 11 - Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Reservado el derecho de efectuar modificaciones

