

10% y 16% peróxido de carbamida sistema avanzado de blanqueamiento dental

NORBLANC HOME es un gel de blanqueamiento dental, con alta viscosidad y pH neutro para usar en el hogar. Es un gel cristalino de agradable sabor y liberación mantenida. La combinación exclusiva de acondicionadores, calmantes junto a su alto contenido en agua, ayudan a reducir la sensibilidad.

INGREDIENTES:

Glycerin, Aqua, PEG-12, Carbamide Peroxide, Carbomer, Sodium Hydroxide, Aroma, Sodium Fluoride.

OPCIONES DE TRATAMIENTO:

Norblanc Home:

10%: 6-8 horas por la noche

16%: a) 2x40 minutos/día

b) 1x90 minutos/día

Debe tenerse en cuenta que los pacientes con sensibilidad necesitarán un día o dos entre tratamientos. También se sugieren tiempos de tratamientos más cortos.

EQUIVALENCIA A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO:

• Norblanc 10% de peróxido de carbamida = 3.6% de peróxido de hidrogeno.

• Norblanc 16% de peróxido de carbamida = 5.7% de peróxido de hidrogeno.

INSTRUCCIONES:

Cepille y utilice seda dental en sus dientes. Tome una jeringa del kit. Quite la tapa e inserte un tip de aplicación girándolo para asegurarlo dentro de la jeringa.

- 1) Coloque una pequeña gota de gel dentro de cada compartimento de la cubeta, para los dientes a tratar.
- 2) Asegúrese de ajustar la cubeta en la boca
- 3) Elimine los excesos de gel en su boca con los dedos, gasa o un cepillo suave y seco.
- 4) Después del tratamiento saque la cubeta de la boca. Lave la cubeta y la boca con agua tibia, para evitar sensibilidad.
- 5) Cepille sus dientes.

PRECAUCIONES:

• Venta exclusiva a odontólogos.

En cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a odontólogos cualificados, o tendrá lugar bajo su supervisión directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor para completar el ciclo de utilización.

No utilizar en menores de 18 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

Los pacientes que presenten antecedentes alérgicos a cualquier componente de esta formulación deberán someterse

previamente a un test por parte de un especialista.

Si usted siente cualquier sensibilidad o sensaciones inusuales, suspenda el tratamiento y consulte a su dentista.

Use a temperatura ambiente

No use después de la fecha de vencimiento

No fume durante o inmediatamente después del proceso de blanqueamiento dental.

Cuando la jeringa se termine retire la punta de aplicación y coloque la tapa asegurándola firmemente, deséchela. En caso de una jeringa usada a medias, refrigérela. Si la punta de aplicación va a ser reutilizada lávela con agua caliente.

Después de quitarse la cubeta, lávese la boca y cepille los dientes antes de comer o beber.

Deben evitarse, como mínimo durante 48 horas, aquellas comidas y bebidas que contengan colorantes fuertes. Durante el tratamiento, debe evitarse o consumirse con moderación, el café, las bebidas o los dulces coloreados.

Nunca inyecte NORBLANC HOME en el cuerpo.

Mantenga las jeringas sin usar refrigeradas

Ficha de datos de seguridad disponible en www.normon.es o solicitándola a su representante regional

PRIMEROS AUXILIOS:

• Ojos (contacto): Evitar el contacto con los ojos, y en caso de entrar en contacto, lavar inmediatamente con agua.

Consultar un médico, si los síntomas persisten.

• Piel (contacto): Lave inmediatamente con agua y procure buscar consejo médico si los síntomas persisten.

• Ingestión (gran cantidad) – beba bastante agua o leche y busque consejo médico

CONTENIDO:

4 Jeringas de 3g

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

• Conservar en un lugar fresco protegido del sol (2°-25°C / 35°-77°F).

NORBLAHO/3

Distribuido por:



NORMON
DENTAL

Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos. Madrid. España.
Tel.: 91 806 52 40. Fax: 91 806 52 56

Importado por:

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry. Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577
Producto fabricado en AUSTRALIA