

Puntas PIEZO. Apúntese a la variedad.





Puntas PIEZO Scaler

- Para la eliminación de concreciones supragingivales y subgingivales en todos los cuadrantes
- Aplicación en espacios interdentales, en la zona del surco y en las superficies radiculares
- Eliminación efectiva y rápida de sarro dental y tratamiento de profilaxis.

PiezoLED

PIEZO^{soft}

Profilaxis

PIEZO Scaler 201

Punta de raspado universal

- Para la eliminación de sarro dental supragingival en todos los cuadrantes
- Trabajar desde el borde incisal hacia la zona del surco
- Uso en posición tangencial con respecto a la pieza dental
- Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta



PIEZO Scaler 203

Punta Perio de filigrana

- Para la eliminación de incrustaciones subgingivales en las superficies radiculares
- Apta para bolsas dentales profundas y tratamientos de control periodontales
- Uso en posición tangencial con respecto a la pieza dental
- Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta
- Tratamiento suave (niños)



PIEZO Scaler 202

- Eliminación de concreciones supragingivales y subgingivales hasta una profundidad de hasta 4 mm en todos los cuadrantes
- Indicado especialmente para espacios interdientales y la zona del surco
- Uso en posición tangencial con respecto a la pieza dental
- Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta



Profilaxis



Puntas PIEZO Perio

- Puntas diamantadas para la limpieza radicular y el pulido de superficies
- Puntas curvadas hacia la izquierda y derecha para superficies proximales de difícil acceso.
- Acceso idóneo a todas las bolsas

PiezoLED

Periodontología



PIEZO Perio 210

Punta diamantada con un grano de 15 µm

- Para el pulido de superficies tras la limpieza y modelado
- Para la limpieza radicular profunda bajo visibilidad directa
- Alisado de los excesos de las restauraciones
- Ampliación de los techos de bifurcación
- Pulido de superficies tratadas anteriormente con Piezo Perio 211



PIEZO Perio 211

Punta diamantada con un grano de 70 µm


- Para la limpieza radicular profunda bajo visibilidad directa
- Alisado de los excesos de las restauraciones
- Ampliación de los techos de bifurcación



PIEZO Perio 212 y 213

Punta curvada hacia la izquierda y la derecha para el desbridamiento periodontal

- Especialmente adecuada para superficies proximales de difícil acceso (lingual, bucal) y para bifurcaciones radiculares
- Utilizar la superficie lateral de las puntas

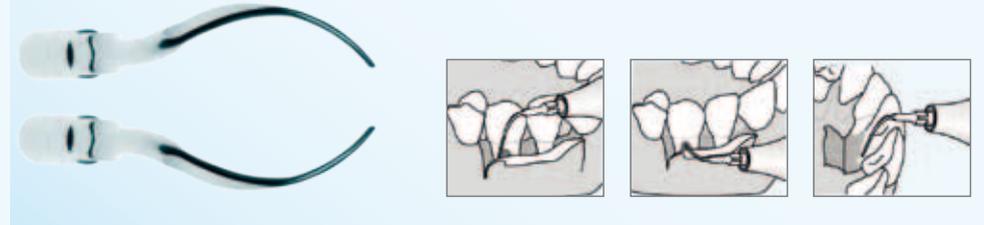

PIEZO Perio 214

- Para el enjuague y desinfección de bolsas gingivales en todos los cuadrantes
- Apta especialmente para tratamientos de control y de repetición
- Uso en posición tangencial con respecto a la pieza dental
- Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta



Periodontología



Puntas PIEZO Cem y Prep

- Colocación suave y precisa de inlays, onlays y carillas
- Puntas esféricas de diamantado total y parcial para el biselado y acabado de los bordes de cavidades
- Punta diamantada para el ensanchamiento y la limpieza de fisuras
- Eliminación rápida y precisa del material


PiezoLED

Preparación




PIEZO Cem 225

- Para el cementado de inlays, onlays y carillas cerámicos con elementos de composite alótropicos y de polimerización dual
- Ideal para preparaciones de gran tamaño
- Trabajar con poca presión

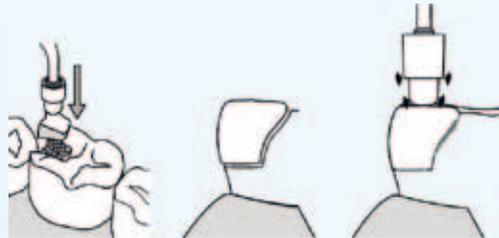


PIEZO Prep 226

- Punta esférica diamantada de preparación
- Para la apertura de pequeños defectos oclusales y bucales
- Procesar los defectos lentamente

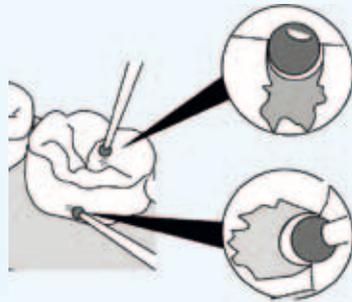


PIEZO Prep 227

- Punta esférica de diamantado parcial de preparación
- Para el biselado y acabado de los bordes de cavidades mesiales proximales
- Trabajar con intensidad reducida

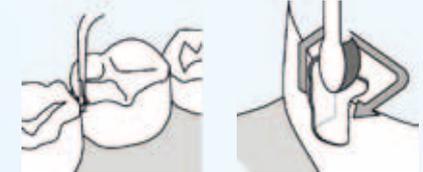


PIEZO Prep 228

- Punta esférica de diamantado parcial de preparación
- Para el biselado y acabado de los bordes de cavidades distales proximales
- Trabajar con intensidad reducida

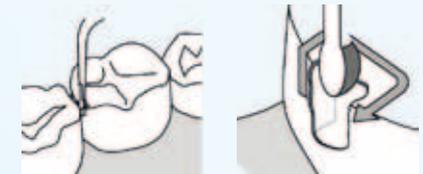

PIEZO Prep 229

- Punta diamantada de preparación
- Para el ensanchamiento y la limpieza de las fisuras antes del sellado
- Mover la punta lentamente y con poca presión en las fisuras

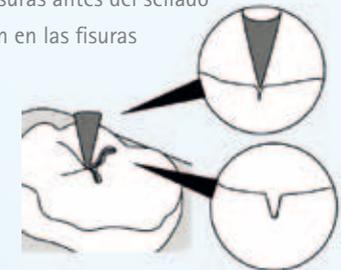

Preparación



Puntas PIEZO Endo

- Punta cónica y cilíndrica diamantada
- Soporte de limas para el uso flexible de diferentes limas Endo
- Limpieza efectiva, modulado y enjuague del conducto radicular

PiezoLED

Endodoncia

PIEZO Endo 220

Punta cónica diamantada (70µm) para una alta eficacia

- Para la localización sencilla de conductos radiculares y una buena visibilidad
- Eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del sistema de conductos radiculares
- Trabajar sin presión



PIEZO Endo 221

Punta cilíndrica fina diamantada (70µm) para una alta eficacia


- Para la eliminación de escalones y otros obstáculos
- Para la preparación de un acceso directo a una punta rota en el conducto radicular
- Trabajar sin presión



PIEZO Endo 222

Soporte de limas de 120° para el uso flexible de diferentes limas Piezo Endo

- Especialmente adecuado para la zona anterior y premolar
- Aplicación de la técnica Step-Back (activar ~ 4s)

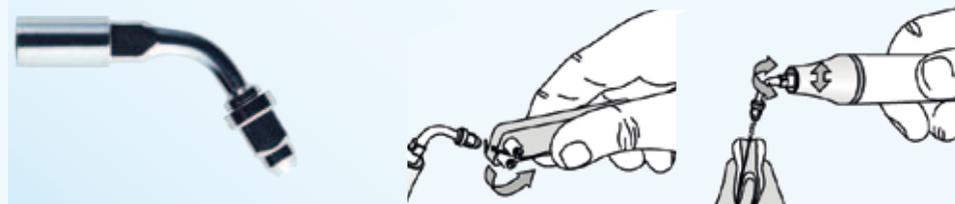

PIEZO Endo 222 con limas

Juego de 5 limas de acero inoxidable para la preparación, limpieza y desinfección del sistema de conductos radiculares (ISO 15, 20, 25, 30, 35)

- Al emplear las limas, la marca debe permanecer visible
- Las limas pueden ser dobladas y adaptadas al conducto radicular
- El líquido debe fluir a lo largo de la lima



Endodoncia



PIEZO Implant Set

- Para una limpieza eficaz de implantes
- La punta exenta de metal impide la lesión del cuello de los implantes
- Superficies sumamente limpias sin rallado


PiezoLED

Limpieza de implantes



PIEZO Implant Set

- Para la eliminación de la placa y del sarro dental de superficies de implantes y restauraciones metálicas y cerámicas
- Para la limpieza eficaz y cuidadosa de superficies de prótesis
- Punta sin metal
- 50 aplicaciones por pieza

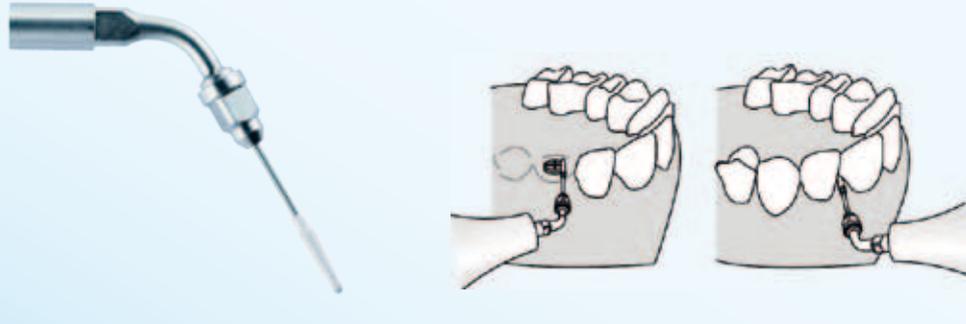



Limpieza de implantes



Visión global de puntas

Material	Descripción	PIEZOsoft	PiezoLED	Contenido
321911	Punta PIEZO Paquete inicial		●	12 puntas N° 201, 202, 203, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 225, 227, 228 con accesorio Cem Llave PIEZO Endo Limas Endo
Puntas PIEZO Scaler				
1.007.4004	Juego de puntas PIEZO Scaler	●	●	3 puntas PIEZO Scaler N° 201, 202, 203 cada una con llave dinamométrica Steribox de 6 unidades Tarjeta de medición del desgaste
1.007.4024	Punta PIEZO Scaler 201	●	●	
1.007.4026	Punta PIEZO Scaler 202	●	●	
1.007.4028	Punta PIEZO Scaler 203	●	●	
Puntas PIEZO Para				
1.007.4006	Juego de puntas PIEZO Perio		●	3 puntas PIEZO Perio N° 212, 213, 214 cada una con llave dinamométrica Steribox de 6 unidades
1.007.4032	Punta PIEZO Para 212		●	
1.007.4033	Punta PIEZO Para 213		●	
1.007.4034	Punta PIEZO Para 214		●	
1.007.4039	Punta PIEZO Para 210		●	
1.007.4042	Punta PIEZO Para 211		●	
Puntas PIEZO Cem				
1.007.4027	Punta PIEZO Cem 225		●	Punta sin accesorio
1.007.4015	Accesorio Cem		●	6 accesorios Cem
Puntas PIEZO Prep				
1.007.4035	Punta PIEZO Prep 226		●	
1.007.4036	Punta PIEZO Prep 227		●	
1.007.4037	Punta PIEZO Prep 228		●	
1.007.4038	Punta PIEZO Prep 229		●	

Material	Descripción	PIEZOsoft	PiezoLED	Contenido
Puntas PIEZO Endo				
1.007.4040	Punta PIEZO Endo 220		●	
1.007.4041	Punta PIEZO Endo 221		●	
1.007.4043	Punta PIEZO Endo 222		●	Soporte para limas PIEZO Endo
1.007.4020	Llave Punta PIEZO Endo		●	Para el montaje del soporte para limas PIEZO Endo 222 y las limas Piezo Endo
1.007.4011	Juego de limas PIEZO Endo		●	Juego de 5 limas de acero inoxidable 6 limas ISO 15, 20, 25, 30, 35 respectivamente
Puntas Piezo Implant				
1.007.4008	Juego de punta Piezo Implant		●	Punta PIEZO Endo 222 Llave PIEZO Endo 4 accesorios
1.007.4014	Juego de punta Piezo Implant Refill		●	4 accesorios

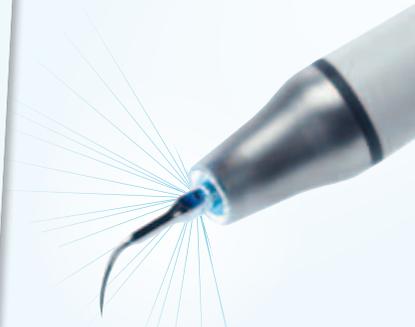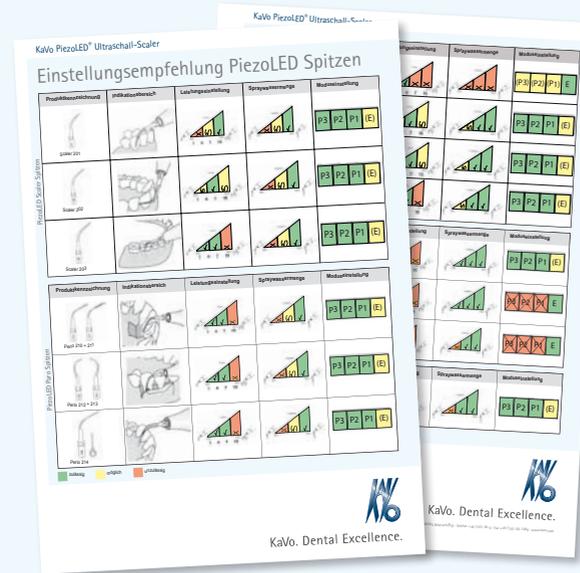

Nota PiezoLED:
Observe nuestras recomendaciones de ajuste para las puntas



KaVo. Dental Excellence.