

POWER SETTINGS - TABLE-TOP DEVICES / TABLEAU DE REGLAGES - APPAREILS DE TABLE

	Tips / Inserts	NEWTRON® BOOSTER NEWTRON® P5 NEWTRON® P5XS	PMax XS P5 NEWTRON® P5 NEWTRON® XS	SUPRASSON PMax PROPHY MAX	P5 BOOSTER	PIEZOTOME®* IMPLANT CENTER™** PIEZOTOME®2* IMPLANT CENTER™2*	IRRIGATION
PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	1 / 2 / 3 / 1S	14	14	5	10	5	↕
	10P	14	14	5	10	5	↕
	10X / 10Z	12	12	2	9	2	↕
	EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	12	2	9	2	↕
PERIODONTICS PARODONTIE	H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R	2	2	2	1	2	↕
	P2L / P2R	3	3	3	2	3	↕
	TK1-1S	2	2	2	1	2	↕
	TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R	2	2	2	1	2	↕
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	PH1 / PH2L / PH2R	2	2	3	2	3	↕
	IP1	3	3	3	N/A	3	↕
	IP2L / IP2R / IP3L / IP3R	5	5	4	N/A	4	↕
ENDODONTICS ENDODONTIE	CAP1	10	10	6	7	6	↕
	CAP2 / CAP3	10	10	6	7	6	↕
	ET18D	10	10	6	7	6	↕
	ET20 / ET25 / ET25S / ETBD	7	7	3	5	3	↕
	ET20D / ET25L / ET40 / ET40D	7	7	3	5	3	↕
	IRR20-21/ IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25	6	6	1	4	1	↕
	K10 / K15 / K25 / K30	6	6	1	4	1	↕
	AS3D / AS6D	7	7	3	5	3	↕
	AS9D	6	6	1	4	1	↕
	ASLD / ASRD	7	7	3	5	3	↕
	P14D / S12-70D	7	7	3	5	3	↕
	P15LD / P15RD	7	7	3	5	3	↕
	SO4	7	7	3	5	3	✕
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHESES & ESTHETIQUE	PM1 / PMS1	15	15	6	11	6	↕
	PM2 / PMS2	10	10	6	7	6	↕
	PM3 / PMS3	8	8	4	6	4	↕
	PM4	15	15	5	10	5	↕
	PMV1 / PMV2 / PMV3	15	15	5	10	5	↕
	PMV4 / PMV5 / PMV6	10	10	6	7	6	↕
	5AE / ETPR	20	20	10	14	10	↕
	C20	11	11	1	8	1	✕

*Medical devices equipped with Newtron® handpiece and used in Newtron® mode / Dispositifs médicaux équipés d'une pièce à main Newtron®, à utiliser en mode Newtron®

Power Modes / Modes de Puissance

NEWTRON® : Low / Basse - Medium / Moyenne - High / Haute - Very high / Très haute

Power Settings Scale / Echelle de Réglages

NEWTRON® BOOSTER / NEWTRON® P5 / NEWTRON® P5XS / P5 NEWTRON® (LED) / P5 XS NEWTRON® (LED) / P-Max XS / IMPLANT CENTER™ CUBE : from 1 to 20 depending on clinical range / de 1 à 20, couvre toutes les gammes
SUPRASSON P-Max / PROPHY Max / PIEZOTOME® / IMPLANT CENTER™ / PIEZOTOME® 2 / IMPLANT CENTER™ 2 : from 1 to 10 in each clinical range / de 1 à 10 dans chaque gamme
P5 BOOSTER : from 1 to 14 depending on clinical range / de 1 à 14, couvre toutes les gammes

See individual medical device instructions manuals for further informations on [satelec.com/documents](https://www.satelec.com/documents).
Lire attentivement le manuel d'utilisation du dispositif médical, pour de plus amples informations sur [satelec.com/documents](https://www.satelec.com/documents).



SATELEC | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | ZI du Phare
33700 MERIGNAC | FRANCE
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com



www.youtube.com/user/acteonsatelec



PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	<i>Scaling Détartrage</i>						
	<i>Hygiene Hygiène</i>						
	<i>Excavus</i>						
PERIODONTICS PARODONTIE	<i>Periodontics Parodontie</i>						
	<i>Periomaintenance BDR</i>						
	<i>PerioPrecision</i>						
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	<i>PerioSoft</i>						
	<i>ImplantProtect</i>						
ENDODONTICS ENDODONTIE	<i>Endosuccess Canal Access Prep</i>						
	<i>Endosuccess Retreatment</i>						
	<i>IrriSafe K Files / Limes K</i>						
	<i>Endodontics Endodontie</i>						
	<i>Endosuccess Apical Surgery</i>						
	<i>Endosurgery</i>						
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHÈSES & ESTHÉTIQUE	<i>PerfectMargin Rounded</i>						
	<i>PerfectMargin Shoulder</i>						
	<i>PerfectMargin Veneers</i>						
	<i>Loosening & Condensation Descellement & Condensation</i>						