

INICIO RÁPIDO DISPOSITIVO RAYPLICKER



1

Es : Cargar el aparato antes de la utilización



2

Es : Colocar primero la funda sobre la guía y luego la boquilla esterilizada en autoclave.




3

Es : Encender el dispositivo pulsando el botón.



4

Es : Seleccionar "Shade-taking" para visualizar la imagen de vídeo. Pulsar el botón para realizar la toma de color.

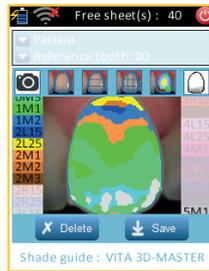

5

Es : Hacer clic en la pantalla para visualizar las diferentes cartografías. Suprimir (delete) o guardar (save) la toma de color.



6

Es : Transferir los datos desde el programa.



1



2



3



4



5

ES:

- 1- Verificar que la boquilla esté bien ubicada.
- 2- La mira gris debe estar paralela a los bordes de la pantalla.
- 3- El paciente debe mantener la boca abierta y respirar por la nariz.
- 4- La lengua y los labios no deben aparecer en la imagen.
- 5- Situar el diente en el centro de la imagen y mantener la boquilla en contacto. No moverse hasta finalizar la adquisición (1 s).

INICIO RÁPIDO PROGRAMA ODONTÓLOGO

1 PÁGINA PRINCIPAL

Importar fichas

Acceso fichas y archivos.

Pedido no tratado

Pedido en curso

Parámetros

Desconectar usuario

Actualizar . Cloud

Importar fichas (.borea)

2 PESTAÑA TOMA DE COLOR

Fecha y número de pedido

Foto

Cartografía

Translucidez

Exportar la ficha (.borea)

Cambiar de estratificación.

3 PESTAÑA PEDIDO

Información sobre la prótesis para pedir/fabricar

Esquema del diente de producción

Imprimir el pedido

Terminar el pedido

Informaciones complementarias