



TABLAS DE SINTERIZACIÓN



Super Translucent **COLOR**




High Translucent **WHITE**




Super Translucent **MULTICAPA**

La temperatura ideal de sinterización para los 4DISK HT WHITE, ST COLOR Y ST MULTICAPA es de **1.530°C, durante 2 horas.**

De 1 a 5 unidades

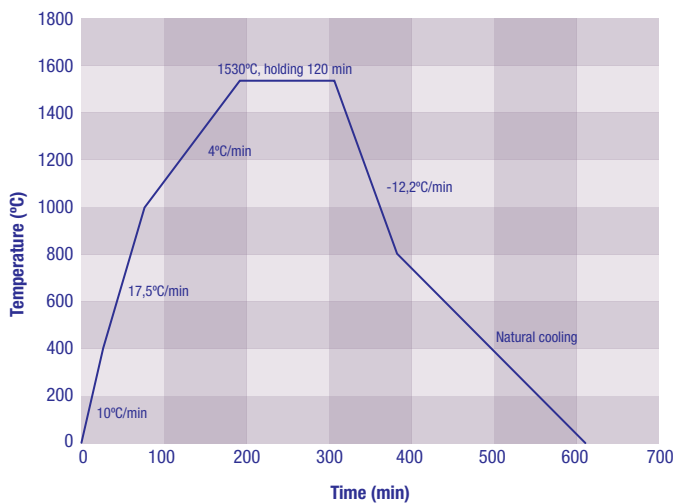

De 6 a 9 unidades

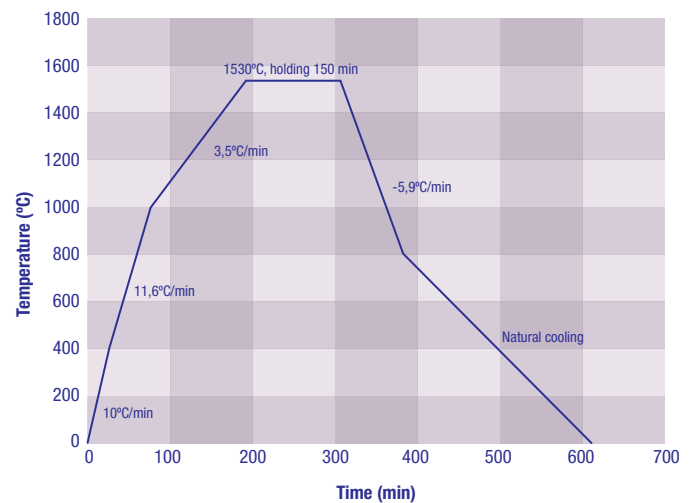




TABLAS DE SINTERIZACIÓN



Nuevo High **DEFINITION**

La temperatura ideal de sinterización para los 4DISK **HD MULTICAPA** es de **1.530°C**, durante **2 horas**.

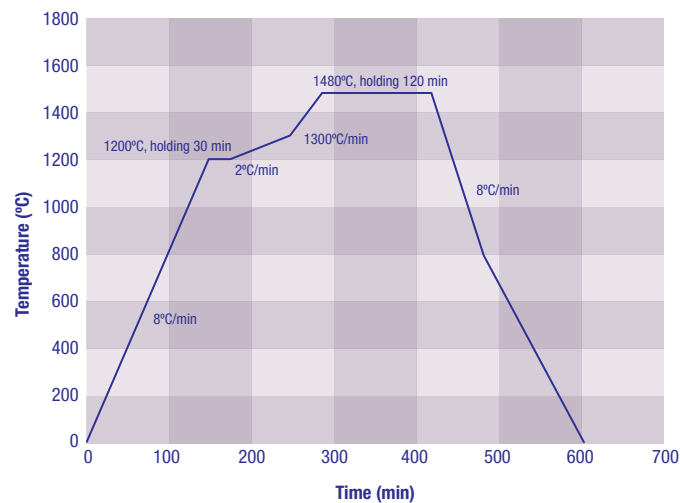



TABLAS DE SINTERIZACIÓN



Top Translucent **MULTICAPA**

La temperatura ideal de sinterización para los 4DISK
TT MULTI es de **1.450°C**, durante **2 horas**.

