



Instrucciones de uso

Estado técnico de las instrucciones de uso: 07/2015

1. **General:** **K2 BONDER** es compatible con aleaciones no preciosas, sobre todo de Cobalt-Cromo y Níquel-Cromo de la empresa YETI Dental.
K2 BONDER surte como amortizador WAK de dilatación para aleaciones no preciosas y para cerámica. Muy fácil de trabajar.

1.1. Descripción del producto/ Art. 337-0500 K2 Bonder Pasta 5 g bote
Forma de suministro:

1.2. Datos técnicos:	Temperatura inicial	550 °C
	Tiempo de secado	6 min.
	Aumento de temperatura	80 °C/min.
	Vacío	si/Yes
	Temperatura final	980 °C
	Tiempo de estabilización	1 min.
	Aparencia	ligeramente brillante

- 1.3. Dirección del fabricante: YETI Dentalprodukte GmbH, Industriestraße 3, D-78234 Engen, Deutschland
Tel.: 07733-94100 Fax: 07733-941022 e-mail-adresse: info@yeti-dental.com
Información técnica: 07733-9410-20

2. **Uso determinado:**

Para el uso por personal especializado en odontotécnica, para la restauración en la boca del paciente.

3. **Instrucciones de uso:**

La corona en metal es preparada según las indicaciones del fabricante, oxidada y chorreada. Mezclar bien antes del uso. Aplicar en capas finas el Bonding con un pinzel especial para el opaco en pasta, luego cerrar de nuevo bien el bote. Después de la primera cocción el bonder tiene una apariencia amarilla brillante. Según la composición de la aleación el color del Bonder puede variar. En el caso que el opaco este seco o demasiado espeso, puede disolverlo con K2 fluido de glaseado para obtener la consistencia inicial. No disolver en el bote sino aparte con la cantidad necesaria.

4. **Indicaciones de peligro:**

Solamente prótesis dentales y personas competentes están autorizadas a trabajar con el producto.

5. **Garantía:**

El usuario es plenamente responsable de la utilización adecuado y correcta del producto. Las informaciones arriba indicadas se basan en nuestra propia experiencia. Las reclamaciones serán únicamente consideradas en el caso de mala calidad del producto, reembolsando solamente el valor de la mercancía. Nuestros productos están sujetos a mejoramientos y perfeccionamientos continuos. Nos reservamos el derecho de cambios técnicos (dimensiones/formas/composiciones).

6. **Eliminación:**

Para la eliminación respete las leyes y normas respectivas vigentes.