



9

Desinfección

Bolsas de esterilización	404
Ciclo de desinfección completo	368
Control de la carga.....	408
Control del paquete.....	407
Cuidado personal y prevención.....	401
Desinfección de aspiración	393
Desinfección de fresas	391
Desinfección de impresiones	402
Desinfección de instrumentos	383
Desinfección de superficies	373
Limpieza de manos	397
Líquido para autoclaves	404
Protocolo de asepsia.....	368
Rollos de esterilización	406
Toallitas desinfectantes	370



Consejo Proclinic

Desinfección en general

Para la elección del producto más adecuado es importante tener en cuenta los siguientes parámetros: espectro de acción/tiempo de contacto/dilución (para productos concentrados) y compatibilidad con la superficie a tratar.

Instrumental

Consejo: respetar las dosis de empleo y los tiempos de contacto requeridos. No mezclar los productos entre ellos.

Los instrumentos deben ser sumergidos inmediatamente después de su uso, sin aclarado previo. Para proceder correctamente con esta fase, es importante no usar productos con base de aldehídos, ya que tienen la particularidad de fijar las proteínas.

Sistema de aspiración

Consejo práctico: una limpieza y desinfección diaria permite prevenir el inicio de la formación de biofilm y olores.

Ciclo de desinfección completo



Protocolo de Asepsia en Odontología

Desinfección

Es la eliminación de microorganismos patógenos (causantes de enfermedades transmisibles), que están presentes en el medio ambiente, superficies de la consulta, instrumental rotatorio y manual, así como en las conducciones de agua y aire. Su objetivo pretende la eliminación de los microorganismos, aunque no logra la eliminación de sus formas más resistentes, como son las esporas.

Existe una gran confusión entre desinfectante y antiséptico. Aquel actúa sobre elementos inertes, mientras que los antisépticos ejercen su acción tópicamente, sobre los tejidos vivos (piel, mucosas y heridas), inhibiendo o destruyendo la mayor cantidad posible de microorganismos, dependiendo de la composición del antiséptico. Los antisépticos no alteran los tejidos sobre los que se aplican.

Mecanismo de Acción

Su eficacia estriba en que desnaturaliza las proteínas e inactiva la envoltura lipídica de los virus. Por ello, al disminuir el número de microorganismos hasta el nivel que se considera que es mínimo el riesgo de infección, se dice que el desinfectante ha actuado como tal. Diremos que un agente desinfectante es bacteriostático cuando ha impedido la multiplicación de las bacterias. De todas formas, hemos de tener en cuenta que cuando el bacteriostático deja de actuar, comienza de nuevo la multiplicación celular. Por otro lado, un producto es bactericida cuando impide la multiplicación celular y ésta es además irreversible.

Por medio de las diferentes técnicas utilizadas en la desinfección, los diversos productos químicos actúan sobre los microorganismos, que ocasionan enfermedades transmisibles. Los elementos químicos desinfectantes tienen su campo de actividad sobre los virus (virucidas), bacterias (bactericidas) y hongos (fungicidas).

Desinfectantes admitidos por el A.D.A.

Compuesto químico

Compuesto químico	Finalidad
Clorina	Desinfección de superficies
Yodoforos	Desinfección de superficies
Fenoles	Desinfección de superficies
Glutaraldehido al 2% con productos fenólicos	Desinfección por inmersión, esterilización y potente desinfectante
Glutaraldehido neutro al 2% con productos fenólicos	Desinfección por inmersión, esterilización y potente desinfectante
Glutaraldehido ácido al 2% con productos fenólicos	Desinfección por inmersión, esterilización y potente desinfectante
Glutaraldehido alcalino al 2% con productos fenólicos	Desinfección por inmersión, esterilización y potente desinfectante
Peróxido de oxígeno	Desinfección de superficies
Alcohol y fenoles sintéticos	Desinfección de superficies

¿Qué es un pre-desinfectante?

Es un producto de limpieza del material contaminado, indicado para preparar la desinfección y la inhibición de los microorganismos presentes en el instrumental contaminado.

Libre de aldehídos



Encuentra todos tus productos libres de aldehídos. Nos preocupamos por el medio ambiente y por tu salud.

¿Qué es un desinfectante ?

Es aquel producto químico que disminuye al máximo la tasa de microorganismos, sin eliminar las esporas bacterianas.



Normas de eficacia

Tratamiento del Instrumental Manual para cualquier Acto Operatorio

DESINFECCIÓN			LIMPIEZA	ESTERILIZACIÓN				ALMACENAMIENTO
TRAS USO	TIPO	TIEMPO		PREPARACIÓN	TIPOS	TEMPERATURA	TIEMPO	
- Dentro de un contenedor con solución desinfectante o - En cuba de ultrasonidos	- Solución: bactericida, virucida y fungicida - Soluciones desinfectantes	- Seguir las instrucciones del fabricante - Seguir las instrucciones del fabricante	- Bajo chorro de agua del grifo - Eliminar restos orgánicos de la superficie - Limpieza - Secado - Eliminar restos orgánicos de la superficie - Limpieza - Secado	- Bandejas o - Embolsado	- Autoclave	- 134 °C - 120 °C	- 5' - 20'	- En contenedores: 1. Con aislamiento: hasta 6 semanas estériles 2. Sin aislamiento: ni protección: 24 horas estériles

BIBLIOGRAFÍA: Control de las infecciones cruzadas. Lozano de Luaces, Vicente . V. Ed. Avances, Madrid 2000

Compra donde quieras: atención en el 900 39 39 39 o en www.proclinic.es



Consejo Proclínic

Toallitas desinfectantes

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA				
		Detergente	Desinfectante	Listo para su uso	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
02030	Toallitas desinfectantes FD-350 Durr	●	●	●	25"	●	s.d.	5-8,5	●	s.d.	●	●	●
49899	Toallitas desinfectantes 30" Proclínic		●	●	30"	●	●	≈ 5,5	●	●	●	●	●
60165	Toallitas desinfectantes Bestdent		●	●	1'	●	●	<8	●	●	●	●	●

I Eficacia tuberculocida incluida / 2 Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / 4 Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / 5 Test sobre candida albicans / 6 Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

toallitas desinfectantes



proclínic



LIBRE DE ALDEHÍDOS

TOALLITAS DESINFECTANTES

Marca: Proclínic

DESDE
8,15 €

100 unidades

Ref. 49898 Bote 100 u. **10,35 €**
Ref. 49899 Reposición 100 u. **8,15 €**

+ Activas en 30 segundos

Toallitas desinfectantes para la desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos. Amplio espectro de eficacia en 30 segundos: bactericida, levaduricida, tuberculocida, activo frente a BVDV (virus modelo HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Adenovirus. Ideales para un uso entre dos pacientes. Fresco perfume a limón.

toallitas desinfectantes



proclínic

TOALLITAS DESINFECTANTES SIN ALCOHOL

Marca: Proclínic

Ref. 55440 Bolsa 100 u. **13,30 €**

Toallitas impregnadas de una solución detergente desinfectante sin alcohol y sin perfume para la desinfección y limpieza de todos tipos de superficies de dispositivos médicos. Conviene tanto para las zonas sensibles al alcohol que para el pequeño instrumental. Amplio espectro de eficacia: bactericida en 1 min, levaduricida en 2 min, activo en 1 min frente a HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpes virus y en 5 min frente a Poliomavirus SV40. 100% biodegradables.



Toallitas desinfectantes

Desde
3,45 €



TOALLITAS DESINFECTANTES

- Marca: Bestdent
- Ref. 60164** Bote 100 unidades **5,40 €**
A partir de 12 unidades 4,45 €
- Ref. 60165** Reposición 100 unidades **3,99 €**
A partir de 12 unidades 3,45 €

-Toallitas desinfectantes listas para usar.
-Paño extremadamente resistente a la rotura, empapado con fórmula de alcohol reducido
-Fácil de usar y agradable a la piel.
-Amplio espectro de actividad en sólo 1 minuto.



Toallitas desinfectantes

TOALLITAS DESINFECTANTES FD350

- Marca: Dürr
- Características: Virucidas. Aroma limón o clásico.
- Ref. 0231** Lemon. Bote con 110 unidades. **9,08 €**
- Ref. 0234** Lemon. 12 Repos. x 110 unidades. **84,80 €**
- Ref. 02029** Clásico. Bote con 110 unidades. **9,08 €**
- Ref. 02030** Clásico. 12 Repos. x 110 unidades. **84,80 €**



Toallitas desinfectantes

TOALLITAS LINGET ANIOS Y REPOSICIÓN

- Marca: Anios
- Ref. 6934** Bote con 120u. **9,17 €**
- Ref. 6935** Reposición 120u. **8,95 €**
- Ref. 85605** 1 bote + 6 reposiciones **48,18 €**

Toallitas desinfectantes para todas las superficies y el pequeño material. Ideal para un uso entre dos pacientes. Actividad bactericida (EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NF T 72-190), fungicida (EN 1275, NF T 72-190) y activo sobre HIV-1, HBV y Herpes virus. Non irritantes para la piel y agradablemente perfumadas. Formula sin aldehídos.



Toallitas desinfectantes

UNISEPTA PLUS

- Marca: Unident
- Ref. 55432** Bote 150 u. **8,55 €**
- Ref. 55431** Reposición 150 u. **7,48 €**



Toallitas desinfectantes

BACTINYL TOALLITAS

- Marca: Garcin-Bactynil
- Ref. 96654** **6,99 €**

La única toallita que limpia, desinfecta, y protege su equipo. Toallitas desinfectantes perfumadas Bactynil es un producto de un solo uso para limpiar y desinfectar las superficies de contacto y equipos (incluidas las superficies sensibles). Las toallitas también pueden ser usadas para desinfección de manos.

- Libre de cloro, sin fenol, sin aldehídos y con menos 5% de alcohol.
- Los componentes utilizados en la composición de la impregnación de líquido están autorizados para el contacto con alimentos.
- Suave aroma de coníferas.
- Impregnadas para largo tiempo.
- Periodo de caducidad de 4 años.
- Caja de 120 toallitas húmedas de 130 x 200 mm.



Toallitas desinfectantes

SEPTOL LINGETTES

- Marca: Pierre Rolland
- Características: Servilletas desinfectantes.
- Ref. 1955** Bote con 6 recargas x 120u. **83,20 €**

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes



TOALLITAS ASEPTONET

Marca: Steridis

Ref. 6337 13 x 20 cm. Bote 100 u.

6,25 €

Ref. 63371 Pack. 18 x 20 cm. 100 u. Gruesas.

10,65 €

Las toallitas desinfectantes Aseptonet le permiten una rápida y cómoda desinfección de la consulta. Desinfección de superficies, materiales e incluso sirven para desinfección de las manos. Las toallitas Aseptonet son antibacterianas impregnadas con una solución bactericida, fungicida y vírica.

- Medidas toallita: 18x20cm
- Presentación: paquete de 100 unidades
- Caja: 12 paquetes de 100 unidades

Toallitas desinfectantes



TOALLITAS LACLEDDIN WIPES

Marca: Laboratorios Clarben

Características: Aroma Mentol. 70 unidades.

Ref. 2208

11,54 €

Nuevo sistema de sellado que las mantienen más húmedas Bactericida, Fungicida y virucida. Para superficies y manos.

Toallitas desinfectantes



DENTASEPT SH PRO WIPES

Marca: Anios

Ref. 69277 100 uds.

10,04 €

Toallitas impregnadas de una solución detergente y desinfectante sin alcohol ni perfume, compatible con todas las superficies de dispositivos médicos. Recomendadas para las superficies a base de polímero tal como sillón dental, escupidoras... Actividad bactericida en 2mn (EN 1040, EN 13727, EN 13697) SARM incluido (EN 13727, EN 13697), levadurizada en 5mn (EN 1275, EN 13624, EN 13697) y activas según EN 14476+A1 en 1mn, sobre PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vacinia, Rotavirus y Polyomavirus SV 40 en 5mn. Fórmula sin aldehídos.

Toallitas desinfectantes



TOALLITAS ZETA 3 POP-UP

Marca: Zhermack

Ref. 69504 Toallitas Z3 Pop-Up. 100u.

13,50 €

- Muy bajo contenido de alcohol etílico (< 3%): óptima compatibilidad con los materiales, incluidos los más delicados.
- Toallitas más gruesas, de grandes dimensiones: limpieza y desinfección de superficies más amplias en menos tiempo y con menor consumo de toallitas.
- Tejido de alta resistencia, suave y compacto.

Toallitas desinfectantes



HOSPYWIPES + HOSPYDES

Marca: IC Medical

Características: Hospywipes 600 u. + Hopsydes

Ref. 0962

27,22 €

Hospywipes es un paño seco para absorber productos de limpieza y desinfectantes, ideal para desinfectar y limpiar de forma sencilla superficies y productos médicos. Los paños son de tela de alta calidad y no desprenden pelusas. Han sido especialmente diseñados para la desinfección de superficies. Reparten de forma homogénea la solución desinfectante, garantizando que la superficie a desinfectar se empape a la perfección. Una bobina contiene 600 paños de tela perforada de viscosa sin pelusas, seca y de alta calidad.

Hospy-Des es un concentrado para la desinfección y limpieza de todas las superficies de productos médicos, especialmente indicado para superficies sensibles al alcohol. Concentración de aplicación: Introducir el contenido de la bolsa en 1,85 litros de agua. Esto proporciona una solución de desinfectante del 7,5%. Espectro de acción: Bactericida/fungicida 1min (según procedimiento de la Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología, DGHM), Virucida (HBV/HIV) 1min.

Composición: <10% agente tensioactivo catiónico, cloruro de alquilamonio cuaternario, agua desionizada, aromáticos.



Consejo Proclonic

Desinfección de superficies

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA					
		Detergente	Desinfectante	Listo para su uso	Solución concentrada	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
0200	Desinfectante superficies sin alcohol FD-300 Durr	●	●		●	15'	●	s.d.	11,4-12,4	●	s.d.	●	●	●
0226	Desinfectante rápido de superficies FD-322 Durr	●	●	●		25"	●	s.d.	5-8,5	●	s.d.	●	●	●
0233	Desinfectante rápido de superficies FD-333 Durr	●	●	●		1'	●	s.d.	6,5-7,5	●	s.d.	●	●	●
58126	Instrunet Inibsa Spray		●	●		30 seg /5 min'	●	s.d.	s.d.	●	s.d.	●	●	●
49895	Desinfectante sin alcohol de superficies Proclonic	●	●	●		5'	●	●	≈ 6	●	●	●	●	●
49888	Desinfectante de dispositivos médicos Proclonic		●	●		5'/15" ¹	●	●	≈ 6	●	●	●	●	●
60156	Spray desinfección superficies Bestdent		●	●		1'	●	●	7	●	●	●	●	●
60157	Desinfectante dispositivos médicos Bestdent		●	●		1'	●	●	<8	●	●	●	●	●

1 Eficacia tuberculocida incluida / 2 Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / 4 Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / 5 Test sobre candida albicans / 6 Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

Desinfección de superficies



desinfección de superficies

- + Sin alcohol
- + Sin perfume



DETERGENTE-DESINFECTANTE SIN ALCOHOL DE SUPERFICIES

Marca: Proclonic
Características: Sin alcohol.

DESDE
21,95 €
750 ml.

Ref. 49895 750 ml. **21,95 €**
Ref. 49889 5 l. **69,95 €**



LIBRE DE ALDEHÍDOS

Solución detergente desinfectante sin alcohol y sin perfume, lista para usar, para la desinfección y limpieza de todos tipos de superficies de dispositivos médicos. Conviene tanto para las zonas sensibles al alcohol que para el pequeño instrumental. Amplio espectro de eficacia en 5min: bactericida (SARM incluido), levaduricida, activo frente a VIH-1, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Herpes virus, Vaccinia virus, Poliomavirus SV40. Sin aldehídos.

desinfección de superficies



- Solo 41% de alcohol
- Sin perfume ni colorante

DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Marca: Proclinic
Características: Contiene alcohol

DESDE
20,99 €

750 ml.

Ref. 49888 750 ml. **20,99 €**
Ref. 49897 5 litros **68,95 €**

Solución desinfectante lista para su uso para la desinfección rápida de los dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles entre cada paciente. Seca rápidamente sin dejar marcas ni película grasa. No corrosivo y compatible con una amplia gama de materiales. Amplio espectro de eficacia: bactericida en 5 min (SARM Incluido), levaduricida en 5 min, fungicida en 15 min, activo en 1 min frente a PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus, Herpes virus. No contiene ni perfume ni colorante. Sin Aldehídos.

Desinfección de superficies



LIBRE DE ALDEHÍDOS



Desinfección de superficies

Desde
16,90 €



CON
LOS QUETÚ
AHORRAS

DESINFECTANTE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Marca: Bestdent

Ref. 60157 1 litro **18,90 €**

A partir de 3 unidades 16,90 €

Ref. 60158 5 litros **59,00 €**

- A base de alcohol para desinfección superficial rápida.
- Fórmula de alcohol reducido
- Muy suave, bien tolerado por los seres humanos y altamente compatible con las superficies.
- Amplio espectro de actividad en sólo 1 minuto.

Desinfección de superficies



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES FD-333

Marca: Dürr

Características: Sin aldehídos. Listo para su uso.

Virucida.

Combinación de alcoholes y compuestos

Ref. 0233 2,5 l. Fragancia a limón. **42,30 €**

Ref. 02332 10 l. Fragancia a limón. **142,00 €**

Ref. 02265 Grifo/Dispensador para bidones. **11,60 €**

Desinfección de superficies



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

RÁPIDA FD-322

Marca: Dürr

Características: Sin aldehídos. Listo para su uso.

Actúa en 1 minuto contra HBV.

Ingredientes activos: alcoholes

Ref. 0226 2,5 litros **40,60 €**

Ref. 02262 10 litros **131,00 €**

Ref. 02265 Grifo/Dispensador para bidones. **11,60 €**

Desinfección de superficies



PULVERIZADOR PARA LÍQUIDOS

Marca: Dürr
 Características: Frasco pulverizador para aplicar FD - 320 y 322, etc...

Ref. 0213

12,10 €

Desinfección de superficies



DÜRR FD 360

Marca: Dürr
 Características: 500 ml. + 10 esponjas

Ref. 0235

29,50 €



Limpieza y cuidado del cuero artificial. Tratamiento de frescor y conservación del valor para el cuero artificial más desgastado por el uso en la clínica. El nuevo limpiador para cuero artificial Dürr FD 360 es fácil de aplicar y limpia el poro en profundidad.

- Potente efecto limpiador: desprende y elimina sin dañar la suciedad y todo tipo de manchas, roces y restos de color dejados por la ropa. La emulsión actúa basándose en una combinación de agentes tensioactivos especiales, compuestos de silicona y suave aceite de aguacate.
- Excelente tolerancia de todos los revestimientos de cuero artificial, probado en las unidades de trata-

miento de los principales fabricantes.

- Práctico kit compuesto por envase pulverizador de 500 ml y 10 esponjas especiales para una aplicación más efectiva. El FD 360 se aplica directamente mediante el pulverizador y no daña el medio ambiente. La esponja especial sirve para frotar el producto sobre la suciedad más resistente. Con el FD 360 recuperará en unos instantes hasta la superficie de cuero artificial más estropeada, ya que este limpiador elimina todas las manchas rápidamente en profundidad, incluso los colorantes de placa más intensos no fijados.

Desinfección de superficies



FD300 DESINFECCIÓN SUPERFICIES

Marca: Dürr

Ref. 0200 Desinfectante Superficies FD300. 2,5 litros

55,00 €

Concentrado sin alcohol para desinfectar superficies, objetos lavables, aparatos médicos, suelo y paredes. Al no contener alcohol no es agresivo para superficies delicadas.

- Actúa contra todos los virus, incluidos el del polio y el del poliovirus SV40
- De alto rendimiento, hasta 500 litros de solución.
- Especialmente rápido: para una dosis del 3 %, tiempo de reacción de tan sólo 2 minutos.
- Efecto autolimpiador: intenso, más seguridad gracias al efecto remanente.
- Sustancias activas: Alquilaminas y compuestos cuaternarios de amonio.

TUS  VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Desinfección de superficies



FD366 DESINFECCIÓN SUPERFICIES

Marca: Dürr
 Características: Envase de 2,5 litros
 Ref. 02031

40,80 €



HYGOWIPE PLUS

Marca:	Dürr	
Ref. 02025	Hygowipe Plus Dispensa-Toallas	646,00 €
Ref. 02026	Hygowipe Plus Rollo (6 x 110 m.)	61,10 €
Ref. 02027	FD-322 para Hygowipe Plus. 750 ml.	16,40 €



Desinfección de superficies

Toallitas desinfectantes en rollo, procedentes de dosificador con sensor. Rápido, práctico y exclusivo de Dürr: **El dispositivo entrega la toallita automáticamente sin contacto gracias a un sensor.**

- **Toallitas siempre frescas:** las toallitas secas se humedecen con facilidad, rapidez y seguridad con el desinfectante de superficies FD-322, en la botella especial de 750 ml.
- Según el área de aplicación **puede ajustarse la longitud de la toallita y la cantidad**

de desinfectante individualmente.

- La dosificación óptima en las toallitas de celulosa especialmente adaptadas **ahorra costes** y cuida el medio ambiente.
- El dispensador se sirve con un rollo de papel Hygowipe de 110 m. y 2 envases de 750 ml de FD322

Desinfección de superficies



UNISEPTA PLUS

Marca: Unident
 Características: Desinfectante a base de alcohol (60%) y amonio cuaternario. Activo en 30 segundos. Sin aldehídos.

Ref. 55435 Frasco 750 ml.
 Ref. 96569 Envase 5 litros.

14,95 €
49,95 €



Solución desinfectante lista para usar a base de alcohol, para una desinfección en 30 segundos de superficies de dispositivos médicos. Ideal para usar entre dos pacientes. Amplio espectro de eficacia: Bactericida: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561; SARM; Tuberculosis: EN 14348; Levuricida: EN 1275, EN 13624; Virucida: H1N1, VIH-1, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC, Herpesvirus, Rotavirus, Adenovirus y Coronavirus bovino (SARS). Sin aldehídos. Fresco perfume a limón.

Desinfección de superficies



UNISEPTA LIGHT 2

Marca: Unident
 Ref. 55514 Envase 5 litros.
 Ref. 55515 Frasco 750 ml.



48,95 €
14,95 €

Solución desinfectante sin aldehídos, lista para usar; con bajo contenido de alcohol para superficies de dispositivos médicos. Amplio espectro de eficacia: Bactericida EN 1040, EN 13727, EN 13697 (SARM incluido); Levuricida: EN 1275, 13624, EN 13697; Virucida: EN 14476: PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Herpesvirus, Vaccinia virus. Activo desde 1 min. Suave perfume a limón.

Proclinic cubre todas tus necesidades de prevención y desinfección

La gama de desinfección Proclinic ofrece una alternativa de fórmulas sin perfumes ni colorantes, la mejor garantía de seguridad para ti y para tu paciente



Desinfección de superficies



UNISEPTA FOAM 2

Marca: Unident

Ref. 56787 Frasco 750 ml.

19,95 €

Ref. 56788 Garrafa de 5 litros.

62,95 €

Detergente desinfectante sin alcohol. Activo en 5 minutos. Sin aldehídos. Lista para usar, para la desinfección y limpieza de todos tipos de superficies de dispositivos médicos. Conviene tanto para las zonas sensibles al alcohol que para los pequeños instrumentos. Amplio espectro de eficacia: Bactericida EN 1040, EN 13727, EN 13697 (SARM incluido); Levuricida: EN 1275, 13624, EN 13697; Virucida: EN 14476: VIH-I, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Herpesvirus, Vaccinia virus, Polyomavirus SV40. Activo en 5min. Suave perfume a naranja.

Desinfección de superficies



DENTASEPT SPRAY 4L PRO

Marca: Anios

Ref. 69270 Spray 1 litro

17,40 €

Ref. 69278 5 litros

57,50 €

Spray desinfectante listo para usar en base de alcohol. No deja huellas y mantiene brillantes las superficies. Actividad bactericida en 5min (EN 1040, EN 13727, EN 13697) SARM incluido (13727), levaduricida en 5min (EN 1275, EN 13624, EN 13697), fungicida en 15min (EN 1275, EN 13624, EN 13697) y activo según EN 14476+A1 en 1min, sobre PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia. Aroma suave y agradable. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de superficies



DENTASEPT SH PRO

Marca: Anios

Ref. 69279 750 ml con pulverizador montado

17,99 €

Spray detergente desinfectante listo para usar sin alcohol y sin perfume, compatible con todas las superficies. Recomendado para las superficies a base de polímero tal como sillón dental, escupideras... Uso agradable y seguro: en pistola para espuma que evita la formación de aerosol y que permite visualizar la zona tratada. Actividad bactericida en 2mn (EN 1040, EN 13727, EN 13697) SARM incluido (EN 13727, EN 13697), levaduricida en 5mn (EN 1275, EN 13624, EN 13697) y activo según EN 14476+A1 en 1mn, sobre PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia, Rotavirus y Polyomavirus SV 40 en 5mn. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de superficies



UNISEPTA ALL SURFACES

Marca: Unident

Características: Detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección de superficies. Activo en 15 minutos al 1%. Sin aldehídos.

Ref. 55436 Unisepta All Surfaces. 2,5 litros

34,95 €

Detergente desinfectante concentrado sin alcohol y sin aldehídos para la limpieza y desinfección de grandes superficies, tales como pisos, paredes, etc.

- Dilución sumamente económica, al 1%. Activo en 15 minutos al 1%.
- Formulación no pegajosa.
- Amplio espectro de eficacia: Bactericida: EN 1276, EN 13697; Tuberculocida: EN14348, EN 14563; Levuricida: EN 1650, EN 13697; Virucida: VIH-I, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Vaccinia Virus, Herpes Virus.
- Perfume a limón.



Desinfección de superficies

DENTASEPT SUELOS-SUPERFICIES LS PREMIUM

Marca: Anios
 Características: Para diluir al 1%. Sin enjuague

Ref. 69261 Botella dosificadora de 1 l. **15,40 €**
 Ref. 69999 5 litros **48,50 €**

Solución concentrada biodegradable al 99,6% para la limpieza y desinfección de todas las superficies del consultorio dental. Fórmula no pegajosa y sin alcohol para un uso sobre las superficies las más delicadas. Disolución muy económica al 1%: 1l. de concentrado = 100l. de solución lista para usar. Amplio espectro de actividad: Bactericida EN 1040, EN 1276, EN 13697 en 15 minutos - Tuberculicida EN 14348, EN 14563 en 60 minutos - Levuricida EN 1275, EN 1650, EN 13697 en 15 minutos - Virucida HIV-1, BVDV (virus modelo HCV), PRV (virus modelo HBV), Herpes virus en 5 minutos y activo sobre Vaccinia virus en 15 minutos. Sin aclarado. Perfume fresco a limón.



Desinfección de superficies



Sólo por
17,95 €

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Marca: Bestdent
 Ref. 60156 750 ml. Foam sin alcohol



17,95 €

- Desinfección de superficie rápida sin alcohol.
- Espuma activa que asegura la higiene.
- Amplio espectro de actividad, excelentes propiedades de limpieza.
- Ventajosa económicamente, ambientalmente amigable.

LA MEJOR
 EXPERIENCIA
 DE COMPRA

Tienes
15 días
 para cambiar
 de opinión

TUS  VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Desinfección de superficies



VAPOSEPT PLUS

Marca: Septodont

Ref. 65769 750 ml.

24,00 €

Pulverizador desinfectante de acción rápida para dispositivos médicos pre-limpiados. Libre de aldehídos, tiempo de contacto 30 segundos. Eficacia bactericida, levuricida, tuberculicida, activo frente VIH, VBDV.

Desinfección de superficies



INSTRUNET INIBSA SPRAY

Marca: Inibsa
Características: 750 ml.

Ref. 58126

17,50 €

Instrunet Inibsa Spray es un desinfectante de superficies listo para usar sin aldehídos. Está indicado para la desinfección rápida de superficies de material médico (por ejemplo sillón del dentista, lámparas fotopolimerizadoras, etc.). Eficaz en 30 segundos. Es bactericida, micobactericida, levuricida, tuberculicida, fungicida y virucida.

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del **99,46%**.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Desinfección de superficies



SEPTOL SPRAY SUPERFICIES

Marca: Pierre Rolland
Características: Con spray pulverizador.
Amonio cuaternario.

Ref. 1966 1 Litro.

21,21 €

Desinfección de superficies



DESINFECTANTE ALATO

Marca: Dentaflux

Ref. 69611 Alato Desinfección de Superficies.
750 ml

7,98 €

Ref. 69630 5 litros.

36,00 €

Desinfectante de superficies con base de alcohol, sin aldehídos. Listo para su uso. Amplio espectro testado según norma UNE EN 13697. Registrado en el Ministerio de Sanidad. No ataca a tapicerías de sillones. Eficaz y cómodo. Envase de 750ml con pulverizador.

Desinfección de superficies



ZETA 4 WASH

Marca: Zhermack

Ref. 55012 3 litros

26,00 €

Deterge y desodoriza todas las superficies lavables: lavabos, baños, azulejos, suelos en hospitales, clínicas, consultas de odontólogos y laboratorios protésicos dentales. A base de tensioactivos catiónicos y no iónicos, limpia rápidamente y a fondo sin dañar materiales tales como goma, madera, porcelanas, cerámicas, esmaltes y metales. ZETA 4 WASH es biodegradable en más del 90%, no es espumoso y elimina los procesos de fermentación.

INSTRUNET
INIBSA



RENOVADOS por dentro, REJUVENECIDOS por fuera.

Renovamos nuestra gama de productos INSTRUNET.
Confía la seguridad de tu clínica dental al líder en Alta Desinfección*.



*Fuente: Keystone Selleout_esp_SEM_2016



 **inibsa**
DENTAL

www.inibsadental.com



Consejo Proclínic

Desinfección de instrumentos

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA					
		Detergente	Desinfectante	Listo para su uso	Solución concentrada	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
0211	Desinfectante instrumentos ID-212 Durr	●	●		●	5'/60' ¹	●	s.d.	10-11	●	s.d.	●	●	●
0209	Desinfectante de instrumentos y fresas ID-213 Durr	●	●		●	15'/60' ¹	●	s.d.	9,7-10,7	●	s.d.	●	●	●
58123	Instrunet Inibsa Alta Desinfección		●	●		5'/30' ¹		s.d.	7	●	●	●	●	●
58124	Instrunet Inibsa Universal	●	●		●	5	●	s.d.	7,2	●	●	●	●	●
49890	Desinfectante de instrumentos Proclínic	●	●		●	5'/60' ¹	●	●	≈ 7	●	●	●	●	●
49892	Desinfectante enzimático de instrumentos Proclínic	●	●		●	5'/30' ¹	●	●	≈ 8	●	●	●	●	●
60153	Desinfección instrumentos Bestdent	●	●		●	5'/60' ¹	●	●	9,8	●	●	●	●	●

1 Eficacia tuberculocida incluida / 2 Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / 4 Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / 5 Test sobre candida albicans / 6 Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

desinfección de instrumentos



•Amplio espectro de eficacia

DETERGENTE-DESINFECTANTE DE INSTRUMENTOS 2%

Marca: Proclínic

DESDE
24,75 €

1 litro

Ref. 49890 1 litro **24,75 €**
 Ref. 49891 5 litros **105,95 €**



LIBRE DE ALDEHÍDOS

Detergente desinfectante a diluir para el tratamiento de toda la instrumentación dental antes de su esterilización. Amplio espectro de eficacia al 2% en 5 min: bactericida (SARM incluido), tuberculocida en 60 min, levaduricida. Activo frente a HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus, Herpes virus. Económico: diluir 20ml por litro de agua. Uso posible en ultrasonidos. Sin aldehídos.

desinfección de instrumentos

 **proclinic**

 • Excelente poder detergente sobre material orgánico

DETERGENTE-DESINFECTANTE ENZIMÁTICO DE INSTRUMENTOS 1%

Marca: Proclinic

DESDE

36,95 €

1 litro

Ref. 49892 1 litro **36,95 €**
Ref. 49893 5 litros **149,95 €**



LIBRE DE ALDEHÍDOS

Detergente desinfectante tri-enzimático a diluir para el tratamiento de toda la instrumentación dental antes de su esterilización. Acción detergente de alto nivel sobre los residuos orgánicos (sangre,...). Altamente compatible con todos tipos de metales (carbono de tungsteno, aluminio, titanio, acero inoxidable...). Amplio espectro de eficacia al 1% en 5 min: bactericida (BMR incluidas), levaduricida, activo frente a PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, Vaccinia virus. HIV-1. Muy económico: diluir 10ml por litro de agua. Uso posible en ultrasonidos. Sin aldehydos.

Desinfección de instrumentos

Desinfección de Instrumentos



ENZYMAX SPRAY GEL

Marca: Hu-Friedy
 Características: envase 750 ml.

Ref. 93305 Enzymax Spray Gel. 750 ml. **23,24 €**

Enzymax es un producto Pre-Tratante específico para instrumentos y para tejidos. Pulverizado sobre los instrumentos contaminados, como primera fase de la cadena de esterilización, disuelve coágulos de sangre e impide a los residuos solidificarse. Contiene un principio activo bi-enzimático e inhibidores de la corrosión con la máxima eficacia y protección. Su composición en gel transparente le permite llegar a las áreas menos accesibles, dejando bien visibles todos los detalles y reduciendo el riesgo de error. Puede ser utilizado para tratar en los tejidos las manchas de sangre y residuos.

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT ULTRA INSTRUMENTOS

Marca: Anios
 Características: Desinfección total en frío de instrumentos en 10 minutos. Listo para el uso. Baño estable durante 30 días.

Ref. 6930 5 litros. **22,20 €**

Desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído (2%). Producto listo para usar con un PH7. Actividad bactericida (EN 1040, EN 13727, EN 14561) SARM (EN 13727), fungicida (EN 1275, EN 13624, EN 14562), micobactericida (EN 14348) y activo sobre HIV, HBV, BVDV (HCV) y Herpes virus en tan solo 10 minutos. Actividad esporicida en 1 hora (NF T 72-231, T 72-301). Económico: conservación posible del baño de remojo hasta 30 días.

Desinfección de Instrumentos



INSTRUNET INIBSA ALTA DESINFECCIÓN

Marca: Inibsa
 Características: 5 litros.

Ref. 58123 **30,00 €**

Desinfectante de alto nivel eficaz contra esporas bacterianas. Formulado para la desinfección manual en frío de instrumental de la clínica odontológica y de todo tipo de instrumental sensible al calor y no resistente al proceso de esterilización. No necesita ser diluido. Esporicida en 30 minutos y virucida, bactericida, micobactericida y fungicida en 5 minutos.



crecemos

En profesionalidad, en gama y en productos de marca Proclínic. Porque queremos ofrecerte nuestra mejor versión. Desarrollamos la mejor solución a tus necesidades para seguir ofreciéndote productos de eficacia y calidad contrastadas. Los tests científicos y vuestros testimonios nos avalan.



Creceamos.
Descúbrelo.





Desinfección de Instrumentos



INSTRUNET INIBSA UNIVERSAL

Marca: Inibsa
Características: 1 litro.

Ref. 58124

35,00 €

Instrunet Inibsa Especial Universal es un detergente y desinfectante concentrado, formulado especialmente para la desinfección manual de instrumental en la clínica odontológica. Ideal para su uso en cubeta de ultrasonidos. Eficaz en solo 5 minutos.

Desinfección de Instrumentos



Más información



DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS ID-212

Marca: Dürr.
Características: Sin aldehídos. Virucida.
Concentrado: 2,5 l. para 125 l.
Se puede utilizar en ultrasonidos.

Ref. 0211

51,60 €

PRODUCTO DESTACADO

Concentrado para la desinfección y limpieza de instrumentos con óptima compatibilidad con el material.

- Bactericida (TB incluida), fungicida, virucida limitado y virus sin envoltura: Noro
- Adecuado para instrumental general, quirúrgico y rotativo
- Tiempo de acción especialmente corto en baño de inmersión: 5 minutos
- Excelente compatibilidad del material con instrumentos con partes de goma o silicona

Desinfección de Instrumentos



PEROXIL 2000

Marca: Amedics
Características: Acido Paracético

Ref. 83151 Peroxil 2000 Polvo. Concentrado: 1 Kg. 52,00 €

Ref. 83153 Peroxil 2000 Líquido. 1 litro 32,07 €

Campo De uso	Actividad biocida	Tiempo de contacto
DESINFECCION DE ALTO NIVEL	Micobactericida, Virucida, Bactericida y Fungicida	5 minutos
ESTERILIZACION QUÍMICA EN FRIO	Esporicida, Micobactericida, Virucida, Bactericida y Fungicida	10 minutos

Acido Peracético: Desinfectante para instrumentos de Alto Nivel y Esterilizante en frío en 10 minutos.

- No emite gases tóxicos para el personal.
- Los residuos pueden eliminarse de manera segura a través de la red de alcantarillado.
- Producto no agresivo con el instrumental.
- Acción potente detergente y desincrustante que puede ser usado también en ultrasonido, consiguiendo todavía mayor nivel de limpieza.
- Existe mucho instrumental considerado no invasivo que se usa en

las clínicas dentales (sin entrar en contacto con sangre) de diagnóstico, de soporte, etc... como espejos, aspiradores... que con Peroxil 2000 evitará tratar tanto en autoclave, garantizando a la vez una esterilización en frío del mismo en 10 minutos.

- Estabilidad de la solución 72 horas.

La presentación en líquido, en dos componentes para activar, presenta una estabilidad de la solución durante 14 días y está especialmente concebida para Piezas de Mano y Turbinas.

Desinfección de Instrumentos



PEROXIL 2000 DETERGO

Marca: Amedics
Características: Acido Paracético

Ref. 83152 Concentrado: 1 Kg. 42,00 €

Campo De uso	Actividad biocida	Tiempo de contacto
DESINFECCION DE ALTO NIVEL	Micobactericida, Virucida, Bactericida y Fungicida	5 minutos
ESTERILIZACION QUÍMICA EN FRIO	Esporicida, Micobactericida, Virucida, Bactericida y Fungicida	10 minutos

Peroxil Detergo añade a Peroxil 2000 un porcentaje de tensioactivo aniónico y una mezcla plurienzimática que le confiere:

- Mayor eficacia en la disgregación de la materia orgánica.
- Mayor potencia de limpieza, también si se desea en ultrasonidos.
- Muy eficaz en la limpieza de cementos, residuos en cubetas, etc...
- Peroxil 2000 Detergo se recomienda como paso previo a Peroxil 2000 al ser un producto con mayor poder de limpieza, aunque NO es imprescindible su uso previo.

Así como Peroxil 2000 presenta una dilución de color azul transparente, Peroxil 2000 Detergo presenta una dilución turbia.



Desinfección de Instrumentos

ZETA 2 SPOREX

Marca: ZHERMACK

Características:

Ref. 90203 900 gr. **52,00 €**

Desinfectante y esterilizador en polvo con un campo de acción completo. ZETA 2 SPOREX es apto para la limpieza, la desinfección de alto nivel y la esterilización química en frío de los instrumentos odontológicos (bisturís, alicates, pinzas, fresas, espejos, sondas, etc.) y, en particular, de todos los dispositivos que no pueden esterilizarse en autoclave (endoscopios, fibras ópticas, instrumentos de goma, plástico, etc.). La solución preparada permanece estable al menos 24 horas, aunque es oportuno renovarla al final del día del trabajo.



Desinfección de Instrumentos

KDM BIODES-K FORTE

Marca: KDM

Características: Desinfección y esterilización en frío.

Ref. 4463 1 litro para 200 litros **47,99 €**

Desinfectante universal para instrumentos. Limpieza en frío. Sin adheidos ni fenoles.



Desinfección de Instrumentos

QUITANET ULTRA

Marca: Septodont

Ref. 155506 1 litro. **21,00 €**

Solución concentrada para desinfección de instrumentos termosensibles. Libre de aldehídos para limpieza, desinfección y esterilización en frío de los instrumentos sensibles al calor.

- Económico de empleo: diluido (5%) sigue siendo la solución activa durante un máximo de 10 días.
- Se puede usar en el baño de ultrasonidos.
- Bactericida: NF T 72-171 y EN 13727.
- Fungicida: EN 13624 y EN 1275.
- Esporicida: NF T 72-231
- Virucida: NF T 72-180. Activo contra el virus del herpes tipo I, BVDV, PRV y el VIH - I.
- Biodegradable.



Desinfección de Instrumentos

Desde **18,95€**



DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTOS

Marca: Bestdent

Ref. 60153 Desinfectante 1 litro **18,95 €**

Ref. 60154 Desinfectante 5 litros **67,00 €**

- Anticorrosivo.
- Excelente compatibilidad de los materiales.
- Se puede utilizar en baños de ultrasonidos.
- Amplio espectro de actividad, excelentes propiedades de limpieza.



Desinfección de Instrumentos

MICRO 10 ENZIMÁTICO

Marca: Unident

Ref. 56770 1 litro **38,25 €**

Ref. 56771 2,5 litros **79,90 €**

Solución desinfectante detergente tri-enzimática sin aldehídos activa en tan solo 5 minutos para el tratamiento de todo tipo de instrumentos dentales y quirúrgicos antes de su esterilización. Amplio espectro de eficacia (Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561; Tuberculocida (en 30mn) EN 14348, EN 14563; Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562; Virucida: EN 14476 VIH-1, PRV* (VHB), BVDV* (VHC), Herpesvirus y Vaccinia virus). Alto poder detergente sobre residuos orgánicos tal como proteínas, grasas y azúcares. Ph. neutro: compatible con todos tipos de instrumentos incluso las fresas. Dilución muy económica al 1% (1L de concentrado = 100L de solución lista para el empleo. Se utiliza tanto en cubeta de desinfección como en cuba de ultrasonidos. Contiene inhibidores de corrosión que protegen los instrumentos contra la oxidación. Suave perfume a Limón.



Desinfección de Instrumentos

MICRO 10 EXCEL

Marca: Unident

Características: Detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección del instrumental. Activo en 10 minutos al 2%. Sin aldehídos.

Ref. 56774 1 litro **38,25 €**

Ref. 56775 2,5 litros **79,90 €**

Solución **desinfectante detergente concentrada sin aldehídos de nueva generación** para la desinfección y limpieza de todos los instrumentos dentales y quirúrgicos, incluso fresas. Nueva sinergia de principios activos para una eficacia desinfectante e detergente excepcional con unas propiedades anticorrosivas sin precedentes. Bactericida EN 1040, EN 13727, EN 14561; Micobactericida: EN 13438, EN 14563; Fungicida: EN 13624, EN 14562; Trichophyton: EN 14562; Virucida: HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpesvirus, Norovirus, Vaccinia virus, Rotavirus. **Eficacia completa en solo 10 minutos al 2% o 30 minutos al 1%**. Olor agradable

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT TRI ENZYMATIC

Marca: Anios

Ref. 69286 1 litro

Ref. 69287 5 litros + dosificador

30,07 €
151,50 €

Detergente desinfectante tri-enzimático a diluir para el tratamiento de toda la instrumentación dental antes de su esterilización. Tiene una acción detergente de alto nivel sobre los residuos orgánicos como la sangre. Se puede usar en cubeta o en ultrasonidos. Actividad bactericida en 5mn (EN 1040, EN 13727, EN 14561), levaduricida en 5mn (EN 1275, EN 13624, EN 14562) y activo según EN 14476 en 5mn, sobre PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia, VIH-I. Económico: diluir al 1%, es decir, en 10ml por litro de agua. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT 3H RAPID

Marca: Anios.

Ref. 69280 Botella dosificadora de 1 l.

Ref. 69274 1x5L+1 bomba dosificadora 20 ml

24,80 €
113,04 €

Detergente desinfectante a diluir para la desinfección de todos los instrumentos dentales antes de su esterilización. Uso posible en cubeta o en ultrasonidos. Actividad bactericida al 2% en 5 min (EN 1040, EN 13727, EN 14561) SARM incluido (EN 13727), levaduricida al 2% en 5min (EN 1275, EN 13624, EN 14562), tuberculicida al 2% en

60min (EN14348, EN 14563) y activo según EN 14476+A1 al 2% en 5min, sobre PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia, VIH- I. Económico: diluir al 2%, es decir 20ml por litro de agua. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT ASPIRATION AF+

Marca: Anios

Ref. 69288 1 litro

Ref. 69289 5 litros + Dosificador

13,95 €
63,95 €

Detergente desinfectante no espumoso para la limpieza y desinfección de todos los sistemas de aspiración. Actividad bactericida en 15 min (EN 1040, EN 13727, EN 14561), levaduricida en 15 min (EN 1275, EN 13624, EN 14562), tuberculocida en 60 min (EN14348, EN 14563), activo según EN 14476 en 5 min sobre BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus y virus Vaccinia. Económico: diluir al 2%, es decir 20ml por litro de agua. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT P.E.

Marca: Anios

Características: Polvo trienzimático, limpiador y descontaminante en 15 minutos. Con dosificador para dilución al 1%. Sin aldehídos. Se puede utilizar en ultrasonidos.

Ref. 6929 2 Kg.

Ref. 96927 5 Kg.

55,07 €
122,85 €

Polvo tri-enzimático detergente y desinfectante para toda la instrumentación dental. Uso posible en cubeta o en ultrasonidos. Actividad bactericida (EN 1040, EN 13727, EN 14561), fungicida (EN 1275, EN 13624, EN 14562), micobactericida (BK) y activo sobre virus HIV, HBV, BVDV (HCV) y Herpes virus. Económico: diluir 10g de Dentasept PE por litro de agua. Rápido: activo en tan solo 15 minutos. Fórmula sin aldehídos.

Desinfección de Instrumentos



DECIDENT

Marca: Septodont
 Características: Desinfectante de P. de Mano y Turbinas en 10 minutos.
 Ref. 1918 24 Sobres. **59,00 €**

Desinfectante de piezas de mano y C.A.

Propiedades:

- Elimina los virus de SIDA y Hepatitis B (Test Instituto Pasteur 1.986)
- Fácil de usar- Desinfecta las piezas de mano en 10 min.
- No daña el interior de los C.A. ni piezas de mano

Desinfección de Instrumentos



BACTINYL 5M

Marca: Garcin-Bactinyl
 Características: 5 l.
 Ref. 96657 **106,88 €**

Para la desinfección por inmersión, en frío, del material termosensible y material de cirugía dental. Combinado con ultrasonidos permite la limpieza y desinfección del material. Sin aldeídos. Envase de 5 litros para diluir al 2%.

Desinfección de Instrumentos



MICRO 10 LAB

Marca: Unident
 Características: 1 litro.
 Ref. 99489 Micro 10 LAB. **37,95 €**

Potente solución de limpieza concentrada con base ácida. MICRO 10 Lab resulta muy efectivo para eliminar residuos, depósitos, manchas, cementos, pastas de obturación provisionales, sarro y óxidos de metales preciosos, etc.

- Dilución: 10%
 - Limpia una amplia gama de materiales
 - Para uso en laboratorio y clínica dental
 - Marcado CE – Directiva 93/42/EEC sobre dispositivos médicos – Clase I
- Para utilizar con: Piezas de acero tratado especialmente, metales preciosos, vidrio, porcelana, plástico (espátulas, por ej), placas de vidrio, coronas, puentes, etc. **No utilizar con:** Fresas, instrumentos para conductos radiculares, instrumentos con el cromado averiado, piezas de acero no protegidas, aluminio. Para estos instrumentos, utilice MICRO 10+ o MICRO 10 Enzyme.

Desinfección de Instrumentos



UC-38 LIMPIADOR-DESINFECTANTE PARA ULTRASONIDOS

Marca: Whaledent
 Características: Limpiador y desinfectante, virucida, no corrosivo. Botella dispensadora.

Ref. 4114 Para 29 l. de disolución. **46,00 €**

Desinfección de Instrumentos



UC-32 LIMPIADOR ENZIMÁTICO PARA ULTRASONIDOS

Marca: Whaledent
 Características: Limpiador, no corrosivo, de sangre, saliva y tejidos.

Ref. 4137 Para 29 l. de disolución. **41,00 €**

Desinfección de Instrumentos



UC-30 LIMPIADOR UC-30 PARA ULTRASONIDOS

Marca: Whaledent
 Ref. 95124 **44,47 €**

Desinfección de Instrumentos



TRAYPUROL

Marca: Voco
Ref. 4847 Traypurol. 50 uds. **81,27 €**

Concentrado de limpieza probado. Para una fácil limpieza de cubetas para impresiones e instrumentos. Ventajas:

- Simplemente se diluye en agua.
- Remueve residuos de alginato, cementos de óxido de zinc, ionómetro de vidrio, carboxilato, fosfato y lacas adhesivas.
- Limpia cubetas e instrumentos, confiablemente de la noche a la mañana.
- Puede usarse con dispositivos de ultrasonidos.
- Suave y biodegradable.
- Adecuado para los metales no oxidantes y plásticos.

Desinfección de Instrumentos



DENTASEPT RENOVATOR

Marca: Anios
Ref. 55466 Concentrado. 1 litro **40,95 €**

INSTRUMENTOS COMO NUEVOS: Solución concentrada para la renovación de instrumental dental de acero inoxidable. Elimina sedimentos y manchas de manera segura y restaura el brillo del instrumental en menos de 2 horas.

- Elimina los puntos de herrumbre.
- Suprime eficazmente las trazas de minerales, proteínas y óxido de hierro.
- No abrasivo: prolonga la vida útil de los instrumentos.
- Dilución: de 0,5% a 5%.

Desinfección de Instrumentos



MICRO 10 WD TERMODESINFECTADORA

Marca: Unident
Ref. 55467 Detergente. 5 litros **59,90 €**
Ref. 55468 Neutraliser. 5 litros **59,90 €**

Micro 10 WD Detergente: Detergente trienzimático concentrado para lavadora termodesinfectadora. Excelente compatibilidad con una amplia gama de metales y materiales y elevado poder detergente sobre residuos orgánicos.

Micro 10 WD Neutralisante: Líquido de enjuague con efecto neutralizante y lubricante para lavadora termodesinfectadora. Doble acción que garantiza un secado rápido y sin trazas.

Desinfección de Instrumentos



ZETA 1 ULTRA

Marca: Zhermack
 Características: 1 litro.
Ref. 55011 **30,00 €**

Zeta 1 Ultra es un desinfectante y detergente concentrado sin aldehídos con un campo de acción completo, puesto a punto y probado en base a las nuevas normas europeas validadas sobre la desinfección. Zeta 1 Ultra es apto para la detersión y la desinfección de alto nivel de los instrumentos odontológicos quirúrgicos y rotatorios, incluidos los más delicados (bisturís, alicates, pinzas, fresas, espejos, sondas, etc.).

Desinfección de Instrumentos



CUBETA DE DESINFECCIÓN

Marca: Larident
 Características: Cubeta con capacidad de 3 litros.
Ref. 4194 **47,85 €**

Cubeta para desinfección por inmersión, de plástico duro y compatible con cualquier tipo de soluciones. Incluye cesta interior, es esterilizable en autoclave y tiene una capacidad de 3 litros.

Desinfección de Instrumentos



CUBETA DESINFECCIÓN LARIDENT

Marca: Larident
 Características: 26 cm x 11 cm x 8 cm. Capacidad de 1,25 l. Con bandeja interior perforada, para extraer los instrumentos.

Ref. 4107 **34,09 €**

Desinfección de Instrumentos



CUBETA DESINFECCIÓN INIBSA

Marca: Inibsa
Características: 33 cm. largo, 20 cm. ancho, 12 cm. altura.

Ref. 5817 **55,21 €**

Desinfección de Instrumentos



HYGOBOX CUBETA DESINFECCIÓN

Marca: Dürr
Características: Cubeta con capacidad de 3 litros.

Ref. 89806 Interior Azul **73,30 €**
Ref. 89879 Tapa Azul **73,30 €**



Consejo Proclinic

Desinfección de fresas

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA				
		Detergente	Desinfectante	Listo para su uso	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
0216	Desinfectante para fresas ID-220 Dürr	●	●	●	1 ¹	●	●	12,9-13,9	●	s.d.	●	●	●
58125	Instrunet Inibsa Especial Fresas	●	●	●	5'/60' ²	●	s.d.	n.d.	●	s.d.	●	●	●
49894	Desinfectante de fresas y limas Proclinic	●	●	●	15'/60' ¹	●	●	≈ 7,8	●		●	●	●
60155	Desinfección fresas Bestdent	●	●	●	15'/30' ¹	●	●	≈ 8,5	●	●	●	●	●

¹ Eficacia tuberculocida incluida / ² Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / ⁴ Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / ⁵ Test sobre candida albicans / ⁶ Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

desinfección de fresas



 •Compatible con todo el instrumental rotativo

DETERGENTE-DESINFECTANTE DE FRESAS Y LIMAS

Marca: Proclinic

Ref. 49894 2 litros

29,50 €

1 unidad

 LIBRE DE ALDEHÍDOS

Detergente desinfectante listo para su uso para el tratamiento de toda la instrumentación rotativa antes de su esterilización. Fórmula especialmente desarrollada para el instrumental de níquel, aluminio, titanio, y carburo de tungsteno. Bactericida en 5 min, levaduricida en 15 min, tuberculicida en 60 min, activo en 5 min frente a PRV (virus modelo HBV), Herpes virus, BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus. Uso posible en ultrasonidos. Sin aldehydos.



Desinfección de Fresas

Sólo por
22,45 €



CON
LOS QUE TÚ
AHORRAS

DESINFECCIÓN DE FRESAS

Marca: Bestdent

Ref. 60155 Desinfectante de fresas 2 litros

22,45 €

- Anticorrosivo
- Excelente compatibilidad de los materiales.
- Su valor ph suave preserva la abrasividad de los filos de corte.
- Amplio espectro de actividad, excelentes propiedades de limpieza.

Desinfección de Fresas



ID-220. DESINFECCIÓN DE FRESAS

Marca: Dürr
Características: Sin aldehydos. Listo para su uso.
Virucida. Se puede utilizar en ultrasonidos.

Ref. 0216 2,5 litros. 34,20 €

Desinfección de Fresas



DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

Marca: Anios

Ref. 69275 2 litros.

29,75 €

Ref. 69276 5 litros.

62,78 €

Detergente desinfectante listo para el empleo. Para la desinfección de toda la instrumentación rotativa antes de su esterilización. Fórmula especialmente desarrollada para los instrumentos a base de níquel, aluminio, titanio, y carburo de tungsteno. Actividad bactericida en 5mn (EN 1040, EN 13727, EN 14561), levaduricida en 15mn (EN 1275, EN 13624, EN 14562), tuberculicida en 60mn (EN 14348, EN 14563) y activo según EN 14476+A1 en 5mn sobre PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia. Fórmula sin aldehydos.

Desinfección de Fresas



ID-213 DESINFECCIÓN DE FRESAS E INSTRUMENTOS

Marca: Dürr
Características: Sin aldehydos. Virucida. Al 2% en bandeja en 1 hora. Al 2% en cuba de ultrasonidos en 15 minutos.
Concentrado: 2,5l. para 125 litros.

Ref. 0209 56,50 €

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



Desinfección de Fresas

INSTRUNET INIBSA ESPECIAL FRESAS

Marca: Inibsa

Ref. 58125 2 litros. **37,52 €**

Instrunet Inibsa Especial Fresas es una solución desinfectante y detergente lista para usar para el tratamiento de fresas e instrumentos de endodoncia antes de su esterilización. Ideal para uso en cubeta de ultrasonidos. Eficaz en 5 minutos.



Desinfección de Fresas

ROTAGERM ULTRA

Marca: Septodont

Características: Virucida.

Ref. 155505 2 litros. **24,00 €**

Desinfección y limpieza de fresas

Propiedades:

- Bactericida, fungicida y virucida
- Inhibidor de la corrosión
- Actúa sobre el virus de Hepatitis B, herpes y SIDA



Consejo Proclinic


Desinfección de aspiración

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA				
		Detergente	Desinfectante	Solución concentrada	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
0300	Detergente aspiración MD-555 Durr	●		●	30'-120'	●	s.d.	1,5-2,5		s.d.			
0204	Desinfectante aspiración Orotol Plus Durr	●	●	●	60'	●	s.d.	10-11	●	s.d.	●	●	●
58128	Instrunet Inibsa Aspiración	●	●	●	5/60'	●	s.d.	s.d.	●	s.d.	●	●	●
49900	Desinfección aspiración Proclinic	●	●	●	15'/60' ¹	●	●	≈ 10.5	●		●	●	●
60160	Desinfección aspiración Bestdent	●	●	●	2'/60'*	●	●	≈ 8	●	●	●		●

¹ Eficacia tuberculocida incluida / ² Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / ⁴ Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / ⁵ Test sobre candida albicans / ⁶ Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

desinfección de aspiración

 **proclinic**

 Triple acción : detergente, desinfectante y desincrustante

DETERGENTE-DESINFECTANTE ASPIRACIÓN 2%

Marca: Proclinic

DESDE
17,35 €
l litro

Ref. 49900 1 litro **17,35 €**
Ref. 49901 5 litros **63,50 €**

Solución concentrada no espumosa de triple acción (detergente, desinfectante y desincrustante) para la limpieza y desinfección de todos los sistemas de aspiración dentales. Previene la formación de biopelículas. Amplio espectro de eficacia al 2%: bactericida en 15 min, levaduricida en 15 min, tuberculicida en 60 min, activo en 5 min frente a BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus y Vaccinia virus. Económico: diluir 20ml por litro de agua. Sin aldehídos.



LIBRE DE ALDEHÍDOS

Desinfección de Aspiración



Desinfección de Aspiración

Sólo por
30,95 €



DESINFECCIÓN DE ASPIRACIÓN

Marca: Bestdent
Ref. 60160 2,5 litros

CON
LOS QUETÚ
AHORRAS


30,95 €

- Establecida y probada la fórmula para todos sistemas de aspiración.
- Sin formación de espuma.
- Amplio espectro de actividad en 5 minutos.



Desinfección de Aspiración



OROTOL PLUS 2,5 L. - CONCENTRADO

Marca: Dürro
Características: Desinfectante de la aspiración.
Concentrado: 2,5 l. para 125 litros.
No genera espuma. Sin aldehídos.

Ref. 0204 **51,20 €**

PRODUCTO DESTACADO

Desinfección de sistemas de aspiración Orotol plus. Concentrado líquido sin espuma para la desinfección, desodoración, limpieza y mantenimiento simultáneos de todos los sistemas de aspiración y separadores de amalgama.

- Bactericida (TB incluida), fungicida, virucida limitado y virus sin envoltura: Adeno, Noro
- Elimina, desinfecta el biofilm y previene la obstrucción por sangre y proteínas
- Efecto prolongado – no desarrolla resistencia contra los gérmenes

Desinfección de Aspiración



DEKASEPTOL 6L.

Marca: Kavo
Características: Limpieza y desinfección de los sistemas de evacuación y escupidera.

Ref. 0409 **74,00 €**



Desinfección de Aspiración

OROcup DOSIFICADOR

Marca: Dürr

Ref. 0203

50,40 €



Desinfección de Aspiración

DENTASEPT ASPIRATION AF+

Marca: Anios

Ref. 69288 1 litro + dosificador

13,95 €

Ref. 69289 5 litros + dosificador

63,95 €

Detergente desinfectante no espumoso para la limpieza y desinfección de todos los sistemas de aspiración. Actividad bactericida al 2% en 5mn (EN 1040, EN 13727, EN 14561), levaduricida al 2% en 5mn (EN 1275, EN 13624, EN 14562), activo según EN 14476+A1 al 2% en 5mn, sobre BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia. Económico: diluir al 2%, es decir, 20ml por litro de agua. Rápido: activo en tan solo 5 minutos. Fórmula sin aldehídos.



Desinfección de Aspiración

LIMPIADOR MD-555

Marca: Dürr

Ref. 0300

Envase de 2,5 ml.

34,60 €



Desinfección de Aspiración

INSTRUNET INBSA ESPECIAL ASPIRACION

Marca: Inibsa

Ref. 58128 1 litro

25,00 €

Instrunet Inibsa Especial Aspiración es un desinfectante de triple acción: desinfectante, desincrustador y limpiador concentrado en 15 minutos. Indicado para todo tipo de sistemas de aspiración en entornos dentales. No produce espuma. Es bactericida, levuricida, tuberculicida y virucida



Desinfección de Aspiración

DEKASEPTOL

Marca: Kavo

Características: 3 litros + dosificador

Ref. 0408

91,00 €

Limpieza y desinfección de los sistema de evacuación y escupidera.



Desinfección de Aspiración

VACUCID 2

Marca: Unident

Características: Detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección de sistemas de aspiración. Activo en 15 minutos al 2%. Sin aldehídos.

Ref. 68343 1 litro

15,90 €

Ref. 68344 5 litros

57,50 €

Solución concentrada para la limpieza, la desinfección y la desodorización de todos los sistemas de aspiración.

- Fórmula no espumosa sin fenol, sin aldehído ni cloro.
- Muy económico: a diluir al 2 %.
- Muy rápido: desinfección en 15 minutos.
- Amplio espectro de actividad: bactericida incluyendo mycobacterium tuberculosis (BK), fungicida y desactivación de virus HIV, HBV, HCV.
- Un envase 1 litros de Vacucid = 50 litros de solución lista para usar.

Desinfección
de Aspiración



ASEPTOL S.A.

Marca: Septodont
Ref. 65770 5 litros con dosificador

111,00 €

Solución de limpieza y desinfección para sistemas de aspiración. Libre de aldehídos, sin espuma, efecto desodorizante, dilución al 2%, Tiempo de contacto 15 min. Eficacia bactericida, levuricida, tuberculicida, VIH.

Desinfección
de Aspiración



PULI-JET

Marca: Cattani
Características: Desinfectante de la aspiración.
5 litros para 100 l.

Ref. 2068

63,60 €

PRODUCTO DESTACADO

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración. Efecto bactericida. Diluir 50 ml. de Puli-Jet por 1 litro de agua tibia.

Desinfección
de Aspiración



PULI-JET PLUS NEW

Marca: Cattani
Características: 1 litro concentrado

Ref. 22782

53,60 €

Detergente desinfectante concentrado antical. Para aspiración dental de todos los tipos, anillo líquido, húmedo y aire.
• bactericida • fungicida • tuberculicida • virucida (VIH, VHB, VHC).
No contiene fenol. Con aroma a naranja.
Es recomendable desinfectar el equipo de aspiración cada tarde, al final de la jornada de trabajo y efectuar un lavado de limpieza al menos a mitad de la jornada.

Desinfección
de Aspiración



ANTIESPUMÓGENO-DESINFECTANTE

Marca: Cattani
Características: Caja con 50 pastillas.
En base a Bronopol.

Ref. 2082

48,03 €

Las ya tradicionales pastillas antiespumógenas han sido ahora mejoradas añadiéndoles un desinfectante de amplio espectro (Bronopol), para conseguir la desinfección continua desde el filtro de los tubos de aspiración hasta el desagüe.
La silicona que incorporan las pastillas evita la formación de espuma y las consiguientes averías de los vasos separadores y sistema de aspiración en general.

Desinfección
de Aspiración



ANTIESPUMÓGENO SANITIZANTE

Marca: Cattani
Características: Caja con 50 pastillas.
En base a Bronopol.

Ref. 7699

50,33 €

Las ya tradicionales pastillas antiespumógenas han sido ahora mejoradas añadiéndoles un desinfectante de amplio espectro (Bronopol), para conseguir la desinfección continua desde el filtro de los tubos de aspiración hasta el desagüe.
La silicona que incorporan las pastillas evita la formación de espuma y las consiguientes averías de los vasos separadores y sistema de aspiración en general.

Desinfección
de Aspiración



CALBENIUM AIREL

Características: Concentrado. Tratamiento del agua de los sprays de los equipos.
Desinfecta y evita el depósito de cal.

Ref. 55119

Calbenium I l.

85,21 €

Ref. 99585

Calbenium Menta I l.

85,21 €

Es un compuesto para el tratamiento del agua de los sprays de los equipos dentales perfectamente adaptado a la eliminación de las principales bacterias patógenas de la cavidad bucal. Su acción es desinfectante, protegiendo de la contaminación bacteriana y viral no sólo al equipo dental, sino también al paciente, al dentista y al asistente. Además, el CALBENIUM evita el depósito de cal en los equipos dentales y confiere al agua propiedades limpiadoras, tensio-activas, aromatizantes, edulcorantes, desensibilizantes sobre las encías e isotónicas. Se presenta en concentrado líquido para su utilización en los dosificadores Airel. Cada litro de líquido permite la mezcla con 50 litros de agua. También está disponible en bolsas listas para el empleo en implantología. El CALBENIUM se utiliza en todas las prácticas, endodoncia, parodontología, clínica e implantología.



Desinfección de Aspiración

PUREVAC

Marca: Sultan
Características: Desinfectante de la aspiración. 2 litros. Disuelve enzimáticamente los detritus orgánicos.

Ref. 6835 **59,27 €**

Solución para la limpieza de sistemas de aspiración eficaz, económico y fácil de utilizar.
- Disuelve y destruye material de impresión, tejidos orgánicos, fragmentos óseos, sangre coagulada, gel de flúor y demás restos dentales.
- Previene la acumulación de cal en la bomba - No produce espuma
- Agradable aroma a limón - Totalmente biodegradable
- Económico: altamente concentrado, cada envase de 2 l. permite 67 tratamientos. Un tratamiento diario es suficiente.



Desinfección de Aspiración

SEPTOL ASPIRATION

Marca: Acteon Satelec

Ref. 49789 5 Litros con dosificador de 20 cc. **59,20 €**

Ref. 10122 750ml. **21,30 €**

Desinfección de las superficies de los dispositivos médicos.

INDICACIONES

Desinfectante de acción rápida, en el campo dental, para los cuerpos de las lámparas de polimerizar y los componentes externos de los cabezales de los dispositivos radiológicos (dispositivos médicos no inmersos y no invasivos).

PROPIEDADES

SEPTOL Spray es el resultado de la asociación de tres moléculas desinfectantes, que tienen diferentes mecanismos de acción antimicrobiana. Por otro lado, contiene un alto porcentaje de alcohol, lo que asegura un secado rápido y sin rastro. No contiene aldehídos y no deja rastro de película de grasa después de la pulverización. Líquido transparente incoloro, ligeramente perfumado. SEPTOL Spray cumple con los siguientes estándares actuales: Bactericida: NF EN 13727 - NF EN 1040 - NF EN 1276. Fungicida: EN 1650 (C. albicans) - NF EN 1275 (C. albicans). Actúa sobre: Rotavirus, HIV-1, BVDV (sustituto Hepatitis C), Hepatitis B, Virus gripe A [H1N1], Virus Herpes Humano tipo 1, K (Tuberculosis micobacteriana).



Desinfección de Aspiración

BIOKLAIR DIARIO

Marca: KDM
Características: 5 litros.

Ref. 59246 **51,41 €**

Concentrado para mantenimiento diario. No produce espuma. Biodegradable.



Consejo Proclinic

Limpieza de manos

Referencia	Productos	USO				FÓRMULA			EFICACIA ANTIMICROBIANA				
		Detergente	Desinfectante	Listo para su uso	Tiempo de contacto	Sin aldehídos	Sin sustancias CMR ²	pH	Bactericida	Eficacia BMR ⁴	Fungicida ⁵	Tuberculocida	Eficacia virucida limitada ⁶ (virus encapsulados como HIV-1, HBV, HCV)
0222	Loción lavado manos HD-435 Durr	●		●		●	s.d.	4,9-5,9	Solución limpiadora				
58120	Instrunet GAM gel antiséptico manos		●	●	30"/5**	●		7-9	●		●	●	
49903	Jabón suave Proclinic	●		●		●	●	≈ 6,3	Solución limpiadora				
49904	Gel desinfectante 30 segundos Proclinic		●	●	30"	●	●	≈ 5,5	●	●	●	●	●
60161	Jabón para manos Bestdent	●		●		●	●	≈ 6,3					

1 Eficacia tuberculocida incluida / 2 Sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas / 4 Eficacia sobre bacterias multi-resistentes según EN 13727 / 5 Test sobre candida albicans / 6 Según recomendaciones RKI / ● Eficacia virucida completa según EN 14476 (2013) / *Según microorganismo o propósito, para más detalles consulte instrucciones específicas de cada producto / * s.d. = sin datos.

limpieza de manos

 proclinic



- + Sin colorante
- + Sin perfume

GEL DESINFECTANTE 30 SEGUNDOS

Marca: Proclinic

18,40 €

1 unidad

Ref. 49904 500 ml.



LIBRE DE ALDEHÍDOS



DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

*Ha sido testado satisfactoriamente en un estudio clínico con fecha 26/05/2015 en el laboratorio HYDENT.

Gel en base hidroalcohólica para una rápida desinfección higiénica y quirúrgica de las manos. Desinfección quirúrgica según EN 12791 en tan solo 90 segundos. Desinfección higiénica según EN 1500 en 30 segundos. Amplio espectro de eficacia: bactericida, tuberculicida, levaduricida, dilucida. No contiene perfume ni colorante. Contiene agentes hidratantes y emolientes. Se usa sobre manos visiblemente limpias y secas. No necesita enjuagado de las manos después de la fricción. Muy suave y no pegajoso.

Limpieza de manos



Limpieza de manos

IPSOSOL SOLUCIÓN MANOS

Marca: Salló

Ref. 93509	75 ml	3,80 €
Ref. 93510	1 litro	11,99 €
Ref. 93511	5 litros	41,59 €

Antiséptico para piel sana. Desinfectante de manos. **Solución hidroalcohólica para el tratamiento higiénico y prequirúrgico de manos.** Virucida (inactivación de virus con y sin envuelta lipídica): gripe A/H1N1, VIH, hepatitis B y C, herpes virus y rotavirus, gripe aviar, SARS corona virus, vaccinia virus, Papova virus, MRSA...

Actividad microbiológica: Bactericida, Levaduricida, Fungicida, Micobactericida, Tuberculicida.

- Eficacia en 30 segundos.
- Aplicación por frotado de manos. No necesita aclarado.
- No produce irritación. Cumple las normas europeas:

• EN 1500 • prEN 12054 • EN 12791
• EN 1650 • EN 14476 • EN 14348

Producto registrado y autorizado por la AEMPS. N° Reg 653-DES

Sobre las manos limpias y secas, aplicar dos dosis de 3ml de producto puro y frotar las manos durante un mínimo de 30", según proceso descrito en la norma UNE-EN 1500.

Dejar secar hasta su total evaporación.



Limpieza de manos

IPSOGEL SOLUCIÓN MANOS

Marca: Salló

Ref. 93512	75 ml	3,80 €
Ref. 93513	1 litro	11,99 €
Ref. 93514	5 litros.	41,59 €

Antiséptico para piel sana. - Desinfectante de manos. **Gel hidroalcohólico para el tratamiento higiénico de manos.**

Actividad microbiológica: Bactericida, Levaduricida, Fungicida.

- Eficacia en 30 segundos.
- Aplicación por frotado de manos. No necesita aclarado.
- No produce irritación.

Cumple las normas europeas:

• EN 1500 • prEN 12054 • EN 12791
• EN 12791 • EN 1650

Producto registrado y autorizado por la AEMPS. N° Reg 648-DES

Sobre las manos limpias y secas, aplicar dos dosis de 3ml de producto puro y frotar las manos durante un mínimo de 30 segundos, según proceso descrito en la norma UNE-EN 1500. Dejar secar hasta su total evaporación.



Limpieza de manos

DERMOCOL GEL NEW

Marca: Unident

Características: Desinfección de manos en seco. Hidratante. Bactericida, fungicida, activo frente HIV

Ref. 56766 500 ml.

9,55 €

Gel hidro-alcohólico tixotrópico, listo para usar; para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos. DERMOCOL Gel tiene una acción rápida y siendo ideal para el uso entre dos pacientes. Contiene sustancias protectoras que hidratan sus manos y mantienen el pH natural de la piel, previniendo la formación de zonas agrietadas. Amplio espectro de eficacia en tan solo 30 segundos: Bactericida: EN 1040 prEN 12054, EN 1500, EN 12791; SARM; Tuberculicida: EN 14348; Levuricida: EN 1650; Virucida EN 14476+A1 (30 sec): VIH-I, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus VHC), Herpesvirus, Rotavirus, Adenovirus, Poliovirus, Norovirus, Coronavirus* (SARS), Virus de la gripe H5N1 y H1N1. Aroma fresco.



Limpieza de manos

INSTRUNET INIBSA JABÓN BIOCIDA

Marca: Inibsa

Características: 1 unidad

Ref. 58127 500 ml.

13,20 €

Instrunet Inibsa Jabón Biocida, jabón antiséptico para piel sana con clorexidina al 4%. Amplio espectro de acción.



Limpieza de manos

INSTRUNET INIBSA GAM

Marca: Inibsa

Ref. 58120 Instrunet GAM Gel Antiséptico. 500ml. **15,50 €**

Instrunet Inibsa Especial GAM está indicado para el tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de manos.

Es bactericida, fungicida y virucida en 30 segundos.



Limpieza de manos

STERILLIUM 500

Marca: Hartmann

Características: Solución para la desinfección rápida y eficaz para las manos. Frotar sin necesidad de agua. Dermoprotector

Ref. 5520 Sterillium 500 ml.

9,95 €

Ref. 5522 Dosificador para S-500

5,04 €

STERILLIUM 1000

Ref. 5521 Sterillium 1000 ml.w

17,14 €

Ref. 5523 Dosificador para S-1000

7,16 €

Antiséptico por frotación, para las manos, con base alcohólica y protector para la piel.

Propiedades del producto:

- Eficaz frente a un amplio número de microorganismos y virus.
- Desinfección quirúrgica de las manos en 3 minutos.
- De acción rápida y con efecto prolongado.
- Especialmente suave para la piel debido a sus aditivos para el cuidado de la piel.
- Reduce la flora transitoria en un 99,99% en 30 segundos.
- Muy bien tolerado para la piel, incluso en usos muy prolongados.
- Eficaz contra flora residente en la piel.
- Puede usarse en cualquier lugar y momento sin precisar un lavabo o toalla.

Actividad microbiana. Bactericida, fungicida, inactivante vírico contra HBV, herpes (tipo 1 y 2), HIV, papovirus, rotavirus y vacinia.

Es de destacar que Sterillium ha demostrado su acción inactivadora del virus de la hepatitis B en pruebas con primates. Se ha podido demostrar que una muestra de sangre tomada de una persona enferma y que tenía con certeza VHB infeccioso, después de haber sido tratada con sterillium no ha producido infección en los animales sobre los que se realizaron las pruebas. Esta constatación no la ha podido hacer hasta la fecha ningún otro antiséptico para manos. La gran eficacia de Sterillium se debe a los compuestos siguientes:

Compuestos alcohólicos. Sterillium contiene una combinación de propanol 2 y propanol 1. En concreto, respecto a las fórmulas de etanol, las partes de alcohol en Sterillium tienen

presiones de vaporización, lo que hace que el producto sea de acción más persistente en las capas superficiales de la piel, que son el verdadero lugar de permanencia de la flora residente. Compuesto Bactericida. El principio de acción remanente de Sterillium reside, principalmente, en el compuesto etilsulfato de mecetronio. Esta sustancia, un amonio cuaternario, se caracteriza por su indudable propiedad adsorbtiva y su acción en el nivel de las superficies de separación. Su estructura química le permite penetrar en las capas córneas (stratum corneum). Así se forma una "barrera" química en la capa córnea de la piel, contra los gérmenes situados más profundamente. Los microorganismos alcanzados son fijados de forma adsorbtiva en la piel. Con esta capa, la flora cutánea permanece protegida.

Áreas de aplicación. Una de las mayores ventajas de Sterillium radica en que puede utilizarse en cualquier lugar, sin necesidad de agua, toalla ni lavabo. Sterillium está indicado para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos. Se usa en cualquier área donde la higiene es relevante, como Clínicas Dentales, centros sanitarios, en las unidades de cuidados intensivos, quirúrgicas, etc..

Modo de empleo: Sterillium se aplica sin diluir sobre las manos secas. Debe asegurarse que estas se mantengan húmedas mientras dura el proceso de aplicación. Desinfección higiénica de manos: Aplicar al menos 3 ml. de Sterillium sobre las manos secas y frotar durante un mínimo de 30 segundos. Desinfección quirúrgica: Aplicar al menos 10 ml. de Sterillium en pequeñas cantidades, sobre manos y antebrazos y frotar durante un mínimo de 3 minutos.

limpieza de manos

 **proclinic**

- + Sin colorante y sin perfume
- Ideal para las pieles sensibles

JABÓN SUAVE

Marca: Proclinic

DESDE
9,95 €
500 ml.

Ref. 49903 2 litros **29,70 €**
Ref. 49902 500 ml. **9,95 €**

Jabón delicado, formulado sin perfume ni colorante para el lavado frecuente de las manos. Formula enriquecida en glicerina para el mantenimiento de la hidratación de la epidermis. Ideal para las pieles sensibles.



LIBRE DE ALDEHÍDOS



DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

*Ha sido testado satisfactoriamente en un estudio clínico con fecha 26/05/2015 en el laboratorio HYDENT.

Limpieza de manos



Limpieza de manos



CON
LOS QUETÚ
AHORRAS


JABÓN PARA MANOS

Marca: Bestdent
Ref. 60161 500ml. **8,50 €**
Ref. 60162 2 litros **25,50 €**

- Jabón HW Sensible 710
- Valor pH equilibrado para la piel, composición hipo-alérgica.
- Fórmula suave, pero eficaz.
- Puede ser utilizado con frecuencia sin secado de la piel

Limpieza de manos



HD-435 JABÓN DE MANOS

Marca: Dürr
Características: Solución antimicrobiana.
No alcalino. pH natural.
Para más de 200 aplicaciones.

Ref. 0222 Botella 500 ml. **11,00 €**
Ref. 02028 Botella 2,5 l. **28,40 €**



Limpieza de manos

DENTASEPT JABÓN GLICERINE

Marca: Anios

Características: Jabón suave para lavados frecuentes, especialmente para pieles sensibles.

Ref. 6932 3 botellas de 1l. + 2 dosificadores.

35,98 €

Ref. 96928 5 l.

48,29 €

Jabón suave con glicerina para el lavado frecuente de las manos. Recomendado para las pieles sensibles y los usos repetidos. Formula bacteriostática y fungistática.



Limpieza de manos

JABÓN DE MANOS EN ESPUMA

Marca: Kimcare

Ref. 93578 Jabón en Espuma Uso Frecuente (6x1l.)

74,16 €

Gel de Manos en Espuma de Calidad:

- Ideal para aseos con alto tráfico.
- 2.500 dosis x litro.
- Cartuchos de alta capacidad
- Reducción de tiempo de lavado
- Menos desperdicio de agua
- 100% Biodegradable
- Gel en Espuma de alta calidad que mantiene el frescor en sus manos tras el lavado.



Limpieza de manos

JABÓN EXTRA-SUAVE

Marca: Tork

Ref. 84075 Jabón Extrasuave Premiun. 1 litro.

5,75 €

Ref. 9352 Dispensador de jabón Elevation S1.

29,12 €

Jabón destinado a aquellos que tienen que lavar sus manos con frecuencia, como el personal médico de los hospitales, dentistas, etc. Muy suave, cremoso y espumoso; dermatológicamente probado. El jabón líquido extrasuave no perfumado Tork Premium carece de aromas y colores artificiales.



Limpieza de manos

SAPOFILM

Marca: Septodont

Características: 3 botellas 980 ml

Ref. 155512

69,00 €

Jabón especialmente formulado para lavados de manos muy frecuente. Garantiza una limpieza perfecta a la vez que sus agentes reblanecedores y formadores de película crean una capa protectora que permanece sobre la piel tras el enjuagado. Contiene conservantes para mantener la limpieza microbiológica de Sapofilm una vez abierto el Frasco.



Limpieza de manos

DISPENSADOR JABÓN Y GEL EN ESPUMA AQUARIUS

Marca: Kimberly Clark
 Características: 1.1 litro de capacidad, válvula tipo fuelle, sistema de cartuchos

Ref. 76630

14,98 €

Este producto es compatible con nuestras referencia de Proclínica 7664 y 93578
 Dispensador de jabón líquido para uso diario ultra y antibacteriano.



Limpieza de manos

CEPILLOS DE UÑAS/MANOS

Características: Lote de 3 u. Realizados en plástico blanco. Autoclavables.

Ref. 2267

7,60 €

Limpieza de manos, Vaseline

LA MEJOR
EXPERIENCIA
DE COMPRA

Tienes
15 días
para cambiar
de opinión

TUS  VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclínica.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclínica.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Cuidado personal
y prevención



VASELINA PURA

Marca: Laboratorios Vaza
 Características: Conservar entre 10 ° y 30 °C.

Ref. 60015 30 g.

1,99 €

Acondiciona los labios o la piel cortada por el frío. Suaviza asperezas, rozaduras, durezas y escoquemuras en cuerpo, pies, manos y codos.
 Lubrificante y protector general. Aplicar sobre piel sana y limpiar en cantidad suficiente en la zona a tratar.

desinfección de impresiones



UNIDENT IMPRE

Marca: Unident
Características: Desinfectante de las impresiones y sus soportes en sólo 10'.

Ref. 5546 **37,65 €**

Producto concentrado para la desinfección y limpieza de todos los materiales de impresión y sus soportes (alginatos, siliconas, polyéthers, polisulfuros, hidrocoloideos), conservando la estabilidad necesaria y la compatibilidad con el yeso. Microcinol es activo contra bacterias, incluida Tb hongos y virus HBV y HIV. Se emplea diluyéndolo al 10%. Desinfecta en sólo 10 minutos de inmersión. Después sólo hay que aclarar con agua y secar. Es económico al ser concentrado, fabricándose 10 litros de producto y tiene olor agradable. Ecológico y biodegradable, responde a las Normas Europeas AFNOR y 72301.

Desinfección de impresiones



MD-530 DISOLVENTE DE CEMENTOS

Marca: Dürr
Características: Limpiador de metales, porcelana y plásticos. 2,5 l. Listo para su uso. Sólo o para ultrasonidos.

Ref. 0218 **27,50 €**

Desinfección de impresiones



TRAY NET

Marca: Septodont
Características: Disuelve el alginato y el yeso de las cubetas. Bote de 1 Kg.

Ref. 1916 **81,00 €**

Limpieza antiséptica de cubetas. Propiedades :
- Disgrega los alginatos y escayolas por simple inmersión
- Limpia espátulas y tazones de alginato



TRAY CLEANER

Marca: Directa
Características: Disuelve el alginato y el yeso de las cubetas.

Ref. 6318 850 g. **36,19 €**

PRODUCTO DESTACADO

Tray Cleaner es una solución sencilla y práctica tanto en el gabinete como en el laboratorio para la limpieza de las cubetas de impresión. Saca los restos más resistentes; simplemente prepare la solución y meta las cubetas hasta que la suciedad se desprenda. Producto respetuoso con el medio ambiente.

Bote de 850 g. de polvo concentrado, para diluir 80 g. (volumen de la tapa) por cada litro de agua.

Desinfección de impresiones

Más información



Desinfección de impresiones



IMPRESAFE

Marca: Cavex
Características: 1 litro

Ref. 20502 **74,68 €**

Rápido, seguro, no tóxico y muy eficaz desinfectante de impresiones. Sólo tres minutos para eliminar a las bacterias, hongos y virus.

Indicaciones:

- Desinfectante para alginato, poliéter y siliconas.
- Ninguna influencia negativa en la superficie de impresión.
- Altamente concentrado ahorrando así espacio de almacenamiento: un litro de Cavex ImpreSafe es igual a 33 litros de fluido de desinfección-listo para el uso.
- Sin aldehído y sin olor.
- Cumple con las directrices de la DGHM y EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14561 y EN 14562



crecemos

En profesionalidad, en gama y en productos de marca Proclinic. Porque queremos ofrecerte nuestra mejor versión. Desarrollamos la mejor solución a tus necesidades para seguir ofreciéndote productos de eficacia y calidad contrastadas. Los tests científicos y vuestros testimonios nos avalan.



Creemos.
Descúbrelo.





líquidos para
autoclaves

AC NET

Marca: Cattani
Características: 500 ml. + Pulverizador

Ref. 0947

18,94 €

Líquido, listo para su uso, para la limpieza interna de los autoclaves médicos. Elimina manchas y residuos que se producen en los ciclos de esterilización en la cámara y los conductos internos. Una vez vacío, y sin bandejas la cámara del autoclave, pulverizar el líquido AC NET y extender con una esponja o paño en sentido circular, dejar transcurrir unos minutos y secar con un paño. Su uso está recomendado cada 10 ciclos de esterilización. También sirve para la limpieza de los conductos internos. Características: 30% Isopropanol.



Líquidos para
autoclaves

KDM BIOKLEANER

Marca: KDM
Características: Limpiador de autoclaves
Ref. 4462 500 ml. **23,75 €**



bolsas de esterilización

proclinic



BOLSAS DE ESTERILIZAR

Marca: Proclinic
Características: 200 u.

DESDE
9,40 €

200 unidades

Ref. 79931	6 x 11 cm.	9,40 €
Ref. 79930	7 x 26 cm.	19,05 €
Ref. 79954	9 x 16 cm.	18,25 €
Ref. 79932	9 x 23 cm.	21,50 €
Ref. 79933	14 x 25 cm.	28,35 €
Ref. 79947	33 x 44 cm.	64,95 €

Las bolsas autosellantes están hechas de un material plástico de uso médico llamado film transparente laminado, producido en color verde. El papel se fabrica en color blanco mediante un sistema de alta tecnología que asegura una alta protección anti-bacteriana, una excelente funcionalidad para la esterilización médica, una porosidad certificada y, a su vez, contribuye a la resistencia de los márgenes sellados. Las bolsas autosellantes son utilizadas para esterilizaciones con vapor o con óxido de etileno. La correcta esterilización, a las temperaturas recomendadas, se puede comprobar por el cambio de color de los indicadores: de rosa a marrón.

Bolsas de esterilización



BOLSAS HYGOFOL

Marca: Dürr
Características: Caja con 500 u. **Para selladora.**
Muy resistentes, en papel de 80 gr/m².
Con indicador de esterilización.
Sólo necesitan una soldadura.

Ref. 8517	Medidas: 7,5 x 30 cm	70,20 €
Ref. 8518	Medidas: 10 x 30 cm	79,56 €
Ref. 8519	Medidas: 15 x 30 cm	113,04 €

Bolsas de esterilización



BOLSAS AUTOADHESIVAS PARA AUTOCLAVE

Características: Caja con 200 u.
Con testigo de esterilización.

Ref. 2298	Medidas: 6 x 11 cm	10,50 €
Ref. 2158	Medidas: 9 x 25 cm	21,95 €
Ref. 2254	Medidas: 14 x 29,5 cm	30,75 €

Bolsas de esterilización



Desde
7,45 €



BOLSAS DE ESTERILIZAR

Marca: Bestdent

Ref. 79940	Bolsas de esterilizar 6x11 cm (200u.)	7,45 €
Ref. 79941	Bolsas de esterilizar 7x25,5 cm (200u.)	15,80 €
Ref. 79942	Bolsas de esterilizar 9x23 cm (200u.)	16,15 €
Ref. 79943	Bolsas de esterilizar 14x25 cm (200u.)	24,05 €

Bolsas de esterilización



BOLSAS ESTERILIZACIÓN ASSURE PLUS

Marca: Sultan
Características: 200 uds.

Ref. 7628	85 x 165 mm.	19,33 €
Ref. 7629	90 x 255 mm.	24,43 €
Ref. 7630	140 x 280 mm.	28,95 €
Ref. 70024	305 x 457 mm.	48,96 €

Bolsas de esterilización de la más alta calidad, con monitor interno para máxima garantía de protección. Assure Plus están fabricadas en U.S.A. siguiendo las recomendaciones CDC.
- Sellado QUAD (4 sellos) de protección en todo el perímetro de las bolsas.
- Film tintado para detectar posibles perforaciones en la bolsa.
- Papel de grado médico y film multicapa resistentes contra roturas y que proporcionan una barrera impenetrable contra los microorganismos. Test realizados por organismos independientes han comprobado que Assure Plus mantiene la esterilidad durante 2 años en condiciones de almacenaje adecuado.
- ASSURE Plus contiene el exclusivo monitor interno para máxima garantía del proceso dentro de la bolsa: verificación del proceso fuera y dentro de la bolsa.
- Gracias a la inusual resistencia del film multicapa es virtualmente imposible la rotura o el rasgado.
- Sellado hermético de la apertura que previene la separación manteniendo largo tiempo la integridad de la bolsa.

Bolsas de esterilización



BOLSAS ESTERILIZACIÓN PEELPRO

Marca: Sultan
Características: 200 u.

Ref. 9623	7 cm x 25,5 cm	19,64 €
Ref. 9624	9 cm x 25,5 cm	22,95 €
Ref. 9625	13 cm X 28 cm	28,99 €

- Sellado periférico de máxima seguridad.
- Capa de plástico de máxima resistencia a la rotura.
- Indicadores internos y externos presión-temperatura de esterilización por vapor y gas.
- Doble capa para una protección perfecta frente a pinchazos y perforaciones.
- Papel reforzado que permite que el vapor penetre y mantenga su dureza cuando está mojado. Resistente a la humedad.
- Autosellado

Bolsas de esterilización



BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN

Marca: Euronda Monoart
Características: Bolsa Esterilizar. 200 u.
Ref. 96595 9 cm x 25 cm **24,19 €**
Ref. 21771 14 cm x 25 cm **29,50 €**
Ref. 21772 19 cm x 33 cm **35,80 €**

Características: Bolsa Esterilizar. 500 u.
Ref. 85601 7.5 cm x 25 cm. **41,17 €**



rollos de esterilización



ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

Marca: Proclinic
 Características: Papel de grado médico.
 Con testigo de esterilización.
 Rollos de 200m.

DESDE
23,95 €

1 unidad

Ref. 79934	5cm x 200m.	23,95 €
Ref. 79935	7,5cm x 200m.	33,50 €
Ref. 79936	10cm x 200m.	45,95 €
Ref. 79950	15cm x 200m.	51,95 €
Ref. 79951	25cm x 200m.	84,95 €

Los rollos de esterilización están hechos de un material plástico de uso médico llamado film transparente laminado, producido en color verde. El papel se fabrica en color blanco mediante un sistema de alta tecnología que asegura una alta protección anti-bacteriana, una excelente funcionalidad para la esterilización médica, una porosidad certificada y, a su vez, contribuye a la resistencia de los márgenes sellados. Las bolsas autosellantes son utilizadas para esterilizaciones con vapor o con óxido de etileno. La correcta esterilización, a las temperaturas recomendadas, se puede comprobar por el cambio de color de los indicadores: de rosa a marrón.

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Rollos de esterilización



ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN 3M

Marca: 3M
 Características: Con testigo de esterilización.

Ref. E049	Rollo 7,5 cm. x 200 m.	37,00 €
Ref. E050	Rollo 10 cm. x 200 m.	48,95 €
Ref. E051	Rollo 15 cm. x 200 m.	60,95 €
Ref. E052	Rollo 20 cm. x 200 m.	62,95 €

Rollos de esterilización



ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

Características: Con testigo de esterilización.
 Para objetos de gran volumen. Anchura suficiente para meter las bandejas metálicas completas en el autoclave.

Ref. 4360	100 m. x 5 cm.	13,56 €
Ref. 4361	100 m. x 7'5 cm.	19,38 €
Ref. 4362	100 m. x 10 cm.	25,00 €
Ref. 4365	100 m. x 25 cm. con fuelle para bandejas	74,50 €

Ref. 4140	200 m x 5 cm.	24,99 €
Ref. 4141	200 m x 7'5 cm.	34,50 €
Ref. 4142	200 m x 10 cm.	46,95 €
Ref. 4138	200 m x 15 cm.	59,79 €
Ref. 4143	200 m x 25 cm.	109,68 €



Rollos de esterilización

Desde
15,95 €



ROLLOS DE ESTERILIZAR

Marca: Bestdent

Ref. 79944	5cm x 200m	15,95 €
Ref. 79945	7,5cm x 200m	20,35 €
Ref. 79946	10cm x 200m	29,95 €

CON
 LOS QUE TÚ
 AHORRAS



Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€



Rollos para esterilización de papel médico blanco de alto gramaje y doble capa de película celeste. Tres soldaduras laterales de canales impermeables y homogéneos para la máxima protección microbica. Dotados de indicadores químicos de viraje para esterilizaciones de vapor o de EtO gas (óxido de etileno).

EURONDA EUROSTERIL

Marca: Euronda Monoart

Características: Con testigo de esterilización.

Ref. 2173	Ancho: 5 cm. x 200 m.	28,62 €
Ref. 2174	Ancho: 7,5 cm. x 200 m.	36,25 €
Ref. 2176	Ancho: 10 cm. x 200 m.	46,95 €
Ref. 6332	Ancho: 15 cm. x 200 m.	69,95 €
Ref. 6333	Ancho: 25 cm. x 200 m.	138,00 €
Ref. 93475	Fuelle Ancho: 25 cm. x 6,5 x 100 m.	121,39 €

Rollos de esterilización



CINTA ADHESIVA INDICADORA

Marca: Amcor

Ref. 83058 Cinta Adhesiva Indicadora.

Rollo 19mm x 50 m

3,40 €

Destinadas al cierre con garantías de los paquetes realizados con envolturas para esterilización por vapor.

Con indicador de proceso Clase I (ISO 1140-1) Standard, válida para cualquier tipo de envoltura.

Rollos de esterilización

control del paquete



TIRAS COMPLY-INDICADOR QUÍMICO

Marca: 3M

Características: 240 tiras de 20 cm. (pueden convertirse en 2).

Cambia de color cuando la carga ha sido expuesta al menos a dos parámetros críticos; temperatura presión.

Ref. 3887

24,65 €



STERIGUT

Marca: Amcor

Ref. 83059 Sterigut Indicador Químico. (250 u. dobles)

16,00 €

Ref. 83060 Sterigut Integrador 3 Parámetros. (250 u.)

60,00 €

Indicador químico para vapor.

Destinados a ofrecer información al usuario de como se ha desarrollado el proceso de esterilización, de acuerdo con su clasificación. Desde la aparición de la norma UNE-EN ISO 1140-1 los indicadores químicos para esterilización se encuadran, de acuerdo con su tolerancia, en diferentes Clases siendo las 4 y 5 las más exigentes para con los requisitos de funcionamiento y márgenes de variación respecto de lo declarado.

Control del paquete



COMPLY STERIGAGE - I243B

Marca: 3M

Características: Integrador químico de vapor del más alto nivel de garantía en el control del paquete. Mide 3 parámetros; tiempo, temperatura, y nivel de vapor.

Ref. 3896

Caja de 100 unidades

62,19 €

El Integrador Químico de Vapor Comply de 3M es un dispositivo de un solo uso que indica si los artículos de dentro de un paquete han sido expuestos a las condiciones necesarias para la esterilización. La lectura es inmediata y fácil: cuando el Indicador químico se mueve a cualquier parte de la zona de aceptación, la esterilización ha sido alcanzada. Si se queda en la zona de rechazar, en el paquete no se ha alcanzado la esterilización.

Los indicadores integradores constituyen el más alto nivel de garantía y fiabilidad en el control paquete a paquete, proporcionando una información equiparable a la del control biológico.

Control del paquete



Control del paquete

STERIMAX INTEGRATOR

Marca: Sogeva
Características: 250 u.

Ref. 93494

92,50 €

Tiras indicadoras de la esterilización en autoclaves. Estas tiras monouso, de 100 x 20 mm, estas impresas con los indicadores necesarios para el control de esterilización en autoclave, conforme a la norma EN 867.

- Integran los 3 indicadores: Temperatura, Tiempo y Vapor.
- No deben introducirse en las bolsas o rollos.

Se recomienda su uso en cada ciclo de esterilización. Envase económico con 250 tiras.

PRODUCTO DESTACADO

Los Controles Biológicos son cultivos de microorganismos no patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes. Es el único sistema fiable que nos asegura la destrucción total de los microorganismos. La American Hospital Association (AHA) recomienda el uso de un control biológico una vez al día por esterilizador. Attest es un indicador biológico ideado para sustituir cualquier sistema de control biológico de esterilización empleado en laboratorios, centros clínicos y sanitarios. La principal diferencia entre Attest y las técnicas tradicionales es que los resultados se interpretan por un simple cambio de color en el medio de cultivo, en lugar de por

identificación de los organismos que han crecido en dicho medio. Los indicadores Attest contienen un reactivo (ácido-base) que cambia de color según el pH del medio de cultivo. Los microorganismos contenidos en Attest originan productos de desecho de carácter ácido que modifican el pH del medio, el cual se acidifica, cambiando su color original al amarillo. Una vez finalizada la esterilización el Attest que se ha introducido con el material a esterilizar se incuba a 56°C una vez activado. Pasadas 48 horas sin cambio de color la esterilización se considera correcta. La incubadora Attest es válida para incubar el indicador biológico Attest. La incubación se efectúa por calor seco.



Ref. 38945



Ref. 3895

control de la carga



Más información

ATTEST E INCUBADORA

Marca: 3M

Ref. 3895 Incubadora pequeña a vapor. **706,00 €**

Ref. 38945 Attest. 25 u. **100,05 €**

Ref. 38940 Indicadores para Attest. 100 u. **393,36 €**

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



Control de carga

INCUBADORA BT3

Marca: Incotrading

Ref. 86286

394,00 €

Incubadora de 3 huecos para indicadores biológicos de vapor de agua.

- Incubación simultánea
- Con una cavidad para la activación del indicador
- Termómetro digital integrado en la misma máquina
- Perfecta distribución del calor que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos



Control de carga

INDICADORES BIOLÓGICOS

Marca: Amcor

Características: 25 u.

Ref. 83063

Indicadores Biológicos 24 horas. **52,00 €**

Para control de rutina y validación de los procesos de esterilización, los indicadores biológicos están destinados a la determinación de la eficacia microbicida de los esterilizadores. Los indicadores de autocontenido presentan un vial en el que, junto con las tiras de esporas inoculadas, se encuentra el medio de cultivo necesario para su crecimiento, la tinción del medio permite que se pueda apreciar por examen visual el crecimiento bacteriano. Tiempo de incubación 24 horas para Geobacillus Stearothermophilus.

Control de carga



TEST BOWIE&DICK

Marca: Amcor
Características: 20 u.

Ref. 83061

68,00 €

Pruebas de funcionamiento para la comprobación diaria de la eficacia en la extracción del aire de cámara y la penetración del Vapor de agua a la cámara.
Test de penetración conforme ISO 11140-1 y 4

Control de carga



TEST BOWIE & DICK

Marca: Medistock

Ref. 97148 20 u.

73,40 €

Control de carga



TEST BOWIE&DICK

Marca: Sogeva

Ref. 69110 1 u.

2,99 €

Control de carga



TEST HELIX

Marca: Amcor

Ref. 83062 Test Helix
(100u. + dispositivo reutilizable).

60,00 €

Para esterilizadores de vapor equipados con sistema de pre-vacío.
Conforme con ISO 1140-1 y 5
Recomendado realizar el test en cada carga.

Control de carga



TEST HELIX

Marca: Medistock

Ref. 93724 100 Indicadores.

49,20 €

TUS  VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.