

CASOS CLÍNICOS

Proclinic Expert Bulk Fill

La restauración más rápida

Pieza 36 con endodoncia realizada



Proclinic Expert Nano Flow

Tu composite más versátil

Caries clase V en pieza 44



Proclinic Expert Nano Híbrido

Tu composite anterior/posterior ideal

Caries clase II en pieza 25

Fractura de las piezas 11 y 21



Los tests clínicos avalan la calidad de los composites
Proclinic Expert




Proclinic Expert Bulk Fill

La restauración
más rápida



El composite **Proclinic Expert Bulk Fill** es ideal para restauraciones de grandes cavidades.

CASO CLÍNICO

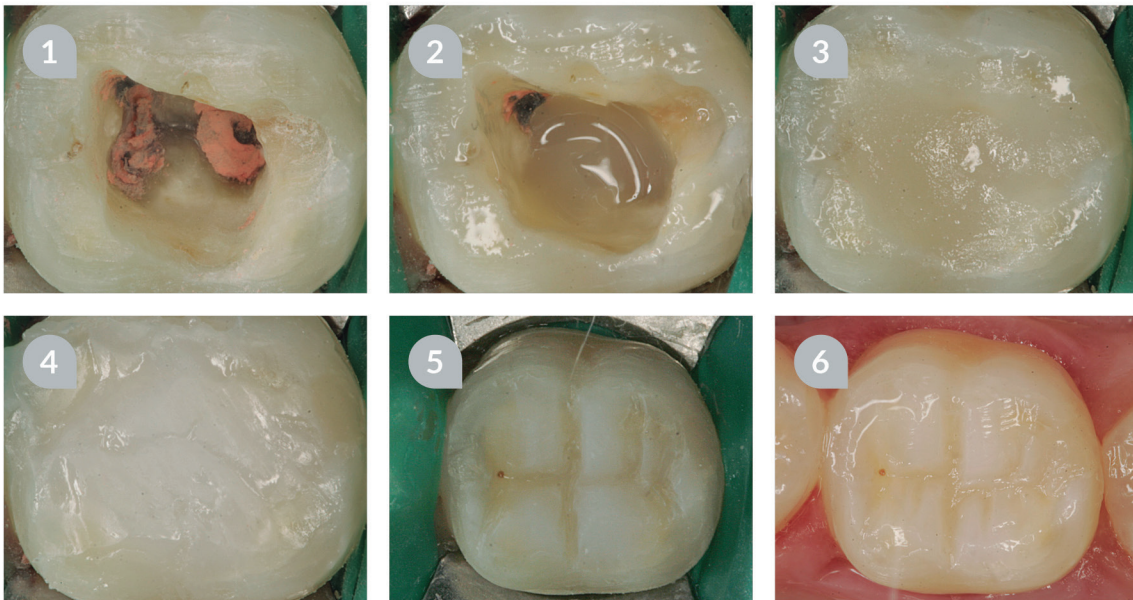

- 1 Pieza 36 con endodoncia realizada. Tras lavado, se aplica el Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert para el sellado inmediato de la cavidad.
- 2 Aplicación de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert como base. Este material se comporta de manera ideal ya que, gracias a su ajustado grado de fluidez, se mantiene en su lugar de aplicación.
- 3 Relleno de la cavidad con el nuevo Composite Bulk Fill Proclinic Expert en dos incrementos de 2-3mm, fotopolimerizando 20 segundos cada uno de ellos. La compactación del material es sencilla y realizable de manera convencional.
- 4 Aplicación de Composite Nano Híbrido Incisal en una única capa final, tratando de simular un tono esmalte y no tener sensación monocroma en la restauración.
- 5 Pulido y conformado de la anatomía oclusal de la pieza mediante fresas de turbina y grano fino.
- 6 Ajuste oclusal, pulido y abrillantado final de la restauración en boca mediante fresas de contraángulo a bajas revoluciones.


Proclinic Expert Nano Flow

Tu composite
más versátil



El composite **Proclinic Expert Nano Flow** te garantiza buenos resultados en restauraciones de cuello de diente gracias a su gran flexibilidad.

CASO CLÍNICO

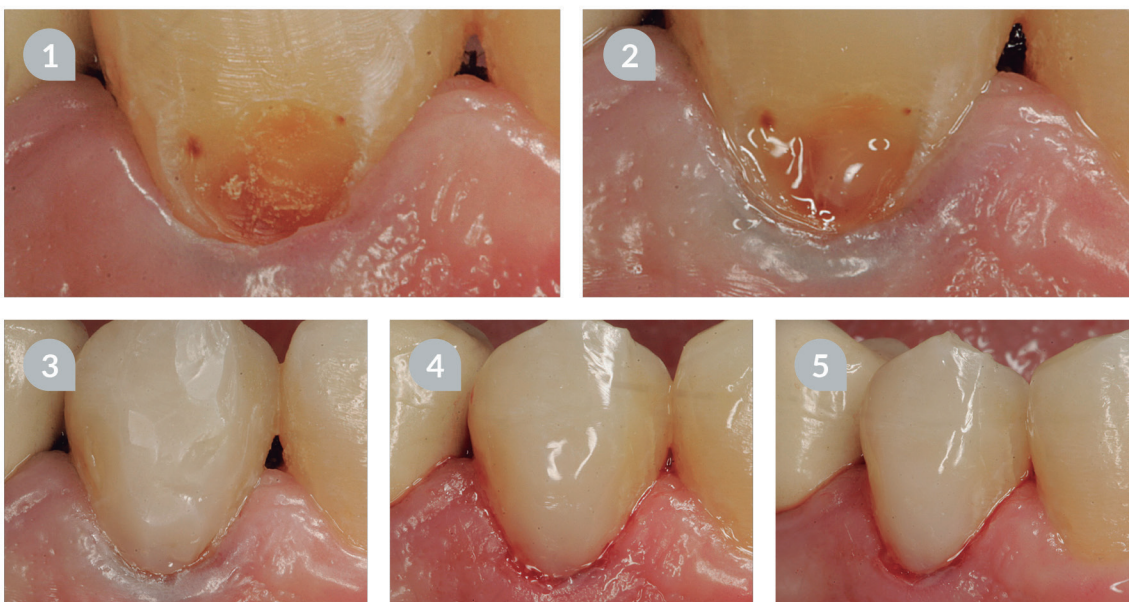

- 1/2 El paciente acude a la consulta con caries clase V en la pieza 44. Tras la remoción de la caries y la colocación del hilo retractor se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador Proclinic y a la aplicación del Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert.
- 3 Aplicación de Composite Nano Flow A3,5 Proclinic Expert. Seguidamente, se aplica Composite Nano Híbrido A3,5 Proclinic Expert y para finalizar Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.
- 4 Retirada de hilo retractor y pulido de la pieza con fresas diamantadas de grano fino y con copas de goma a baja velocidad.
- 5 Resultado final inmediato.


Proclinic Expert Nano Híbrido

Tu composite
más versátil



El composite **Proclinic Expert Nano Híbrido** resulta perfecto tanto para restauraciones anteriores como posteriores.

CASO CLÍNICO

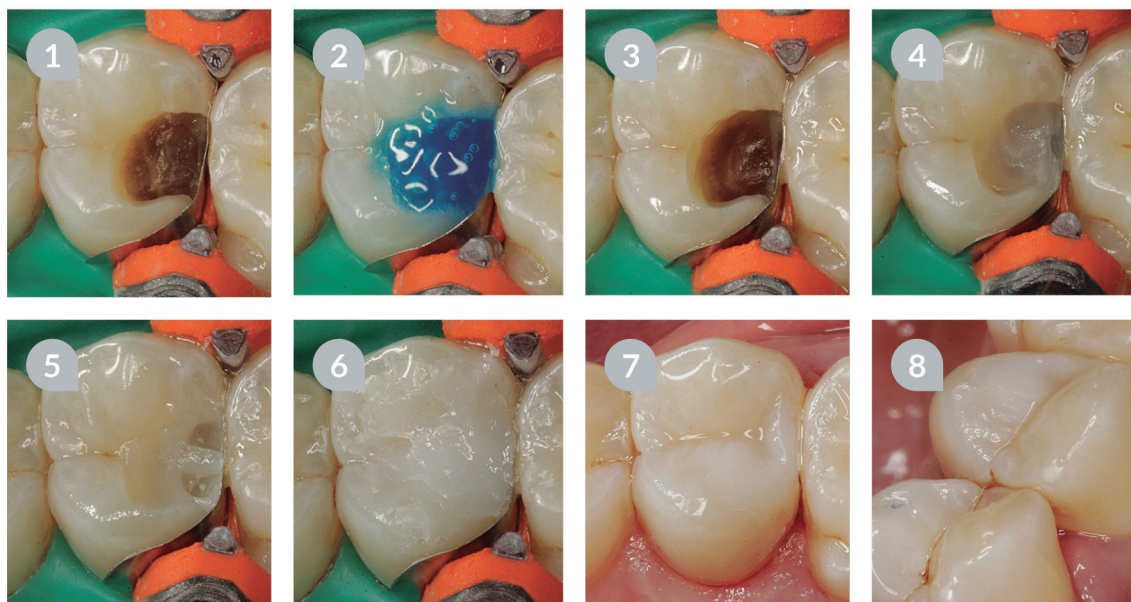


- 1 Caries penetrante en distal pieza 25 sin afectación pulpar.
- 2 Tras la remoción del tejido careado se aplica matriz seccional y se procede al grabado total con el Ácido Gel Grabador Proclinic durante 20 segundos.
- 3 Acto seguido se utiliza Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert durante 20 segundos.
- 4 El fondo de la cavidad se recubre con base Composite Nano Flow B2 Proclinic Expert. Se polimeriza durante 20 segundos.
- 5 El punto de contacto se realiza con Composite Nano Híbrido C3 Proclinic Expert.
- 6 Recubrimos la capa superior con Composite Nano Híbrido Incisal Proclinic Expert.
- 7 Resultado final tras pulido y abrillantado con copas de goma a bajas revoluciones.
- 8 Integración de la restauración en la cavidad oral.



El composite **Proclinc Expert Nano Híbrido** contiene un agente fluorescente que asegura la apariencia natural del diente y es de muy fácil manipulación.

CASO CLÍNICO

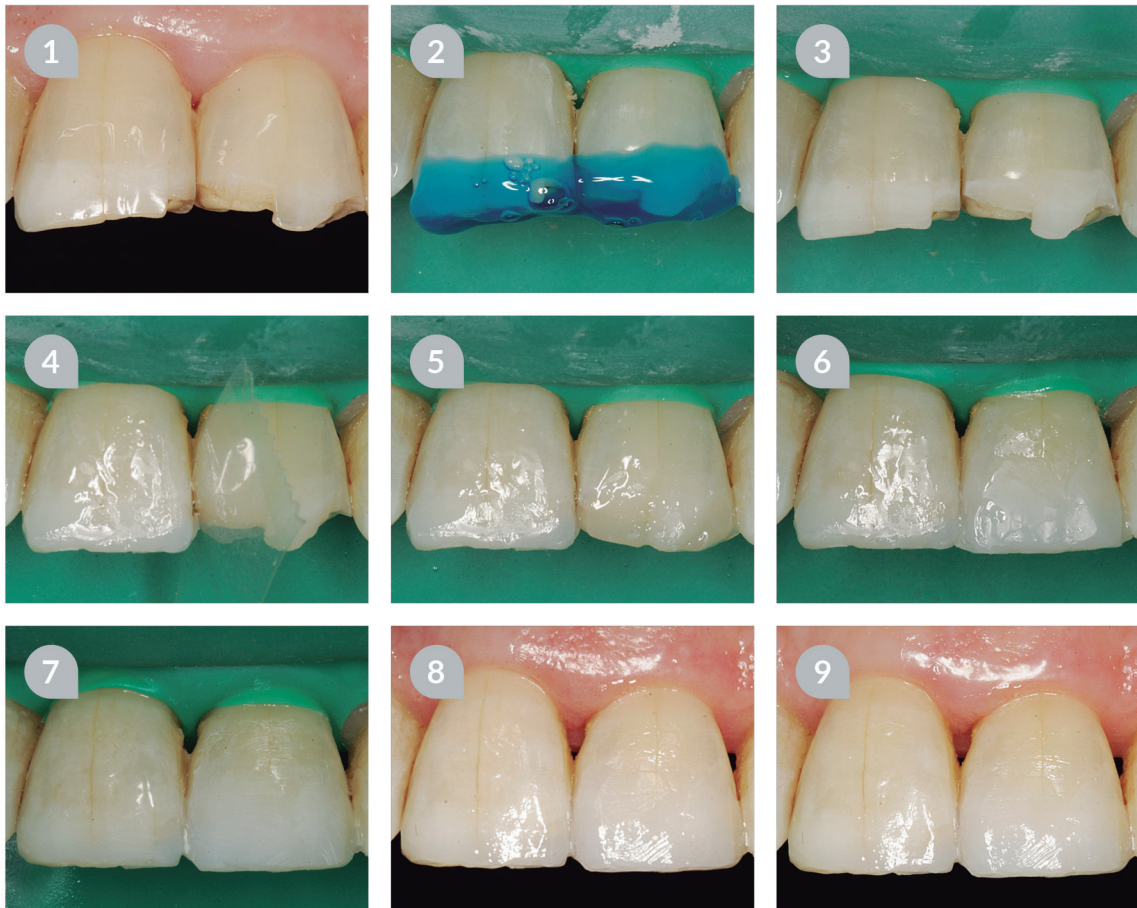

- 1 El paciente acude a la consulta con las piezas 11 y 21 fracturadas con largo tiempo de evolución. Requiere solución económica y rápida de las piezas. Se realiza control de RX y pruebas de vitalidad en la pieza 21. Se ofrece gingivectomía en esta pieza para mejorar proporciones y simulación de fisura vertical, pero el paciente no está interesado.
- 2 Tras la preparación, se procede al grabado ácido con el Ácido Gel Grabador Proclinc durante 20 segundos.
- 3 Resultado del grabado con el Ácido Gel Grabador Proclinc.
- 4 Aplicación de una banda de acetato transparente y colocación del Adhesivo de Grabado Total Proclinc Expert en las piezas 11 y 21 durante 20 segundos. Tras esto, se coloca el Composite Nano Híbrido Incisal Proclinc Expert en la pieza 11.
- 5/6 Aplicación de una capa del Composite Nano Híbrido A3 Proclinc Expert y recubrimiento con la tonalidad incisal.
- 7 Pulido inicial de las restauraciones con dique de goma todavía colocado.
- 8 Pulido y abrillantado final con copas de goma y pasta abrillantadora.
- 9 Resultado final.



El **Composite Bulk Fill Proclinic Expert** se comporta de manera muy satisfactoria en la mayoría de casos.

Su indicación principal podría ser como cuerpo de las restauraciones profundas posteriores, seguidamente recubierto por una capa final de un material más estético. Sorprende su facilidad de manejo y su fácil compactación en la cavidad.

Si lo preferimos, también podemos aplicarlo directamente en la cavidad pues su pulido y mimetismo son excelentes. Tanto de una manera como de la otra, siempre será recomendable acompañar su aplicación del **Composite Nano Flow Proclinic Expert** en el fondo de la cavidad.

Dr. Carlos Gargallo Gallego

Dr. Carlos Gargallo Gallego Clínica Dental Carlos Gargallo

- Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Post-grado en estética dental avanzada por la Sociedad Catalana de Odontoestomatología (SCOE)
- Curso modular de especialización en cirugía plástica periodontal y periimplantaria
- Curso modular de ROG y cirugía mucogingival
- Odontólogo referente y ponente a nivel nacional en actos y ferias en temas de implantología, radiología y 3D
- **20 años**
En estética dental avanzada.
- **Referente y ponente**
En estética conservadora:
Implantología, Radiología, 3D.



| www.proclinic.es | 900 39 39 39 | info@proclinic-products.com |

