


EMPREINTES

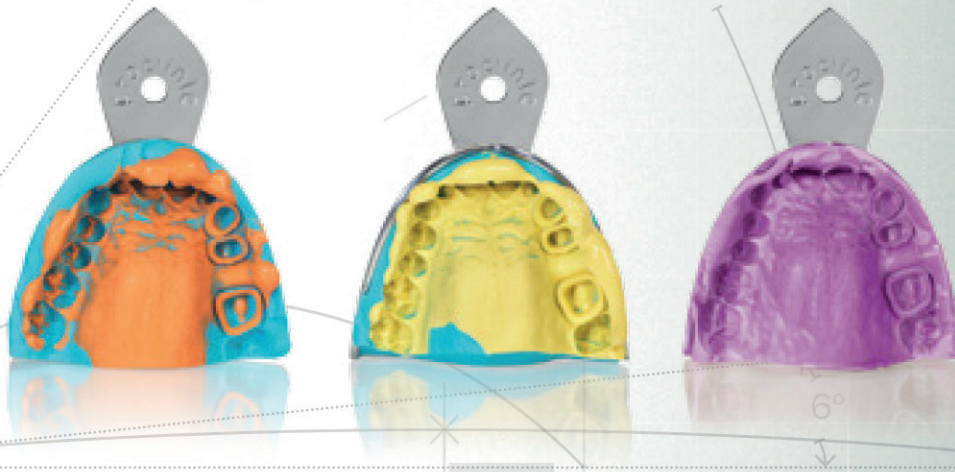

INCROYABLEMENT FACILES ET PRÉCISES

Quelle que soit la technique:
en une ou deux étapes, ou en monophasé


Les silicones **Proclinic Expert** vous garantissent un maximum de précision et de qualité

La combinaison de la nanotechnologie et de l'hydrophilie contribuent à obtenir des empreintes précises, avec une grande stabilité dimensionnelle et une reproduction fidèle des détails.



Excellente reproduction des détails

Hydrophilie élevée, angle de contact inférieur à 10°

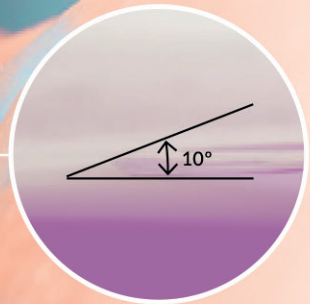

Grande élasticité et haute résistance à la déchirure

Polyvalent quant aux techniques à 1 étape (Double mélange) ou 2 étapes (Wash technique), ou en monophasé

Thixotropie parfaite, sans bulles ni formation de gouttes



Dr. Alexander Johansson
Clínica ZahnCity GmbH, Zurich, Suisse
www.zahncity.ch

“Je n’avais jamais essayé auparavant un silicone Ultra Light, et le silicone Proclinic Expert Ultra Light Body s’est avéré meilleur que le silicone Light Body que j’utilise habituellement.”



Les silicones
Proclinic Expert
sont recommandés
par les professionnels:

Dr. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo,
Barcelone, Espagne
Inscrit à l’ordre des
dentistes sous le n° 3947

“Dans toutes les techniques d’empreinte habituelles, le comportement des silicones de la gamme Proclinic Expert est pleinement satisfaisant. Que ce soit en regular ou en ultra light, les caractéristiques quant aux détails, à la consistance et à la maniabilité sont excellentes; ces silicones sont idéaux pour les prothèses fixes, l’orthodontie et les rebasages. En technique de double empreinte (Wash technique), les silicones putty manuels et ceux à mélange automatique sont facilement rectifiables au bistouri.”


Dr. Eduardo González Arroyo
Clínica Fernández, Ibiza, Espagne
www.oralurgerytube.com
Inscrit à l’ordre des
dentistes sous le n° 28007247

“Par rapport aux précédents silicones de la marque Proclinic que j’utilisais habituellement, ces silicones sont d’une qualité supérieure.”



Les silicones Proclinic Expert permettent une prise d'empreintes facile et rapide

Temps correctement modulés et viscosités différentes selon les besoins cliniques de chaque intervention. Excellent rendu des détails en milieu humide, hydrophilie élevée réduisant au minimum le risque de porosité. Obtenez des empreintes d'une grande précision grâce aux excellentes propriétés des silicones Proclinic Expert.

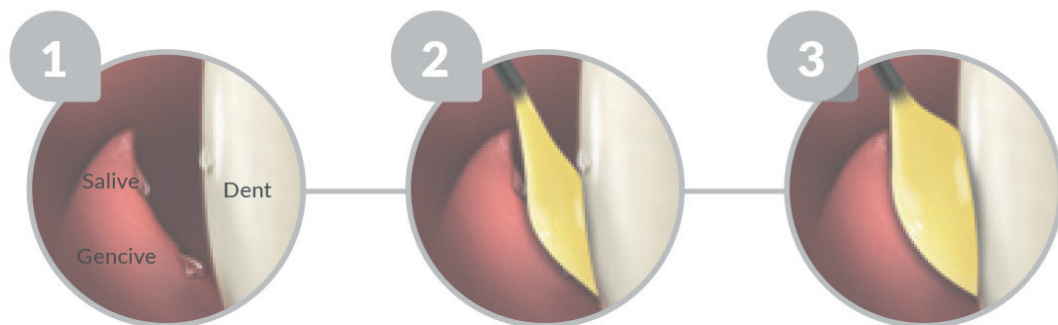


*Temps à 23 °C	Ultra Light Body	Light Body	Light Body	Regular Body	380 Heavy Body	380 Heavy Body	380 Putty Soft	Putty Soft	Putty Soft
	Fast Set	Regular Set	Fast Set	Regular Set	Regular Set	Fast Set	Fast Set	Regular Set	Fast Set
Reorder	15156	15153	15154	15152	15158	15159	15157	15150	15151
ISO 4823	Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 1	Type 1	Type 0	Type 0	Type 0
ADA 19	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Medium-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency
Proportions du mélange	1:1	1:1	1:1	1:1	5:1	5:1	5:1	1:1	1:1
Système									
Type de mélange	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Hand mixing	Hand mixing
Temps total de travail	1'30"	2'	1'30"	2'	2'	1'30"	1'30"	2'	1'30"
Temps de séjour minimal dans la cavité orale	2'30"	3'30"	2'30"	3'30"	3'30"	2'30"	2'30"	3'30"	2'30"
Temps de prise*	4'	5'30"	4'	5'30"	5'30"	4'	4'	5'30"	4'
Déformation à la compression (min-max)	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	1- 3%	1- 3%	1- 3%
Reprise élastique	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99%	> 99%	> 99%
Stabilité dimensionnelle 24 h	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%
Dureté "Shore A"	45±2	45±2	45±2	45±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2
Techniques suggérées	2 étapes	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou monophasé	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou 2 étapes	1 étape ou 2 étapes
	FAIBLE CONSISTANCE				HAUTE CONSISTANCE				

Complétez votre gamme de silicones avec le silicone Proclinic Expert pour les empreintes d'occlusion. Un silicone avec dureté 95 Shore A (15160) qui garantit un excellent rendu des détails.

Les silicones **Proclinic Expert** s'adaptent à toutes les techniques de prise d'empreinte


TECHNIQUE EN UNE ÉTAPE (Double mélange)

PUTTY SOFT FAST	Temps total de travail 1'30"	Temps de séjour dans la cavité 2'30"
LIGHT BODY FAST	Temps total de travail 1'30"	Temps de séjour dans la cavité 2'30"

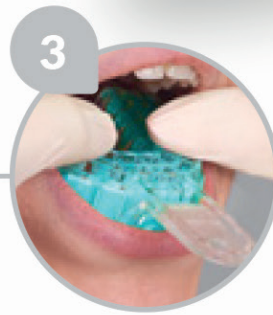

TECHNIQUE EN DEUX ÉTAPES (Wash technique)

PUTTY SOFT REGULAR	Temps total de travail 2'	Temps de séjour dans la cavité 3'30"
ULTRA LIGHT BODY	Temps total de travail 1'30"	Temps de séjour dans la cavité 2'30"

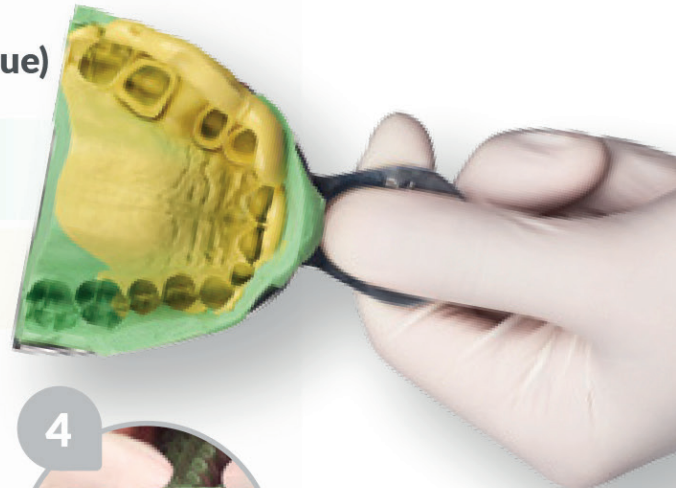

Les silicones **Proclinic Expert** remportent d'excellentes notes dans les tests cliniques

 <p>THE DENTAL ADVISOR Improving Patient Care Through Research & Education</p>	<p>Proclinic Expert VPS Impression Material ++++½</p>	<p>THE DENTAL ADVISOR www.dentaladvisor.com</p> <p>RATINGS: Excellent +++++ Very Good ++++ Good +++</p>
---	---	---

373
APPLICATIONS
CLINIQUES

87%
des consultants ont jugé les
silicones Proclinic Expert
**AUSSI BONS
OU MEILLEURS**
que ceux qu'ils utilisaient
habituellement

91%
DE SATISFACTION

78%
DE RECOMMANDATION



| www.proclinic-products.com |

| info@proclinic-products.com |

Pour obtenir plus d'information consultez votre distributeur habituel.



Les silicones Proclinic Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I selon la directive 93/42 CE. Indications : Empreintes dentaires. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.